




- Mergulhar em água com detergente neutro por 12 hrs ou detergente enzimático, o qual deverá ser utilizado de acordo com as recomendações da embalagem do produto.
- Após esse tempo, realizar a limpeza utilizando esponja macia, que não seja abrasiva.
- Enxaguar em água corrente.
- Realizar a secagem das mesmas com pano macio.

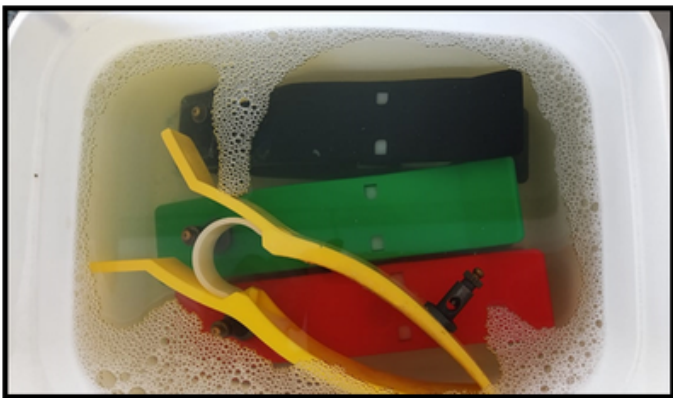

A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CARDIOCLIPS E VENTOSAS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POIS A OXIDAÇÃO POSSIVELMENTE IRÁ OCASIONAR INTERFERÊNCIA NO TRAÇADO, DEVIDO A DIFICULDADE DE CONDUÇÃO NAS ÁREAS DE CONTATO DO CABO COM O CARDIOCLIP OU VENTOSA

CUIDADOS E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES

O EQUIPAMENTO, CABO ALIMENTADOR E CABO DO PACIENTE DEVEM SER HIGIENIZADO COM PANO LEVEMENTE UMIDECIDO EM ÁLCOOL 70%.



- SEPARAR A PARTE METÁLICA DA BORRACHA.
- MERGULHAR EM ÁGUA COM DETERGENTE NEUTRO POR 12 HRS OU DETERGENTE ENZIMÁTICO, O QUAL DEVERÁ SER UTILIZADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA EMBALAGEM DO PRODUTO.
- APÓS ESSE TEMPO, REALIZAR A LIMPEZA UTILIZANDO ESCOVA DE CERDAS MACIAS, PRESSIONAR A PARTE DE BORRACHA PARA QUE SAIA TODA ÁGUA OU GEL ACUMULADO DENTRO, ENXAGUAR EM ÁGUA CORRENTE.
- REALIZAR A SECAGEM DAS MESMA COM PANO MACIO.

