

**Procedimento para realizar eletrocardiograma**  
**Sistema: ECGPC – TEB**

1. Após abrir o programa **ECGPC-TEB**, clique no botão **INICIAR**.
2. Para cadastrar um **NOVO PACIENTE**, clique no botão **NOVO PACIENTE**.
3. Preencha os 4 campos obrigatórios: **(NOME COMPLETO, SEXO, DATA DE NASCIMENTO E CPF)**.
4. Após preencher os campos, clique no botão **NOVO EXAME**.
5. Nesta janela, preencha o campo **INDICAÇÃO** com o nome da **UNIDADE** que já está pré-definido.
6. Nesta mesma janela, preencha o campo **DADOS CLINICOS** para informar os sintomas e **MEDICAMENTOS EM USO**.
7. Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão **MONITORIZAÇÃO**.
8. Após começar a monitorizar aguarde a estabilização do traçado.  
**(Aguarde no mínimo 30 segundos de monitorização antes de capturar o traçado)**.
9. Clique na aba **REGISTRAR**.
10. Clique na aba **MONITORAÇÃO** para obter mais registros do traçado.  
**(Orientamos que seja realizado no mínimo 03 capturas)**.
11. Após capturar os 03 traçados, clique na aba **ENCERRAR**.
12. Após clique no botão **ENCERRAR EXAME**, e aguarde até que a próxima aba se reinicie automaticamente, depois clique no botão **X** que fecha o programa. O procedimento está completo e o exame já foi exportado para a pasta de **SAÍDA**.
13. Em sua área de trabalho/desktop possui uma seta de cor verde, clique duas vezes sobre ela e o exame será exportado para o **SISTEMA WEB DA CALL ECG**.
14. Por fim, acesse o sistema web da Call ECG, complete o cadastro do paciente e agora é só enviar para a central clicando no botão de cor verde **ENVIAR EXAME**.