

Procedimento para Realizar Eletrocardiograma

Sistema: ECGPC – TEB

1º – Após abrir o **Programa ECGPC – TEB** clique no botão Iniciar.

2º - Para cadastrar um **NOVO PACIENTE** clique no botão Paciente.

3º - Preencha os 3 campos **Obrigatórios**.

(NOME COMPLETO, SEXO E DATA DE NASCIMENTO)

4º Após preencher os campos clique no botão **Novo Exame**.

5º - Nesta janela, preencha o campo **Indicação** com o nome da **UNIDADE** que já está pré-definido.

6º - Após o preenchimento de todos os campos clique no botão **Monitorizar**.

7º - Após começar a monitorizar aguarde a estabilização do traçado.

(Aguarde no mínimo 30 segundos de monitorização antes de ser capturar o traçado).

Após aproximadamente 30 Segundos corridos.

8º - Clique no botão **Captura**.

9º Clique no botão nova captura para obter mais registros do traçado.

(Orientamos que seja realizado no mínimo 03.)

10º Após capturar 03 traçados, clique no botão **Encerrar Exame**.

Após clicar no botão **Encerrar exame** o procedimento está completo e o exame já foi exportado automaticamente para a pasta de **SAÍDA**, a qual possui um atalho em seu desktop/área de trabalho.

- Lembrando que o arquivo a ser Exportado do programa é Zip e não JPEG e BMP. Agora é só enviar para o Sistema Web da Call ECG.

Obs: Arquivo Zip não pode ser renomeado, pois isso danificará o arquivo.

As imagens de captura dos traçados estão localizadas dentro da pasta zip.