


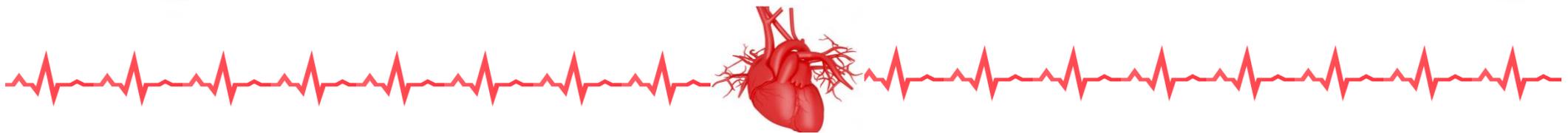


CONEXÃO DOS CABOS
AOS CARDIOCLIPS E VENTOSAS

Eletrocardiograma

A troca dos cabos pode causar alterações significativas no traçado, dificultando a avaliação do mesmo, e ocasionando um retrabalho, pois o exame terá que ser repetido.




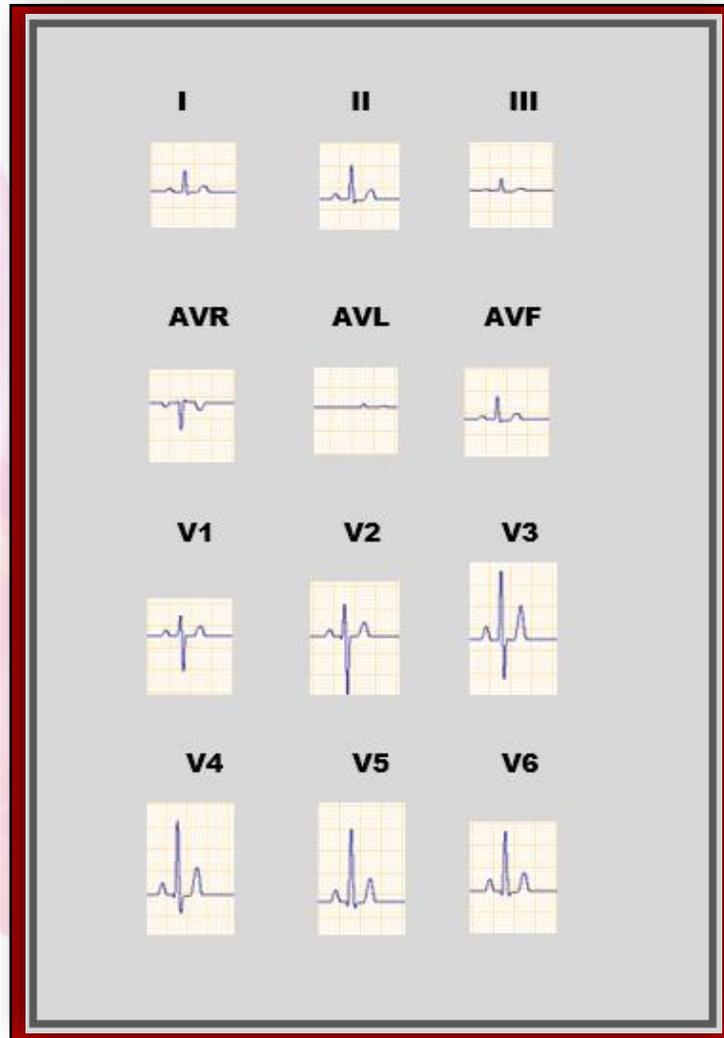


EM UM EXAME REALIZADO DE FORMA CORRETA AS ONDAS SE APRESENTAM DAS SEGUINTE FORMAS:


POSITIVA, NEGATIVA E DIFÁSICA.

* DIFÁSICA: É QUANDO A ONDA APRESENTA UMA FASE POSITIVA E OUTRA NEGATIVA NO MESMO COMPLEXO.

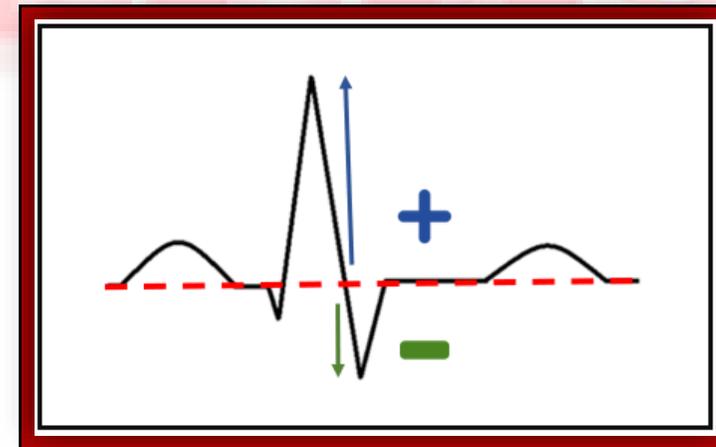


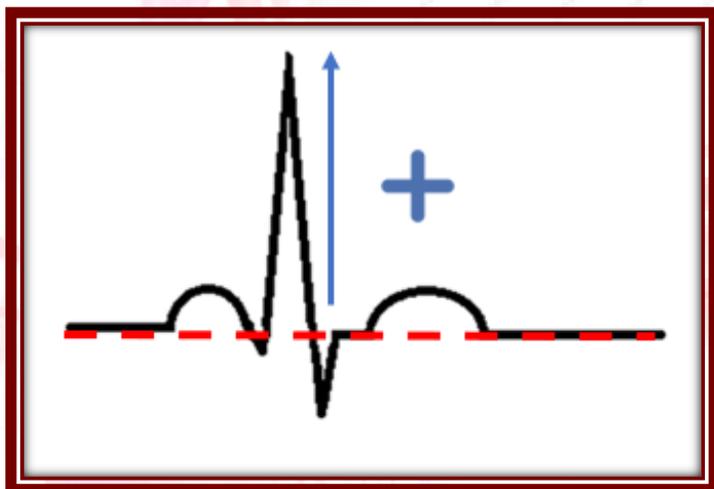


POSITIVA

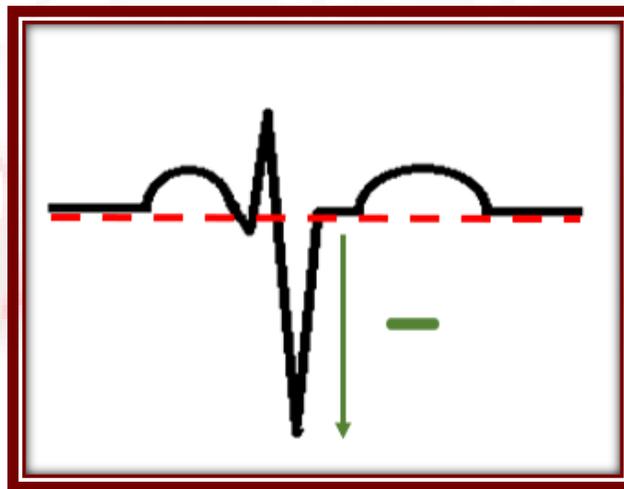

NEGATIVA

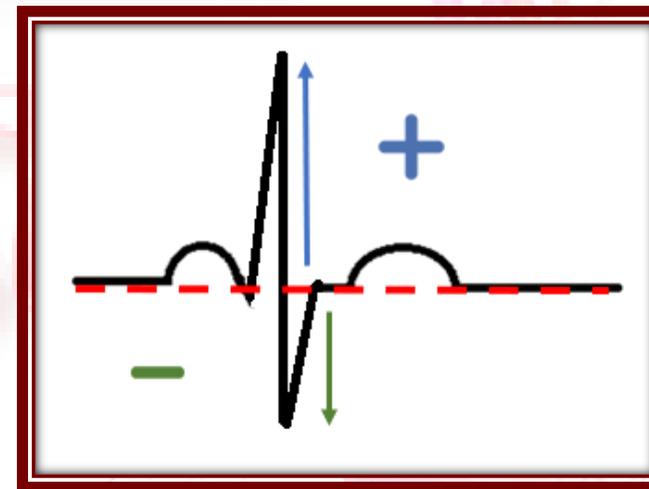


DIFÁSICA

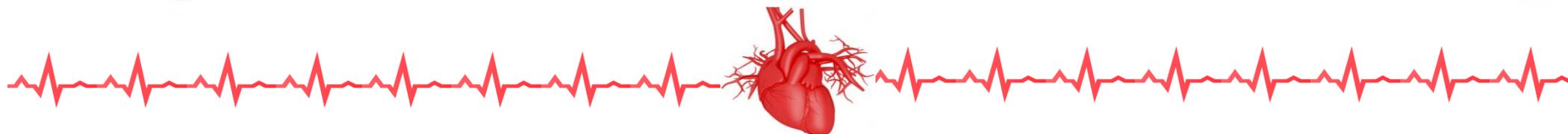

EXEMPLO

**EXAME REALIZADO
DE FORMA CORRETA
E COM PADRÃO DE
ONDAS NORMAIS.**

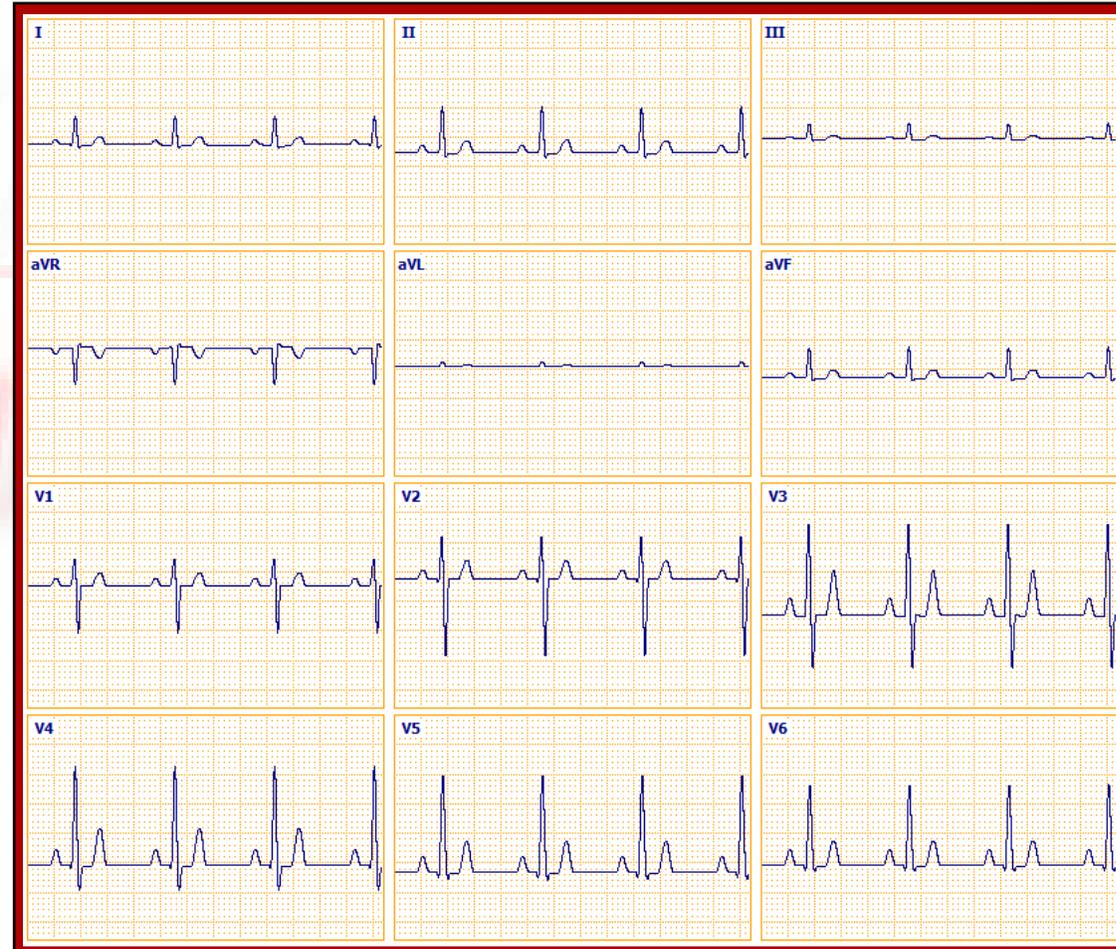

TROCA DE CABOS PERIFÉRICOS EM MEMBROS SUPERIORES

NA FORMA CORRETA D1 E AVL DEVEM ESTAR POSITIVOS E AVR NEGATIVO

NOTA-SE QUE NESTE EXEMPLO D1, AVR E AVL APRESENTAM INVERSÃO DO PADRÃO NORMAL




CERTO



ERRADO



(TROCADO)

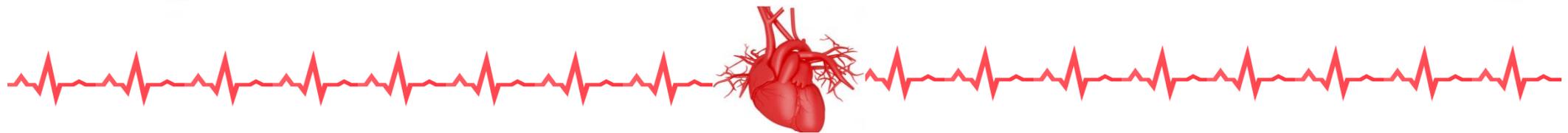

CABOS PERIFÉRICOS DE MEMBROS COM INVERSÃO DE LATERALIDADE

NA FORMA CORRETA D1, D2 E AVL QUASE SEMPRE DEVERÃO ESTAR POSITIVO E AVR NEGATIVO


NOTA-SE QUE NESTE EXEMPLO APRESENTA A INVERSÃO DO PADRÃO NORMAL



CERTO


ERRADO


(TROCADO)

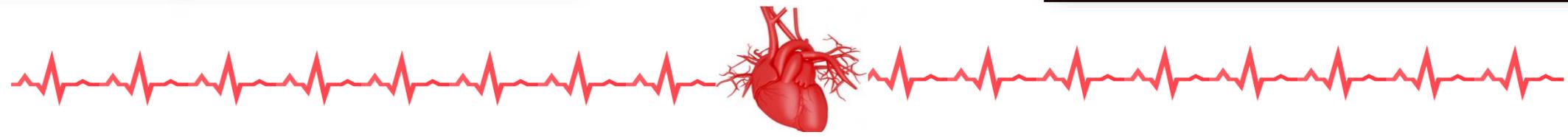


CABOS TROCADOS NO TÓRAX

NA FORMA CORRETA V1 DEVE TER PREDOMÍNIO DA FASE NEGATIVA E V6 COM PREDOMÍNIO DA FASE POSITIVA.

NOTA-SE QUE NESTE EXEMPLO V1 ESTÁ TODO POSITIVO E V6 ESTÁ COM PREDOMÍNIO NEGATIVO

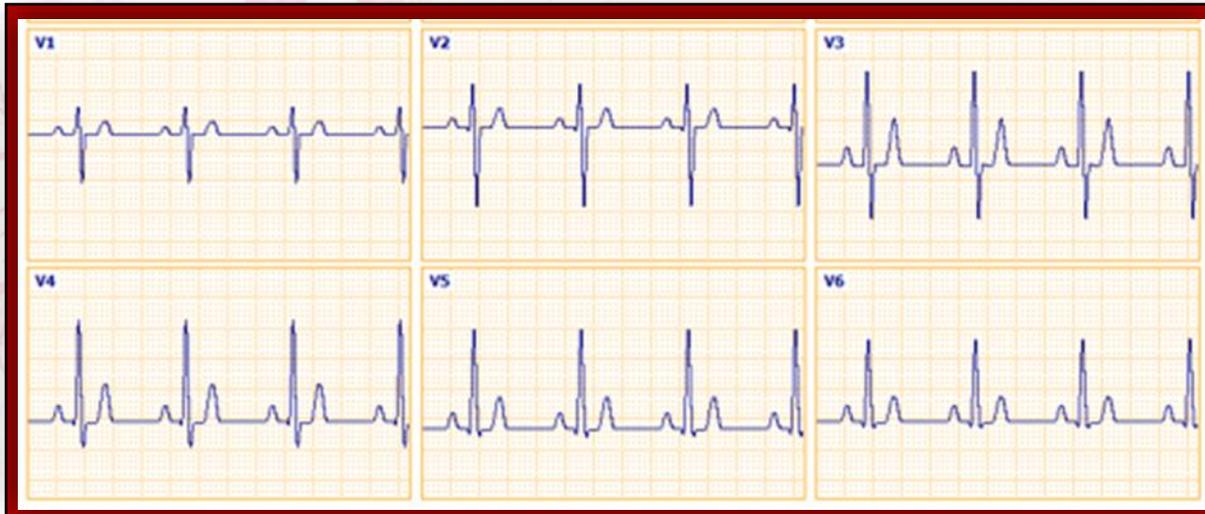


CERTO

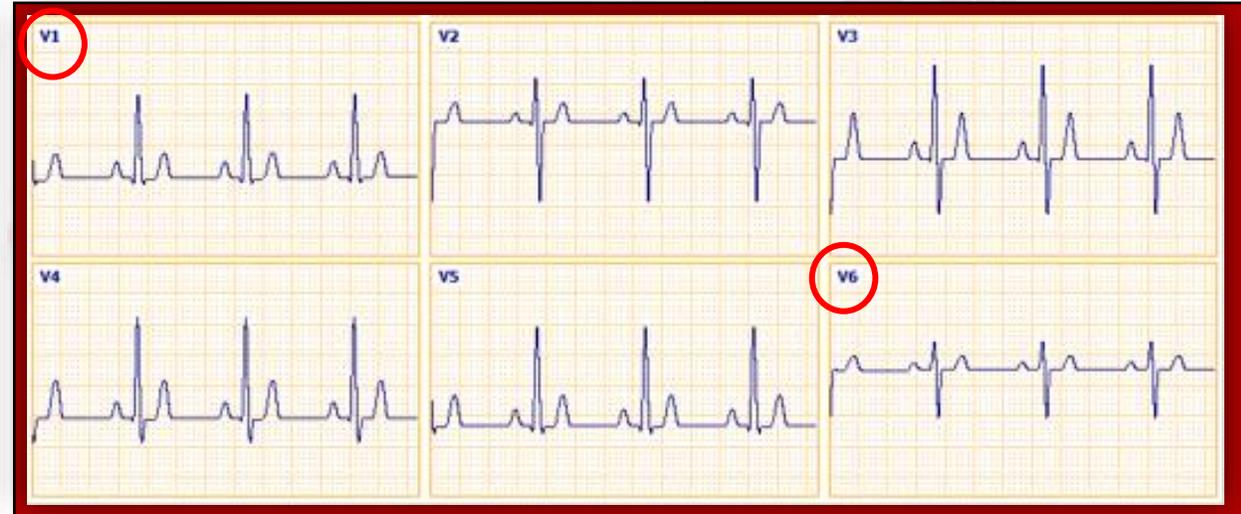

(TROCADO)


ERRADO

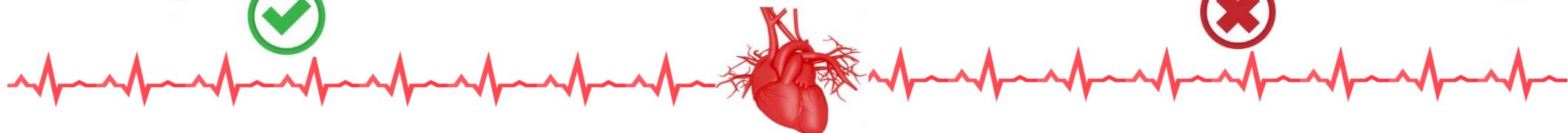


CABOS TROCADOS NO TÓRAX

NA FORMA CORRETA V2 DEVE ESTAR COM PEQUENA FASE POSITIVA E GRANDE FASE NEGATIVA (rS)
E V5 AO CONTRÁRIO (Rs)

NOTA-SE QUE NESTE EXEMPLO V2 ESTÁ TODO POSITIVO E V5 ESTÁ COM PREDOMÍNIO NEGATIVO

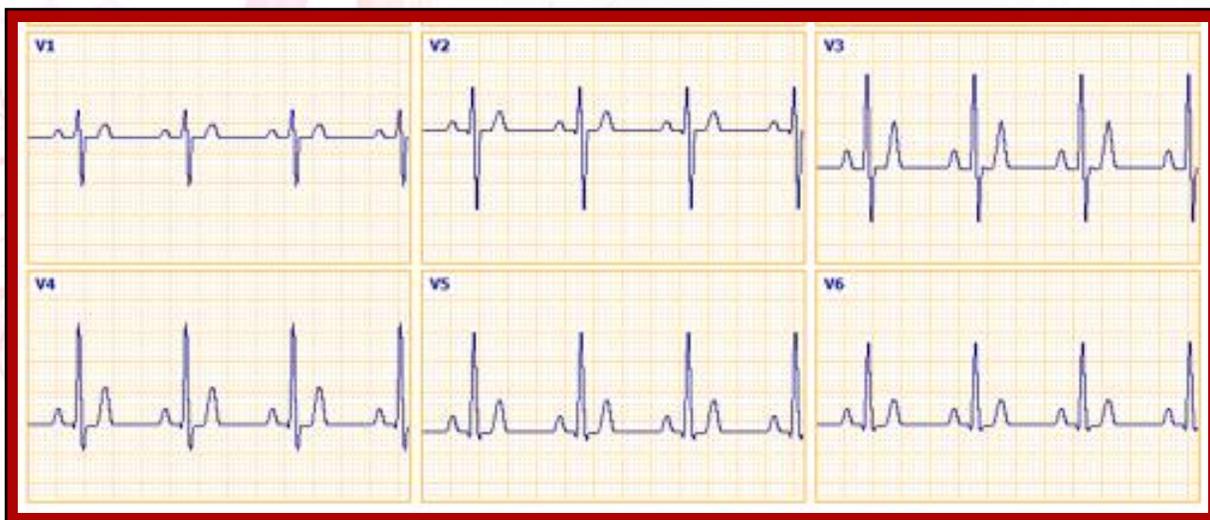


CERTO

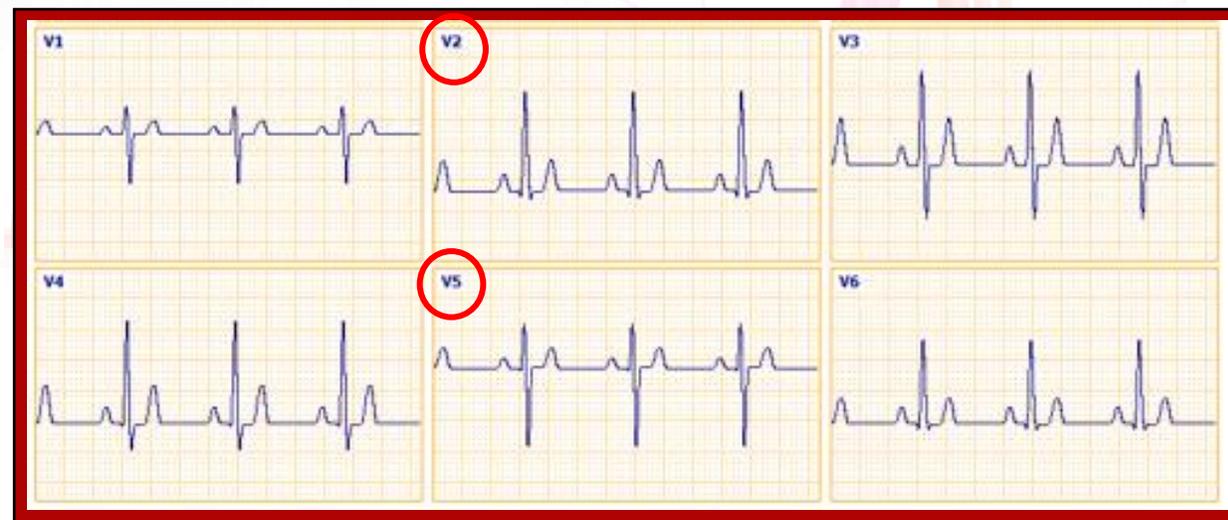


(TROCADO)

ERRADO

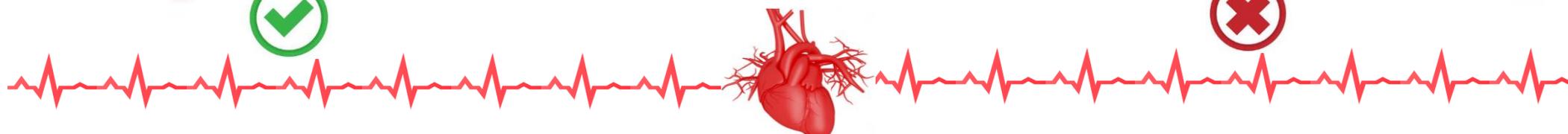

Por isso é muito importante que estejamos atentos a colocação dos cabos. Além disso a limpeza e conservação também é de extrema importância, pois a oxidação dos mesmos pode causar interferência no exame.

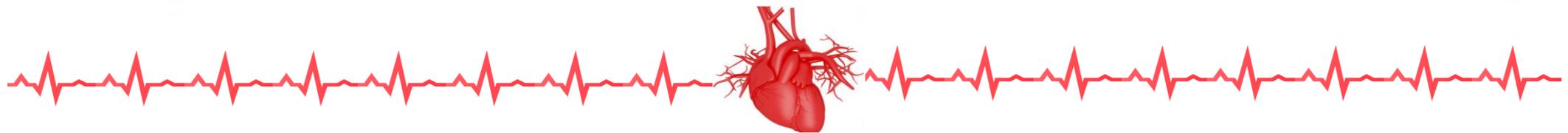

Colocação dos Eletrodos

V1: Quarto espaço intercostal na borda direita do esterno

V2: Quarto espaço intercostal na borda esquerda do esterno


V3: Espaço intermediário entre V2 e V4

V4: Quinto espaço intercostal na linha média clavicular


V5: Quinto espaço intercostal na linha axilar anterior

V6: Quinto espaço intercostal na linha axilar média

Derivações Precordiais

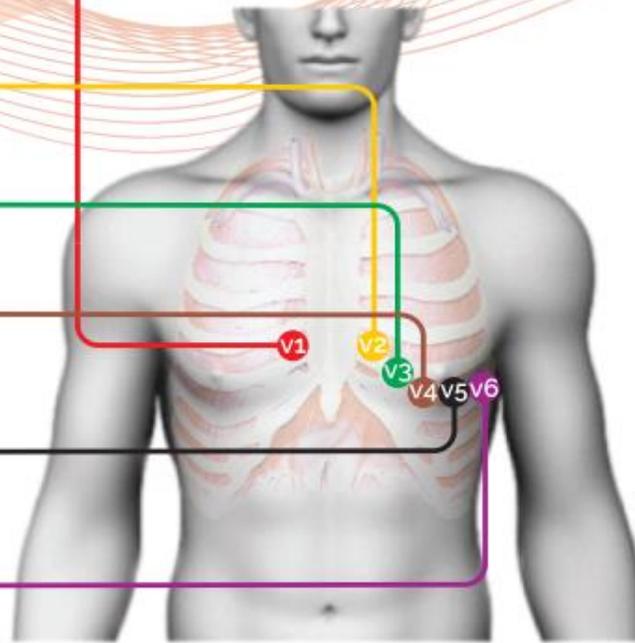

Derivações Periféricas

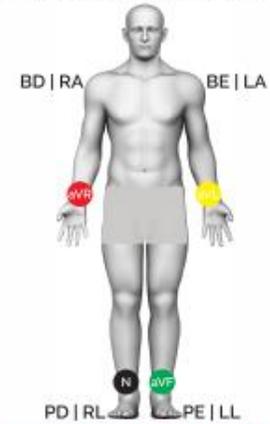

Vermelho: Braço Direito | Right Arm


Amarelo: Braço Esquerdo | Left Arm

Preto: Perna Direita | Right Leg

Verde: Perna Esquerda | Left Leg

*Padrão de Cores Europeu



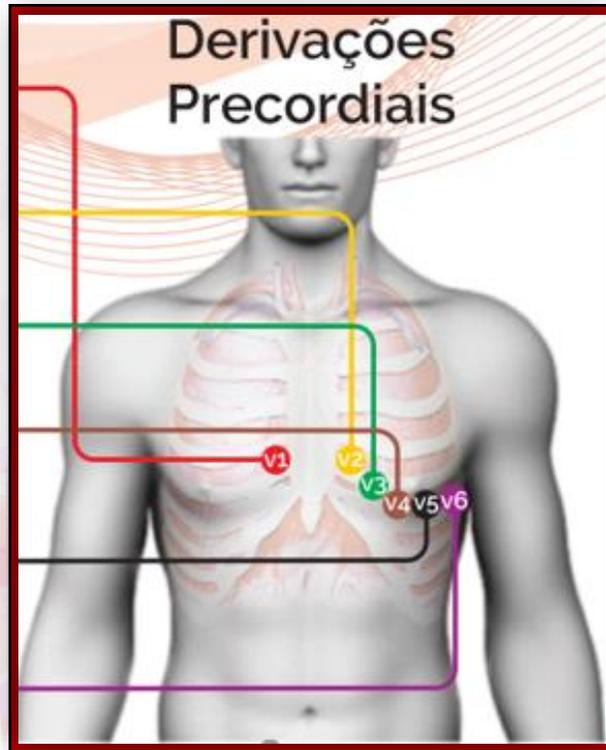

EM CASO DE DÚVIDA AO REALIZAR O EXAME:

PARA QUE NOSSO ATENDENTE POSSA AUXILIAR, FOTOGRAFE O POSICIONAMENTO DOS CABOS, E ENCAMINHE

PARA O WHATSAPP: (42) 9 8838-0746 - CENTRAL 24H DA CALL ECG





Call ECG

SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Fale conosco

Serviços por telefone

Central de atendimento (24 Horas)

(42) 4009-9999

Celular (42) 9 8816-2364 Whatsapp (42) 9 8838-0746

Enf^a Camila Miara

(42) 9 9962-0022

