


Procedimento para Realizar Eletrocardiograma

Sistema ECGPC – TEB

1º – Após abrir o Programa ECGPC – TEB clique no Botão Iniciar.



2º - Para cadastrar um NOVO PACIENTE clique no Botão Paciente.

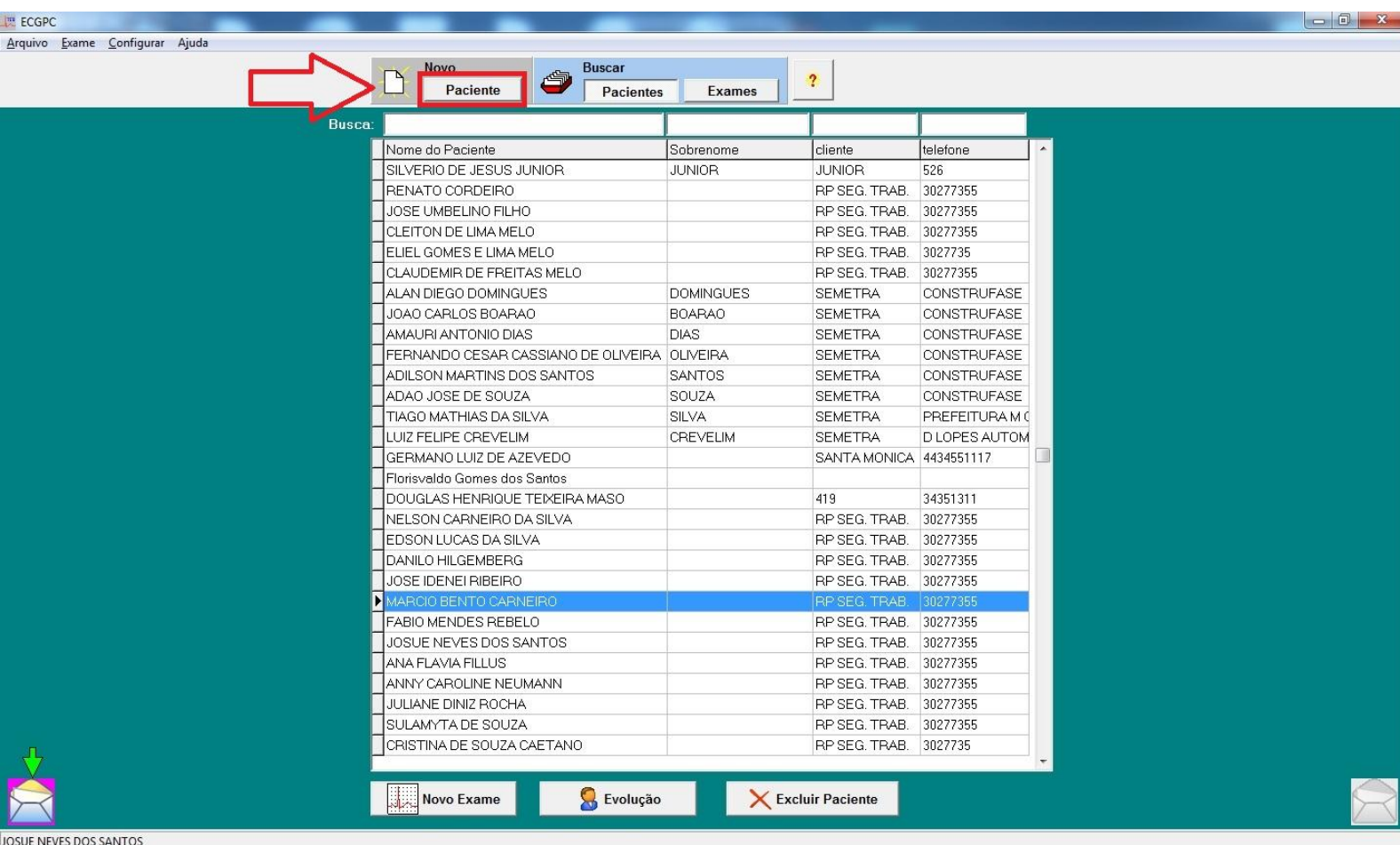

3º - Preencha os 4 Campos **Obrigatórios** destacados em Vermelho.

ECGPC

Arquivo Exame Configurar Ajuda

Novo Paciente Buscar Pacientes Exames ?

Busca:

Nome do Paciente	Sobrenome	CLIENTE	RG
SILVERIO DE JESUS JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	
RENATO CORDEIRO		RP SEG. TRAB.	

Novo Paciente

Nome Completo: Sobrenome:(para busca)

Sexo: CLIENTE

Data Nasc.:

RG:

CPF: Estado Civil: ☐ Profissão:

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: UF:

CEP: Telefone Residencial: Telefone Comercial:

Email: Data de Cadastro: 31/07/13

JULIANE DINIZ ROCHA RP SEG. TRAB.
SULAMYTA DE SOUZA RP SEG. TRAB.
CRISTINA DE SOUZA CAETANO RP SEG. TRAB.

Novo Exame Evolução Excluir Paciente

Existe(m) 5 exame(s) na pasta de saída!

Após preencher os campos clique no Botão Novo Exame.

ECGPC

Arquivo Exame Configurar Ajuda

Novo Paciente Buscar Pacientes Exames ?

Busca:

Nome do Paciente	Sobrenome	CLIENTE	RG
TIAGO MATHIAS DA SILVA	SILVA	SEMETRA	
LUIZ FELIPE CREVELIM	CREVELIM	SEMETRA	

Novo Paciente

Nome Completo: Sobrenome:(para busca)

Sexo: CLIENTE

Data Nasc.:

RG:

CPF: Estado Civil: ☐ Profissão:

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: UF:

CEP: Telefone Residencial: Telefone Comercial:

Email: Data de Cadastro: 31/07/13

CLAUDIO MARQUES DA COSTA RP SEG. TRAB.
LUCIANO LUIZ CHAVES DOS SANTOS RP SEG. TRAB.
ANSELMO RIBEIRO RP SEG. TRAB.

Novo Exame Evolução Excluir Paciente

Existem 41 pacientes cadastrados

4º - Neste passo Preencha os Campos destacados em Vermelho **Obrigatórios**. Os campos em Amarelo Só deverão ser preenchidos caso o paciente possua Marcapasso.

ECGPC

Arquivo Exame Configurar Ajuda

Novo Paciente Buscar Pacientes Exames ?

Busca: Nome do Paciente Sobrenome CLIENTE RG

Novo Exame

Paciente: JOÃO DOS SANTOS

Exame No.: 0000000002

Indicação: Dr

Idade: 25 anos e meses

Peso: Kg Altura: m

Marcapasso: implantado em:

Dados Clínicos:

Medicamentos em Uso:

Fatores de Risco: hipertensão, fumo, diabetes, obesidade, dislipidemia, stress.

AAS

Data: 31/07/13 Hora: 10:46

☒ Monitorizar ☐ Cancelar

JOÃO DOS SANTOS SANTOS NOME CLIENTE

☒ Novo Exame ☐ Evolução ☐ Excluir Paciente

Existem 42 pacientes cadastrados

Para preencher o campo Indicação apenas clique na seta e selecione o nome previamente cadastrado. Este campo é a indicação da sua Unidade, deverá **SEMPRE** ser Preenchido.

ECGPC

Arquivo Exame Configurar Ajuda

Novo Paciente Buscar Pacientes Exames ?

Busca: Nome do Paciente Sobrenome CLIENTE RG

Novo Exame

Paciente: JOÃO DOS SANTOS

Exame No.: 0000000002

Indicação: Dr. Nome do Cliente Cadastrado - PR  

Idade: 25 anos e meses

Peso: Kg Altura: m

Marca passo: implantado em: / /

Dados Clínicos:

Fatores de Risco: hipertensão, fumo, diabetes, obesidade, dislipidemia, stress.

Medicamentos em Uso:

AAS

Data: 31/07/13 Hora: 10:46

JOÃO DOS SANTOS SANTOS NOME CLIENTE

 Novo Exame  Evolução  Excluir Paciente 

Existem 42 pacientes cadastrados

5º - Após o preenchimento de todos os campos clique no Botão Monitorizar.

ECGPC

Arquivo Exame Configurar Ajuda

Novo Paciente Buscar Pacientes Exames ?

Busca: Nome do Paciente Sobrenome CLIENTE RG

Novo Exame

Paciente: JOÃO DOS SANTOS

Exame No.: 0000000002

Indicação: Dr Nome do Cliente Cadastrado - PR

Idade: 25 anos e meses

Peso: 80 Kg Altura: 1,85 m

Marca passo: implantado em: / /

Dados Clínicos:

hipertensão, diabetes, obesidade, dor precordial, vomito

Fatores de Risco:

- hipertensão,
- fumo,
- diabetes,
- obesidade,
- dislipidemia,
- stress,

Medicamentos em Uso:

AAS, CAPTOPRIL, LOSARTANA, DIGOXINA

AAS

Data: 31/07/13 Hora: 10:46


Monitorizar Cancelar

JOÃO DOS SANTOS SANTOS NOME CLIENTE


Novo Exame Evolução Excluir Paciente

Existem 42 pacientes cadastrados


6º - Após começar a Monitorizar aguarde o traçado Estabilizar, exige-se no mínimo 30 Segundos de monitorização antes de ser Capturado o Traçado. Após aguardar 30 Segundos clique no Botão Captura.

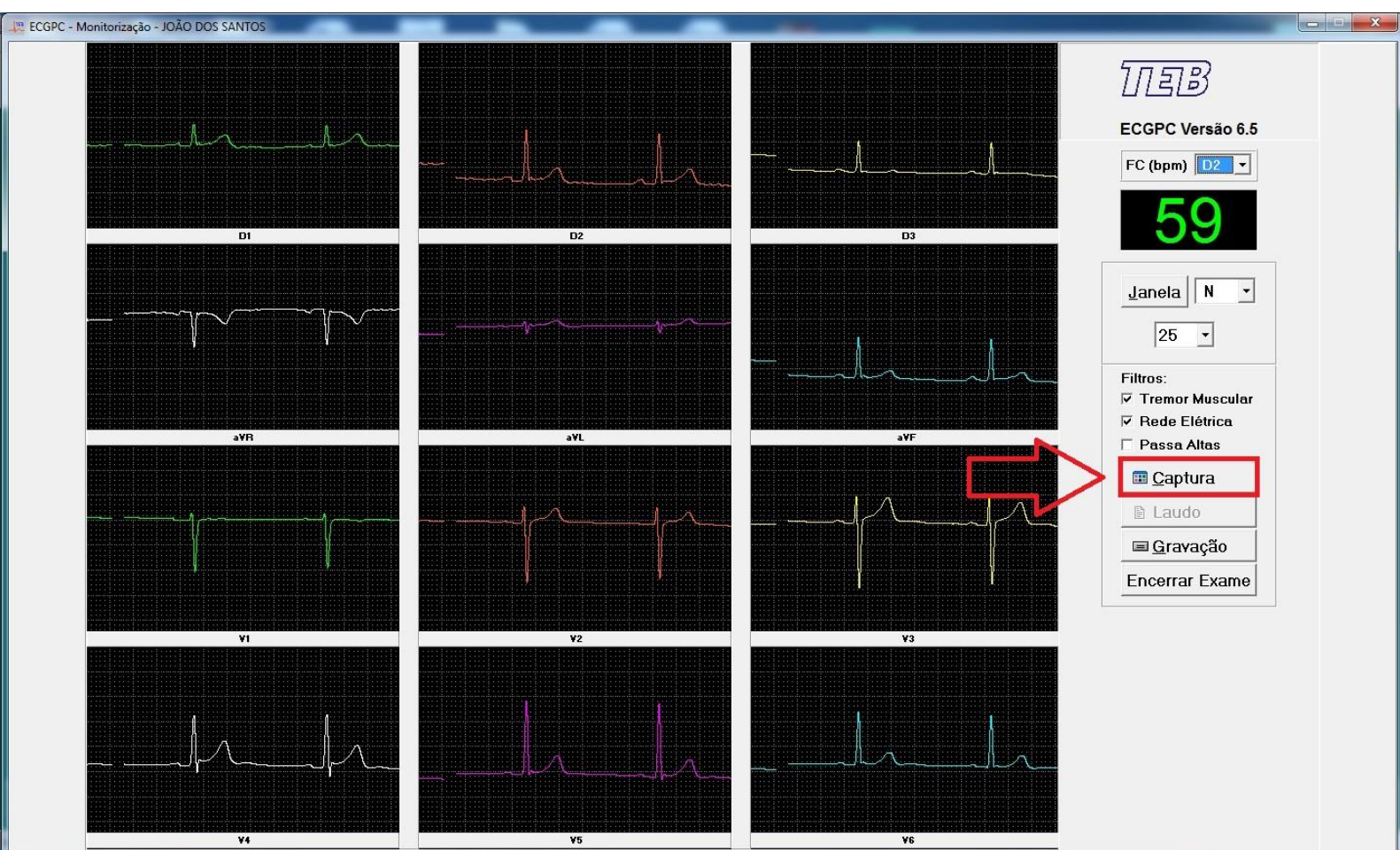

Esta tela de Captura será apresentada, se o traçado apresentar boa qualidade então clique no Botão Encerrar Exame.

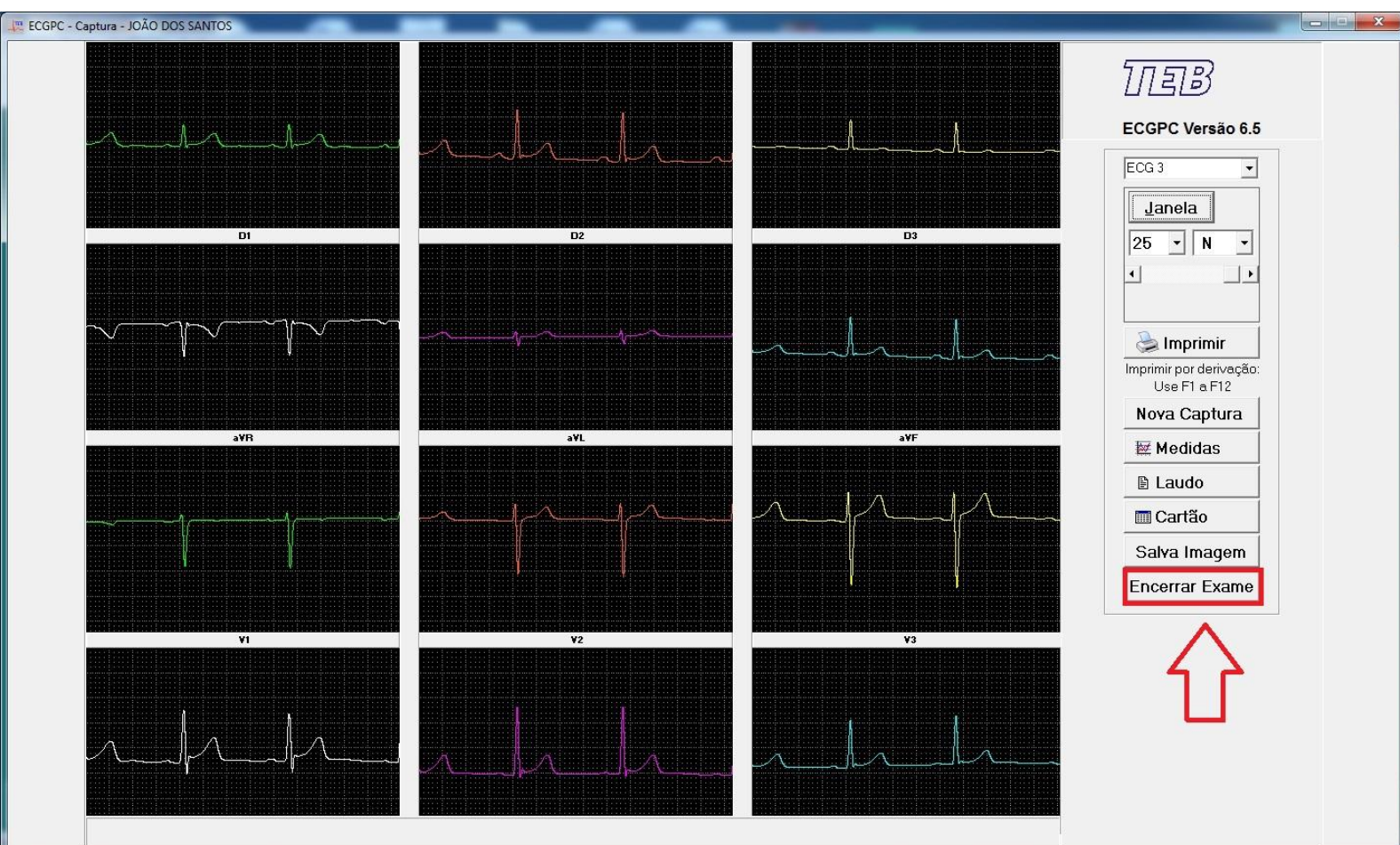

Se o traçado estiver com Interferências então clique no Botão Nova Captura e repita a partir do 6º Passo.

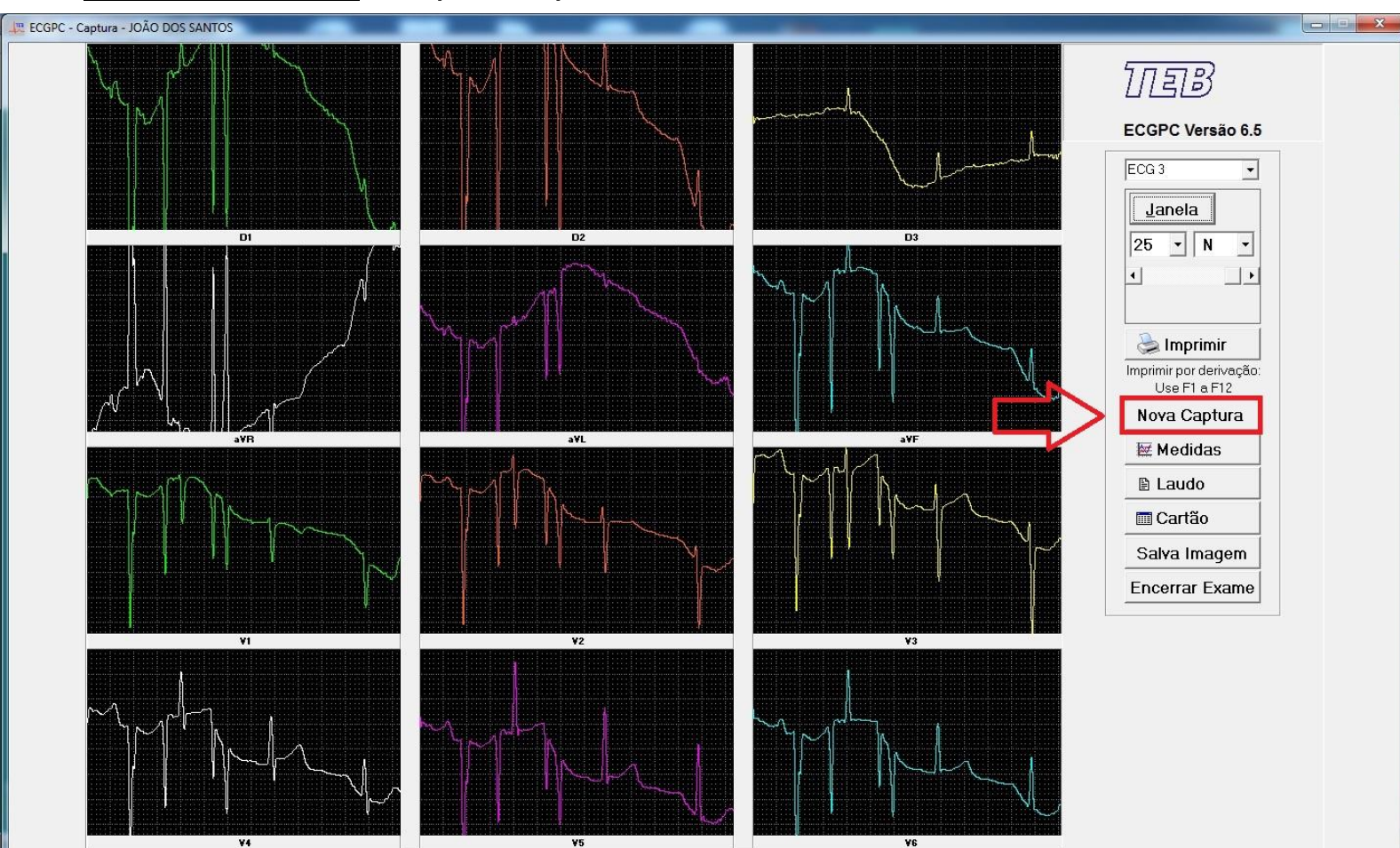

Após clicar no Botão *Encerrar Exame* o procedimento está completo e o exame já foi exportado automaticamente para a Caixa de Saída, a qual possui um Atalho em seu Desktop/Área de Trabalho.