



Procedimento para realizar eletrocardiograma




**CARDIOCARE
2000**

Bionet



Relembre o posicionamento

Colocação dos Eletrodos

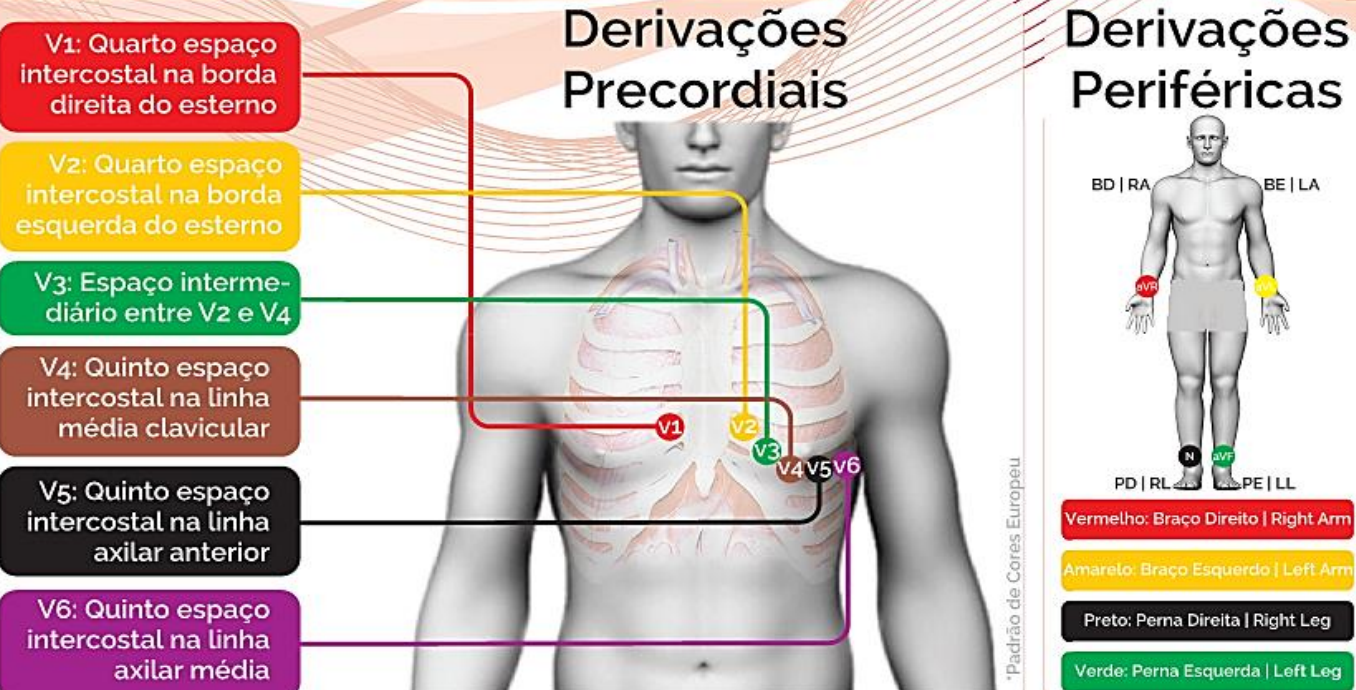

Passo a Passo

Execute o Programa
Ekg Viewer.

 Lixeira
 Enviar ECG

 AnyDesk

 Foxit Reader

 Google Chrome

 Ekg Viewer

 BMS Server

 SAIDA

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1


V2

V3


V4

V5

V6

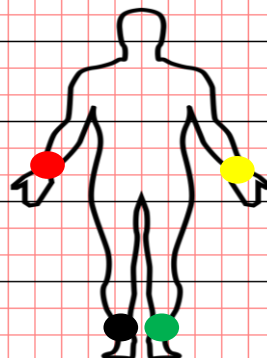

Coloque os eletrodos no paciente.

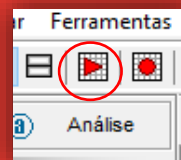

Após abrir o programa EKG Viewer clique no botão PLAY para iniciar a monitoração.

1º Passo

ID
Nome
Sobrenome
Gênero
Idade
Peso Kg
Altura Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora

2º

Passo

Aguarde alguns segundos até
o traçado estabilizar.

Dados do Paciente



ID
Nome
Sobrenome
Gênero
Idade
Peso Kg
Altura Cm
Complemento

Diversos

Médico
Hospital
Data/Hora

Editar Info

Salvar Info

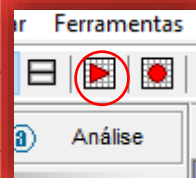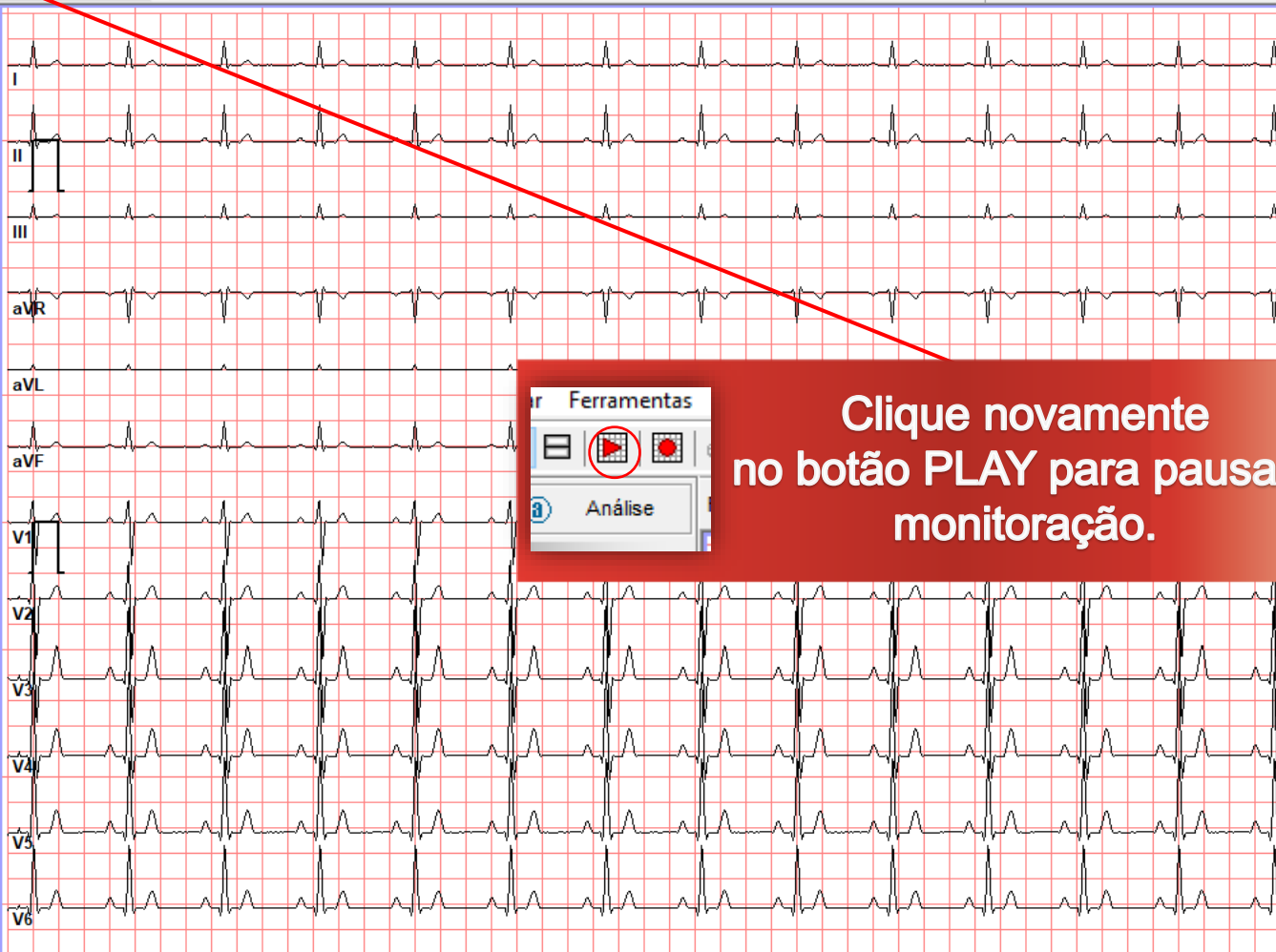

Clique novamente
no botão PLAY para pausar a
monitoração.



Atenção

Os passos 1, 2 e 3
servem para avaliar a
qualidade da leitura do
traçado, pois durante o
período de gravação
não é possível
visualizar o mesmo até
que a captura finalize.


3º Passo

ID
Nome
Sobrenome
Gênero
Idade
Peso Kg
Altura Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora

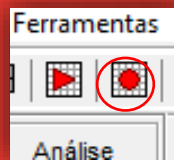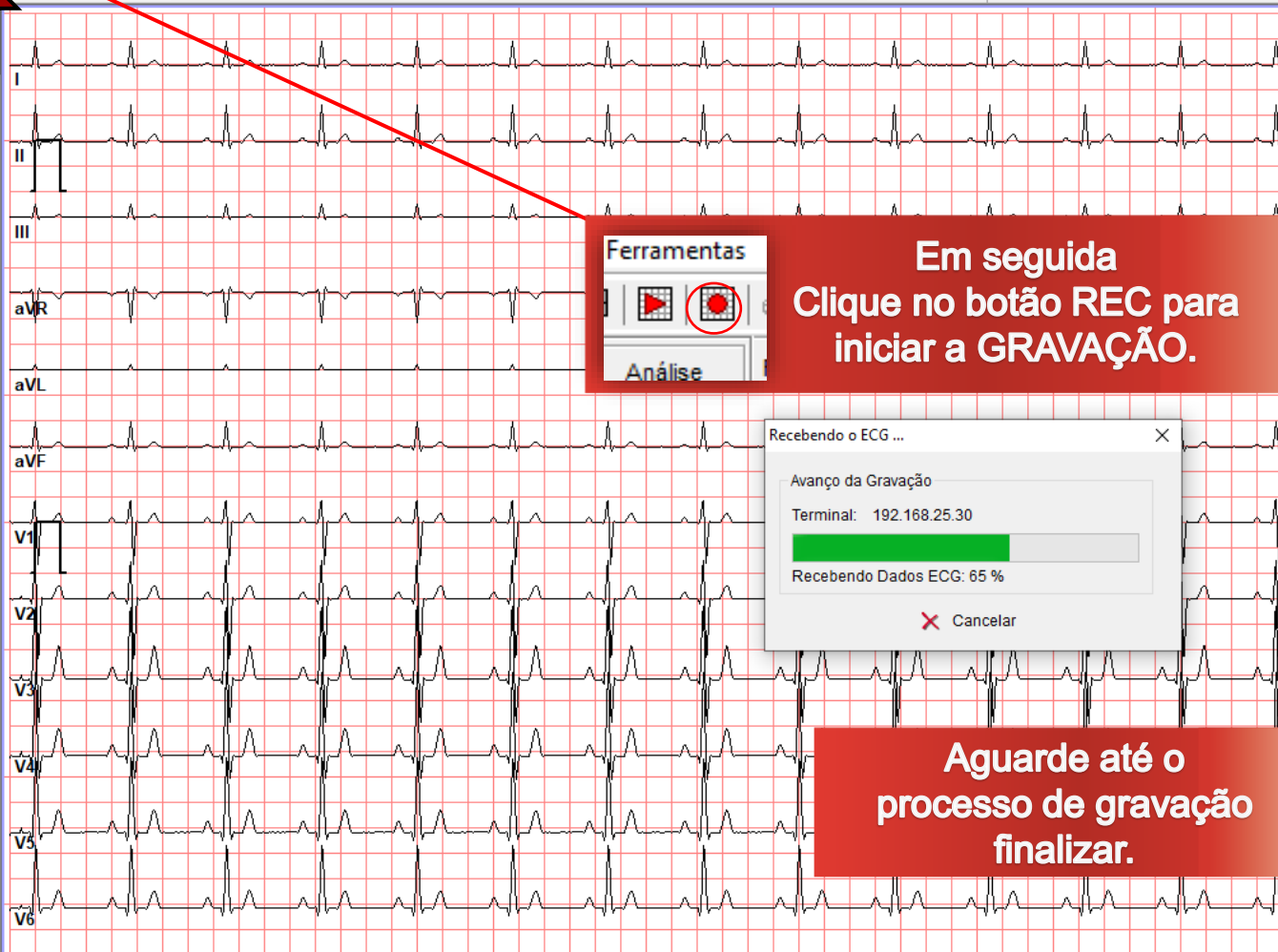

Em seguida
Clique no botão REC para
iniciar a GRAVAÇÃO.

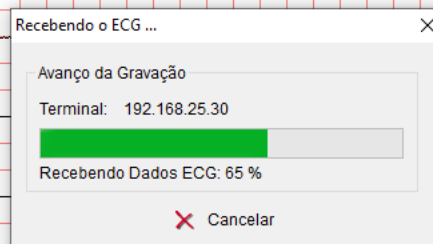


Aguarde até o
processo de gravação
finalizar.

4º Passo


ID
Nome
Sobrenome
Gênero
Idade
Peso Kg
Altura Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora

Formato: 12Ch Ritmo: LEAD: II Ganho: 10mm/mV Velocidade: 25mm/sec Régua Lupa Marcapasso

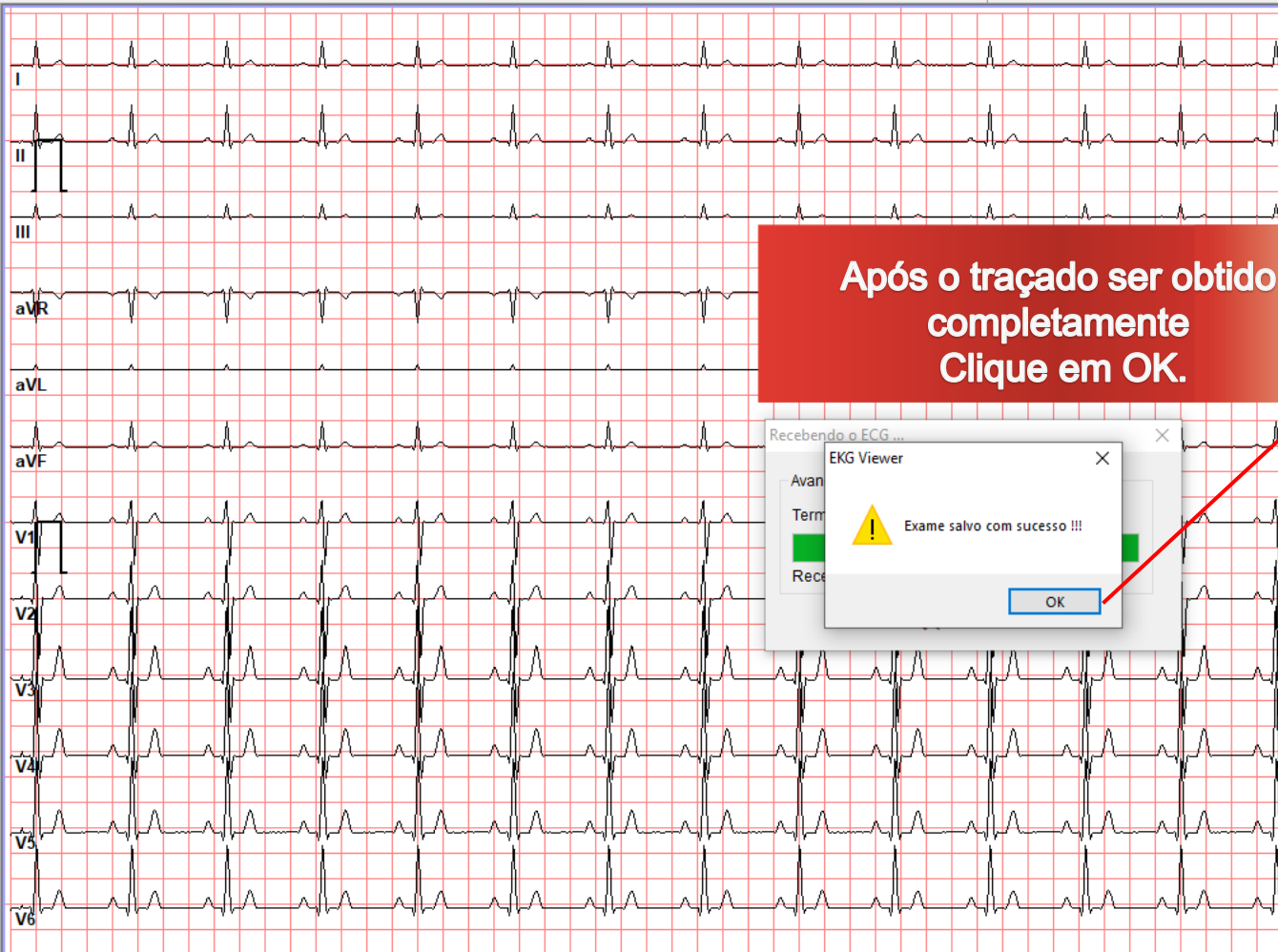

Após o traçado ser obtido completamente
Clique em OK.

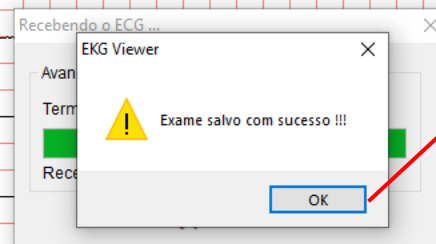


5º Passo

ID
 Nome
 Sobrenome
 Gênero
 Idade 0 Year
 Peso 0 Kg
 Altura 0 Cm
 Complemento

Médico
 Hospital
 Data/Hora 2021/04/19 10:58

[Editar Info](#)
[Salvar Info](#)

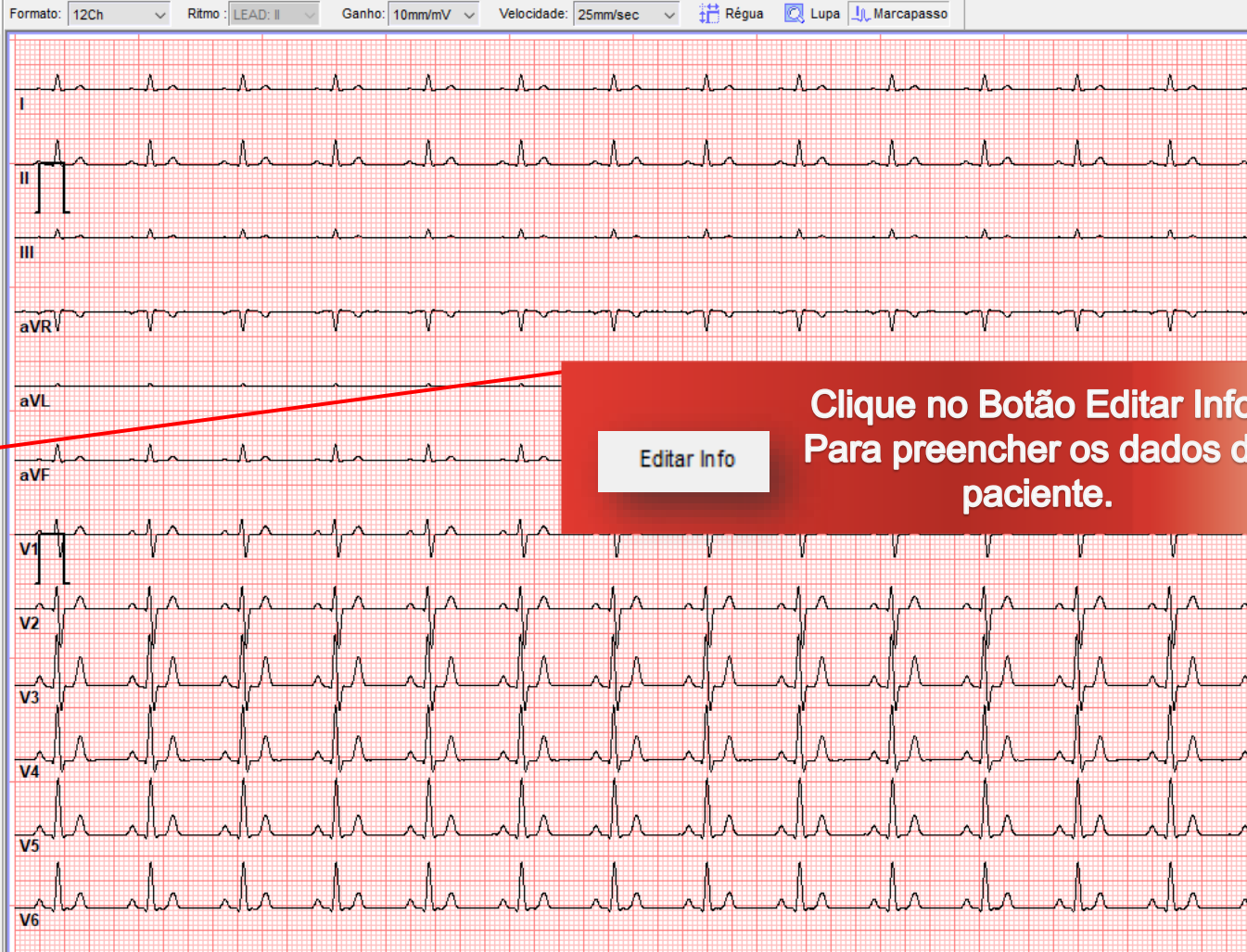

Editar Info


Clique no Botão Editar Info.
Para preencher os dados do
paciente.

6º Passo

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

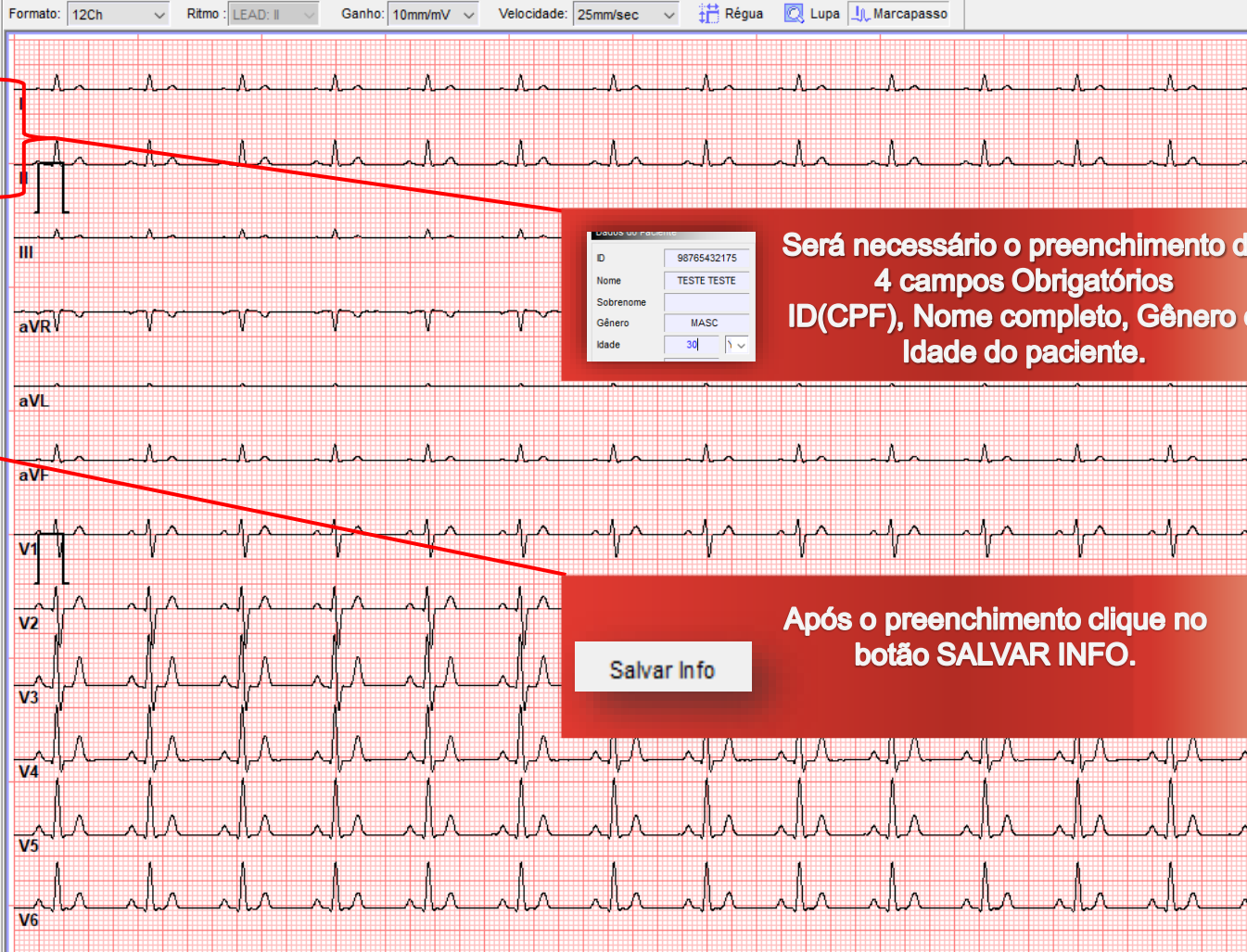

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30

Será necessário o preenchimento de 4 campos Obrigatórios ID(CPF), Nome completo, Gênero e Idade do paciente.

Após o preenchimento clique no botão SALVAR INFO.


Salvar Info

7º Passo


ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info


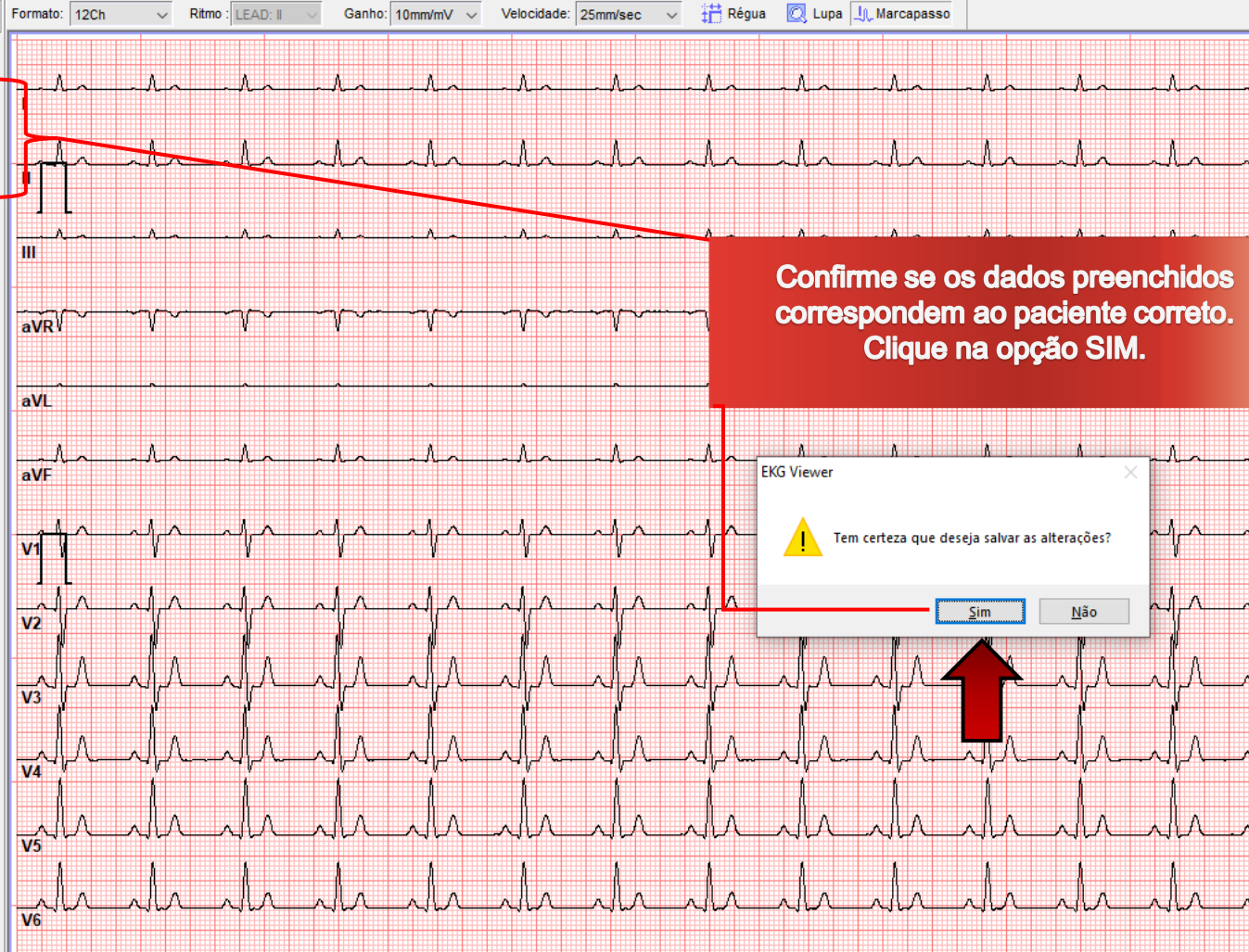


Confirme se os dados preenchidos correspondem ao paciente correto. Clique na opção SIM.

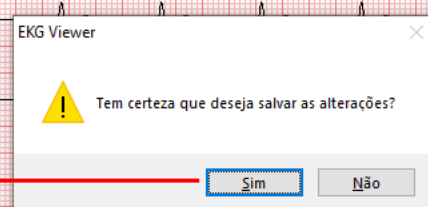

ID: 98765432175
 Nome: TESTE TESTE
 Sobrenome:
 Gênero: MASC
 Idade: 30 Year
 Peso: 0 Kg
 Altura: 0 Cm
 Complemento:

Médico:
 Hospital:
 Data/Hora: 2021/04/19 10:58
 Editar Info Salvar Info

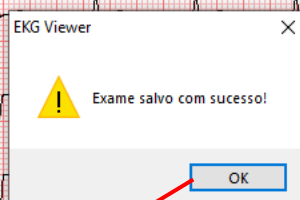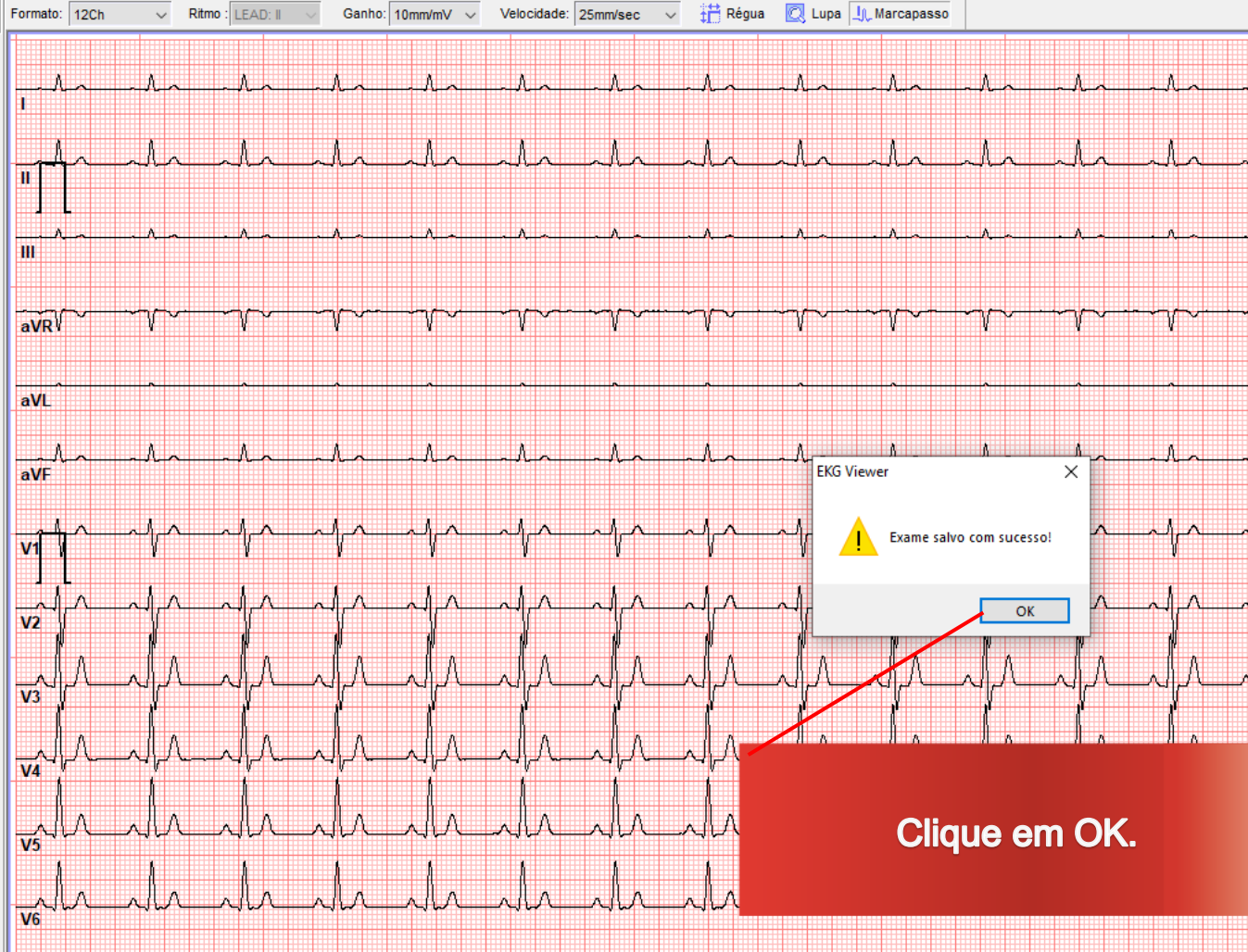

Clique em OK.

9º Passo


ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info



Exporte o arquivo em formato de imagem.
(JPEG)

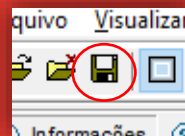

Clique no botão
SALVAR.


10º Passo

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

Formato: 12Ch Ritmo: LEAD: II Ganho: 10mm/mV Velocidade: 25mm/sec Régua Lupa Marcapasso

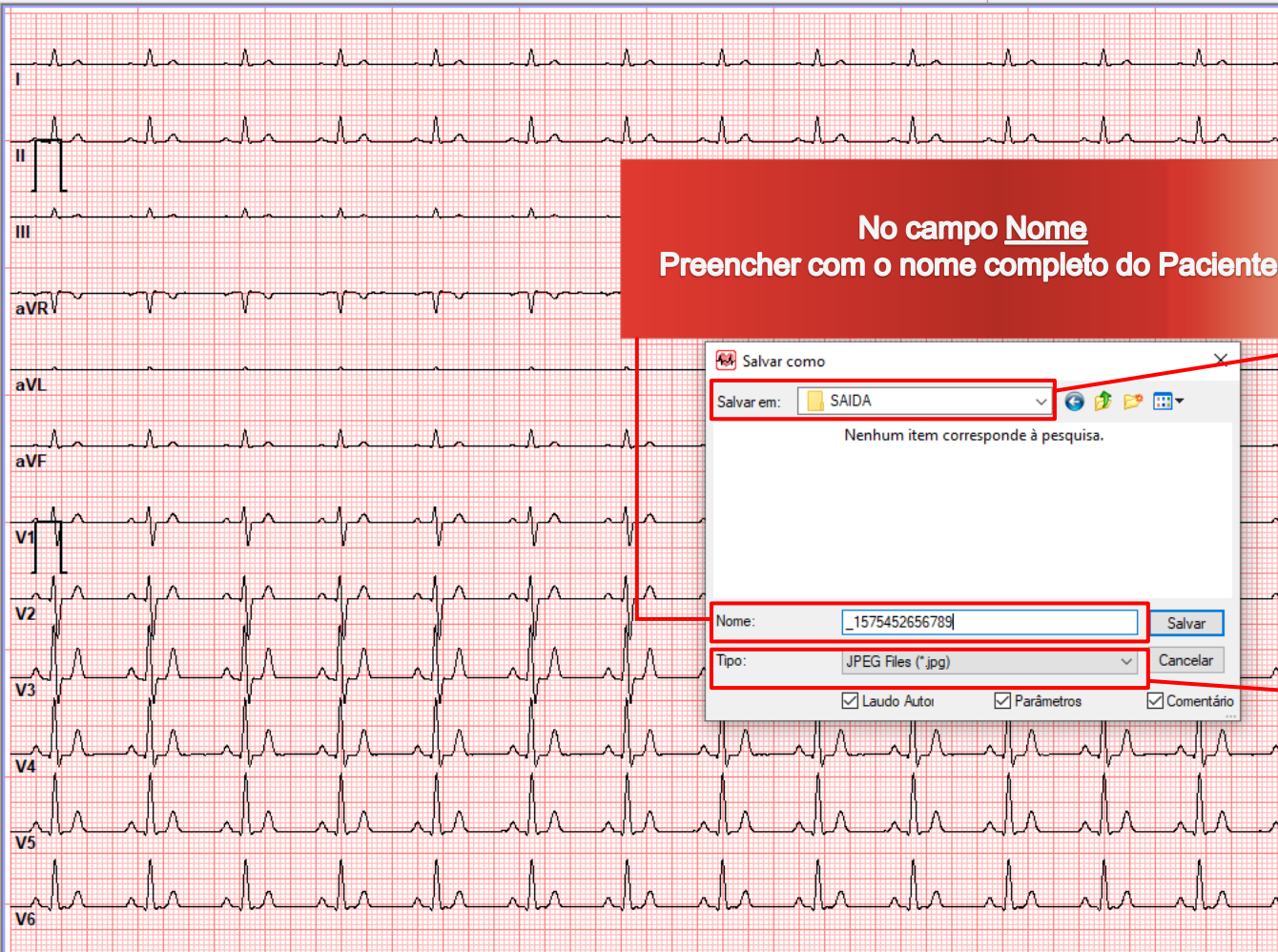

No campo Nome
Preencher com o nome completo do Paciente.

Salvar como

Salvar em: SAIDA

Nenhum item corresponde à pesquisa.

Nome: _1575452656789

Tipo: JPEG Files (*.jpg)

☒ Laudo Autoi ☒ Parâmetros ☒ Comentário

Salvar Cancelar

Call ECG
Atenção

Observe a pasta que o
arquivo esta sendo salvo.
Preferencialmente
salvar sempre no
mesmo local.
(Pasta SAÍDA na área de
trabalho)

Call ECG
Atenção

Não altere a
extensão do arquivo.
Manter em JPEG.

11º Passo


Dados do Paciente

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Diversos

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58


Editar Info Salvar Info

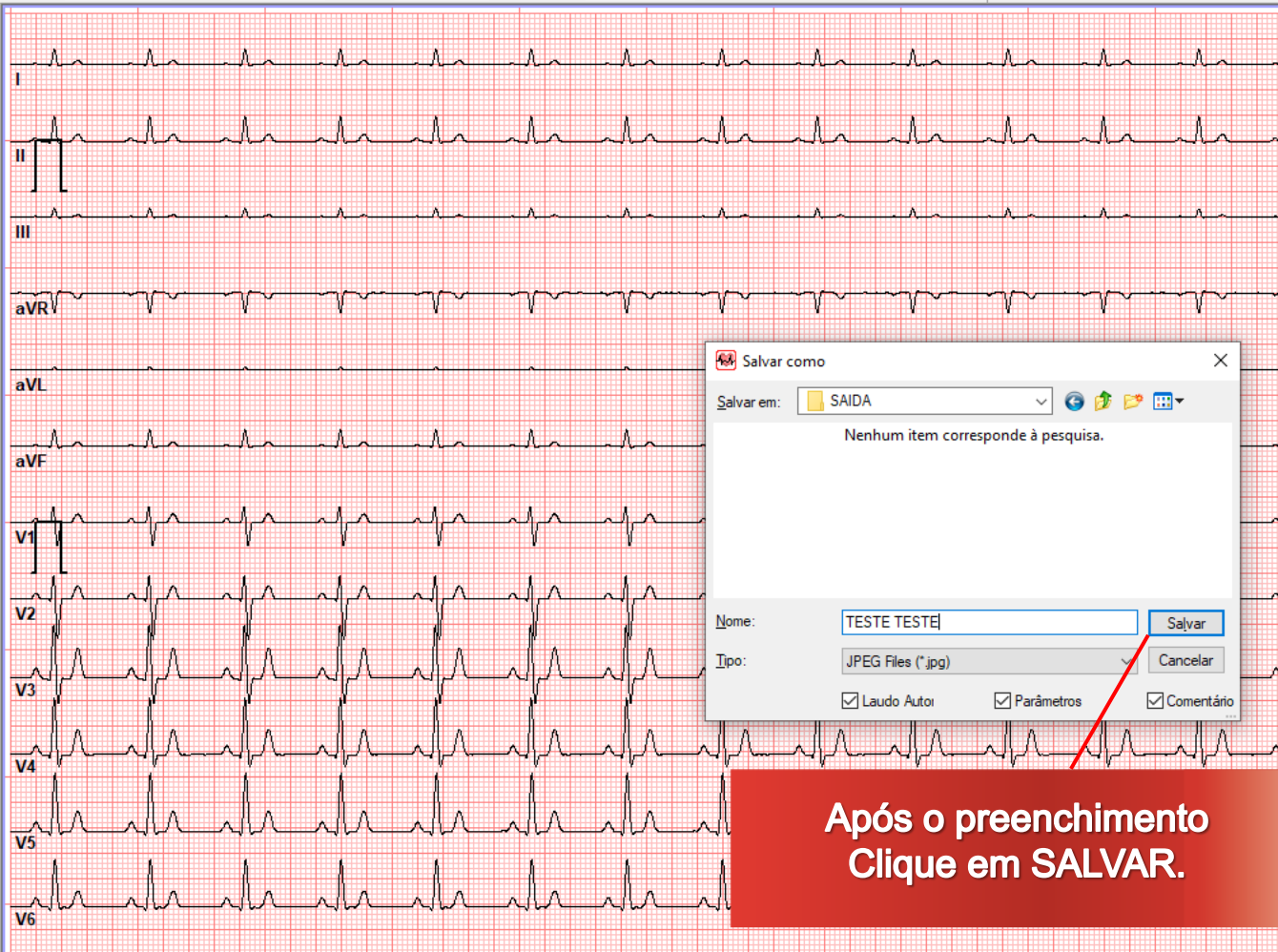

Após o preenchimento
Clique em SALVAR.

ID 98765432175
 Nome TESTE TESTE
 Sobrenome
 Gênero MASC
 Idade 30 Year
 Peso 0 Kg
 Altura 0 Cm
 Complemento

Médico
 Hospital
 Data/Hora 2021/04/19 10:58
 Editar Info Salvar Info

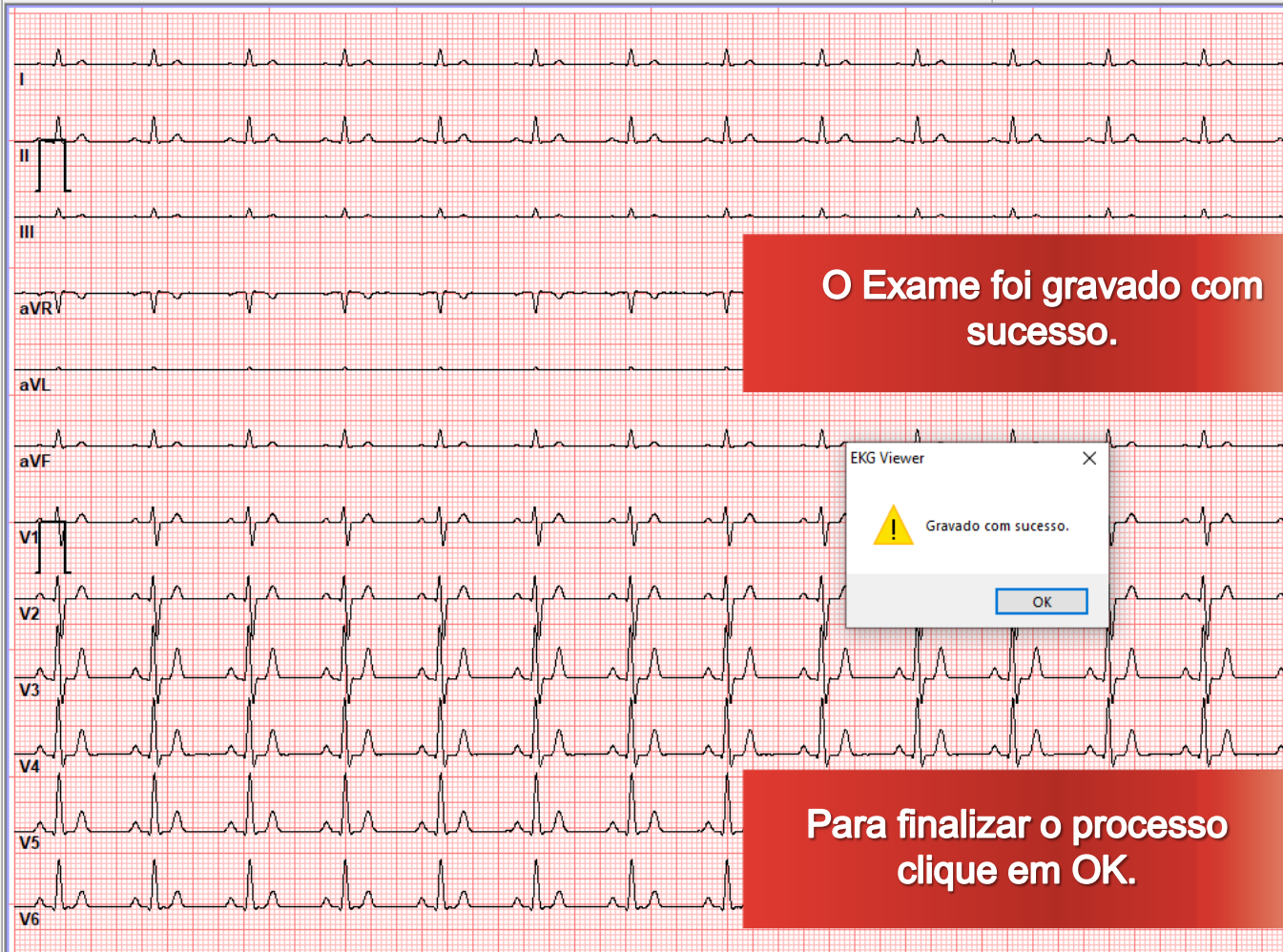

O Exame foi gravado com sucesso.

Para finalizar o processo clique em OK.


13º Passo

ID: 98765432175
 Nome: TESTE TESTE
 Sobrenome:
 Gênero: MASC
 Idade: 30 Year
 Peso: 0 Kg
 Altura: 0 Cm
 Complemento:

Médico:
 Hospital:
 Data/Hora: 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

Formato: 12Ch Ritmo: LEAD: II Ganho: 10mm/mV Velocidade: 25mm/sec

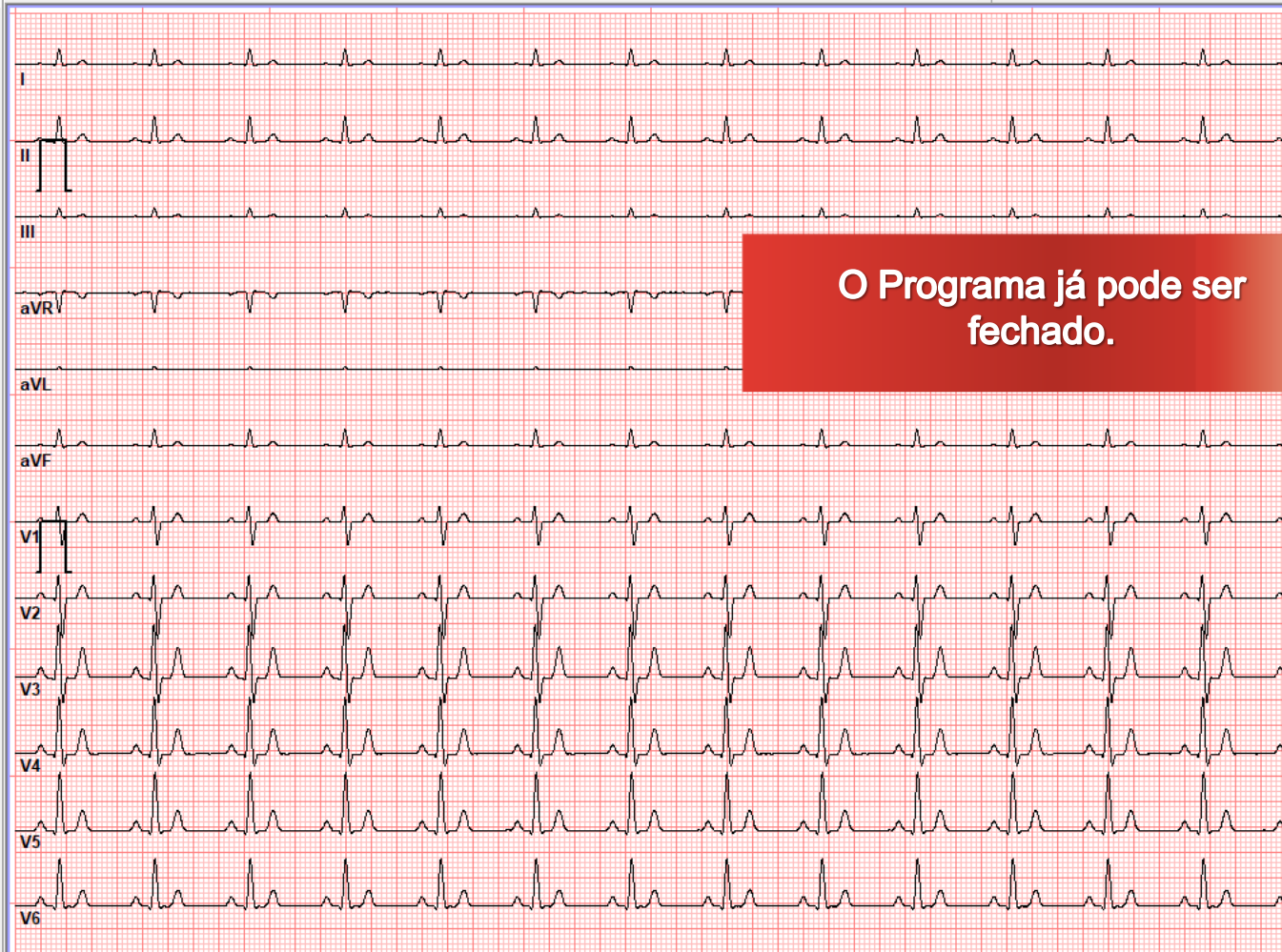

O Programa já pode ser fechado.

14º Passo


Passo a Passo



Seus exames estarão armazenados na pasta SAÍDA localizada na Área de trabalho.



15º Passo

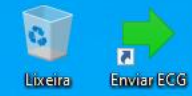



Call ECG
SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Bem-vindo à CALL ECG

Email

Senha

Acessar

Problemas no login?

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746
callecg@callecg.com.br
www.callecg.com.br

homologado para [Chrome](#)

 **GODADDY®**
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA

 **SAFE BROWSING**
Google

**Acesse o Sistema
Web
e realize o envio do
Eletrocardiograma.**

16º Passo



CENTRAL 24 Horas

Fone: (42) 4009-9999 / Suporte  (42) 9 9821-0021

** (42) 9 8838-0746
www.callecg.com.br**

E-mail

**callecg@callecg.com.br
qualidade@callecg.com.br
suporte@callecg.com.br**

**R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,
Ponta Grossa - PR, 84040-130**