



Procedimento para realizar eletrocardiograma com integração automática




ECG PC
TEB




Relembre o posicionamento

Colocação dos Eletrodos

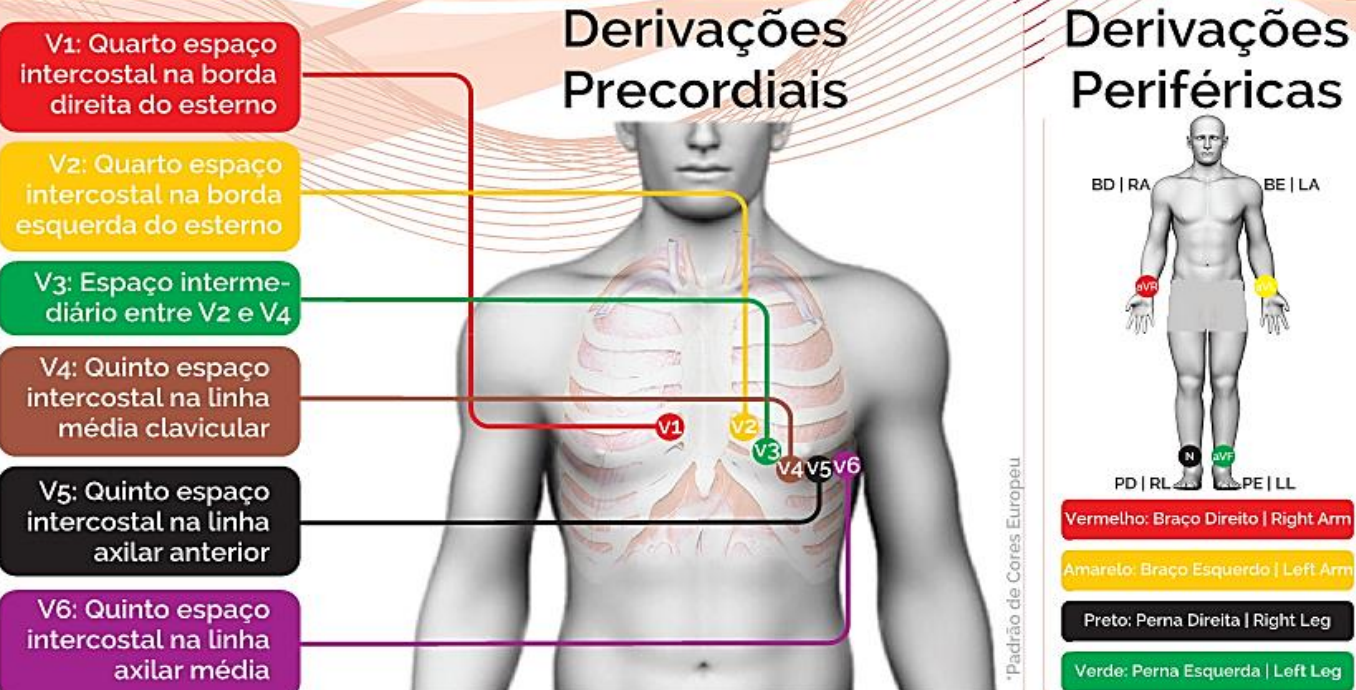

Call ECG

Execute o Programa ECGPC TEB e Siga o Passo a Passo.

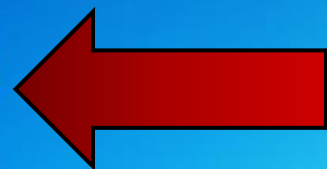

Computador



Rede



Enviar ECG



chrome - Atalho



ecgpc



SAIDA - Atalho



Lixeira




Após abrir o programa ECGPC – TEB

Clique no botão


✓ INICIAR

ECG PC

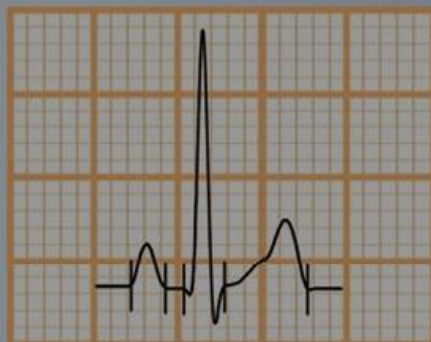

Medidas Automáticas de Intervalos e qualidade
digital certificadas pela norma ABNT-NBR-IEC
60601-2-51

✓ INICIAR

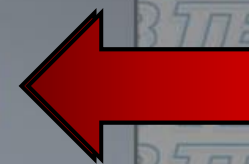

 PACIENTES

Nome do Paciente	Sobrenome	RG	CPF
------------------	-----------	----	-----

 EXAMES

Selecionar Indicação: Dr(a).

de: a: OK

Número	Data	Hora	Paciente	Origem	Situação
--------	------	------	----------	--------	----------



Para cadastrar o PACIENTE
Clique no Botão

 **NOVO PACIENTE**



 **NOVO PACIENTE**

 **NOVO EXAME**

 **EVOLUÇÃO**

 **EXCLUIR**

 **ABRIR EXAME**

 **EVOLUÇÃO**

 **IMPRIMIR**

 **EXCLUIR**

 **CONFIGURAR**

 PACIENTES

Nome do Paciente

TESTE DE INSTALACAO

TESTE DOIS DE INSTALACAO

TESTE DE ATUALIZADOR

TESTE 191913310 CABO

TESTE 122433408 CABO

teste teste

TESTE DE TRATAMENTO

TESTE DE TRATAMENTO DOIS

TESTE DE INSTA DOIS

TESTE SEM MEDIDAS SIMU

TESTE COM MEDIDAS SIMULADOR

teste teste

 DADOS DO PACIENTE

DADOS PESSOAIS

Nome Completo

TESTE DE TREINAMENTO

Data de Nascimento

10/10/1989

Sexo

Masculino

Estado Civil

IDENTIFICAÇÃO

CPF

987654321123

RG

CÓDIGO

CENTRAL605CDA44

CLIENTE

ENDEREÇO

Endereço

Complemento

CEP

Bairro

Cidade

Estado

Telefone Pessoal

Telefone Comercial

e-Mail

 **NOVO PACIENTE**

✓ OK

 **NOVO EXAME**

X CANCELAR



Preencha os 4 Campos
Obrigatórios

destacados em Vermelho, e
posteriormente clique em

 **NOVO EXAME**

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

DADOS MONITORAÇÃO REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

EXAME

Número

0000000001

Operador

Indicação

UNIDADETESTE

PACIENTE

Nome



Clique na Flecha Completando
o Campo INDICAÇÃO com o nome da
unidade que já esta registrado no programa.

MARCAPASSO

Tipos (se não houver deixar em branco)

DADOS

Nível de Risco:

concepcional,
diabetes,
dislipidemia,
estresse,
hipertensão,
história familiar,

MEDICAMENTOS EM USO

AAS

+ NOVO

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

DADOS **MONITORAÇÃO** REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

EXAME

Número

0000000001

Operador

Indicação

UNIDADETESTE

PACIENTE

Nome

T

Ida

MARCAPASSO

Tipo (se não houver, deixe em branco)



Clique na aba MONITORAÇÃO
para acompanhar o processo
de captura do traçado.

DADOS

Fatores de Risco:
anticoncepcional,
diabetes,
dislipidemia,
estresse,
hipertensão,
história familiar,

MEDICAMENTOS EM USO

AAS

+ NOVO

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

SEPARADAS

SIMULTÂNEAS

NOVO

DADOS MONITORAÇÃO REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

FC (bpm)

80

TRAÇADO

VELOCIDADE

25

GANHO Cal

FILTROS

- ☒ Tremor Muscu
- ☒ Rede Elétrica
- ☐ Passa Altas

EXIBIÇÃO

Fundo Branco

Milimet. Laranja

Traços Azuis

DERIVAÇÕES

GRAVAR

REGISTRAR




Atenção

Aguarde no mínimo 30 segundos para realizar a captura do traçado ou até estabilizar o mesmo.



Clique no botão REGISTRAR
Para obter o registro do Exame.

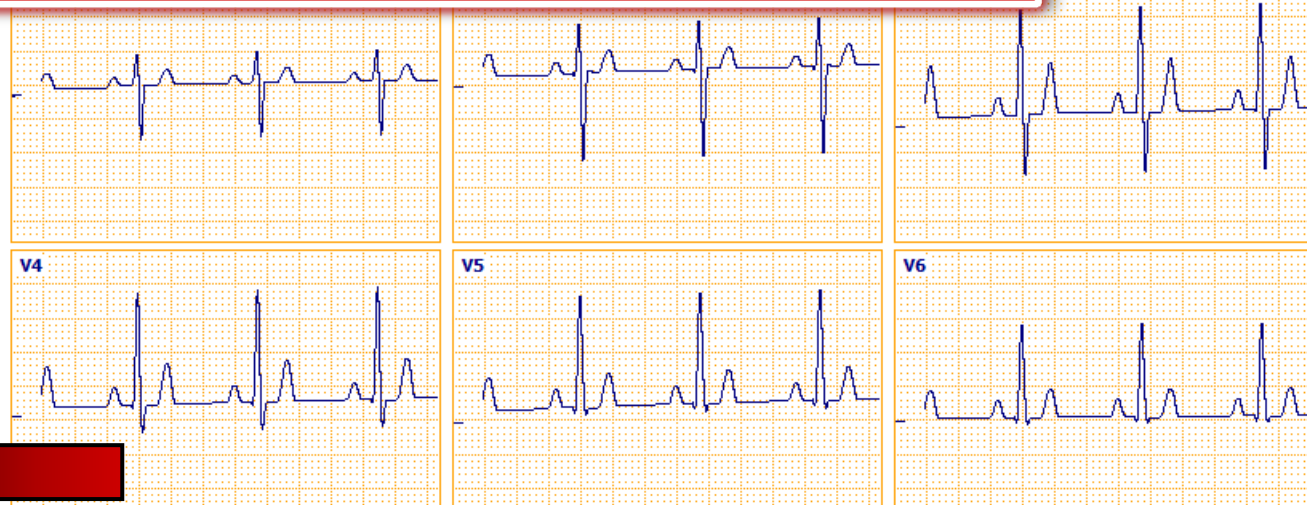

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

SEPARADAS

SIMULTÂNEAS

NOVO

DADOS MONITORAÇÃO **REGISTROS** GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

REGISTRO 1 de 1

Eletrocardiograma

RENOMEAR

TRAÇADO

VELOCIDADE

GANHO

EXIBIÇÃO

Fundo Bra

Milimet. Lar

Traços Azu

☒ I ☒ II

☒ aVR ☒ aVL

☒ V1 ☒ V2


☒ V4 ☒ V5

IMPRIMIR


IMAGEM

CARTÃO

EXCLUIR

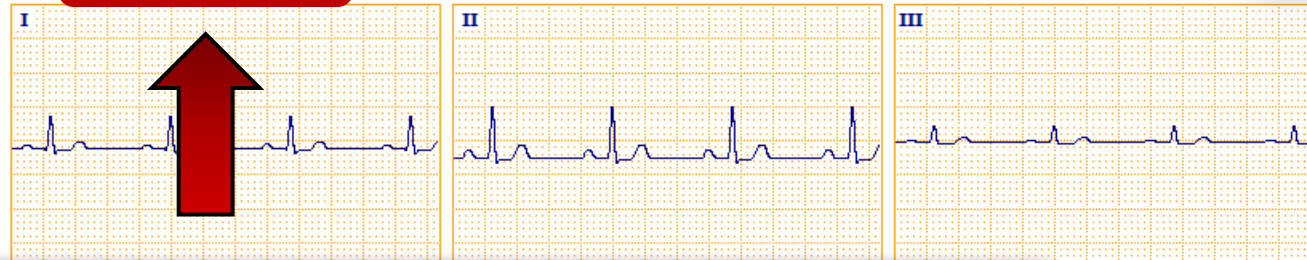

ATENÇÃO
Você será redirecionado automaticamente para a aba REGISTROS.
O Eletrocardiograma já está registrado.
(Solicitamos que seja realizado no mínimo 02 registros)

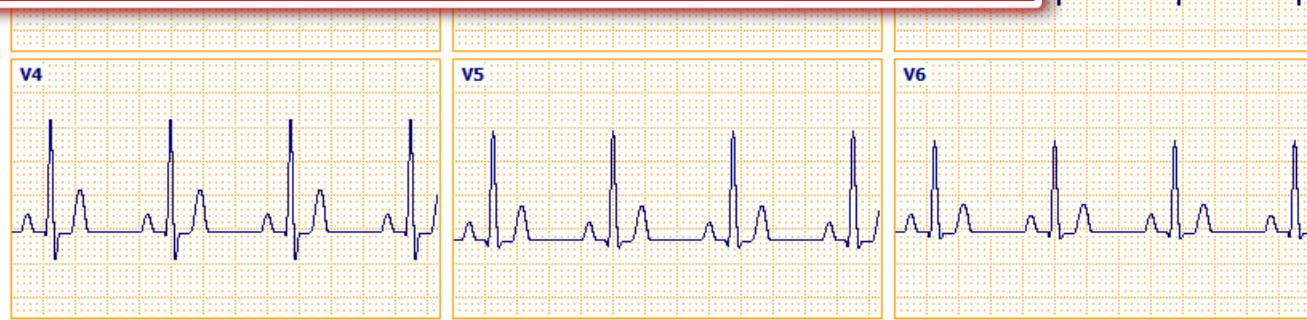

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

SEPARADAS

SIMULTÂNEAS

NOVO

DADOS **MONITORAÇÃO** REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

REGISTRO 1 de 1

Eletrocardiograma

RENOMEAR

TRAÇADO

VELOCIDADE 25

GANHO N

EXIBIÇÃO

Fundo Branco

Milimet. Laranja

Traços Azuis

☒ I ☒ II ☒ III

☒ aVR ☒ aVL ☒ aVF

☒ V1 ☒ V2 ☒ V3


☒ V4 ☒ V5 ☒ V6

IMPRIMIR



IMAGEM

CARTÃO

EXCLUIR

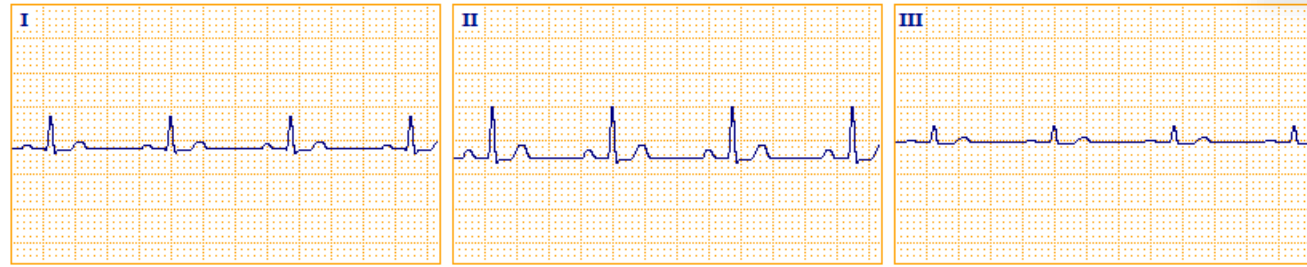

Retorne na aba de MONITORAÇÃO
para realizar a segunda captura
do exame.

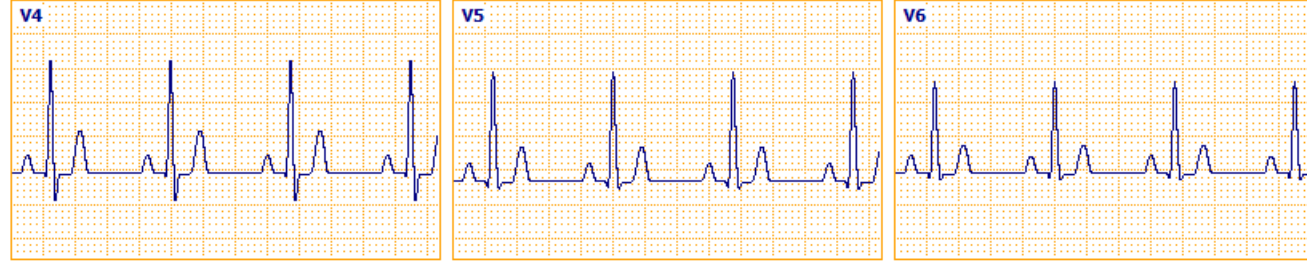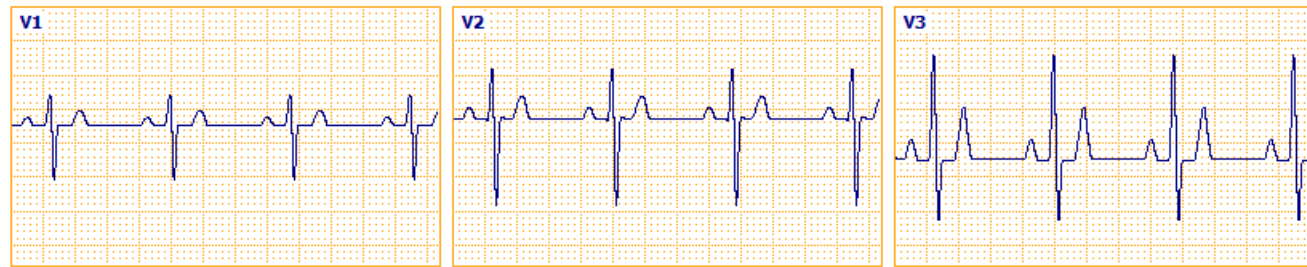

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

SEPARADAS

SIMULTÂNEAS

DADOS MONITORAÇÃO REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

FC (bpm)

80

II

TRAÇADO

VELOCIDADE 2

GANHO Cal

FILTROS

☒ Tremor Muscu

☒ Rede Elétrica

☐ Passa Altas

EXIBIÇÃO

Fundo Branco

Milimet. Laranja

Traços Azuis


DERIVAÇÕES

GRAVAR

REGISTRAR



Aguarde no mínimo 30 segundos para
realizar outra captura do traçado
ou até o mesmo estabilizar.

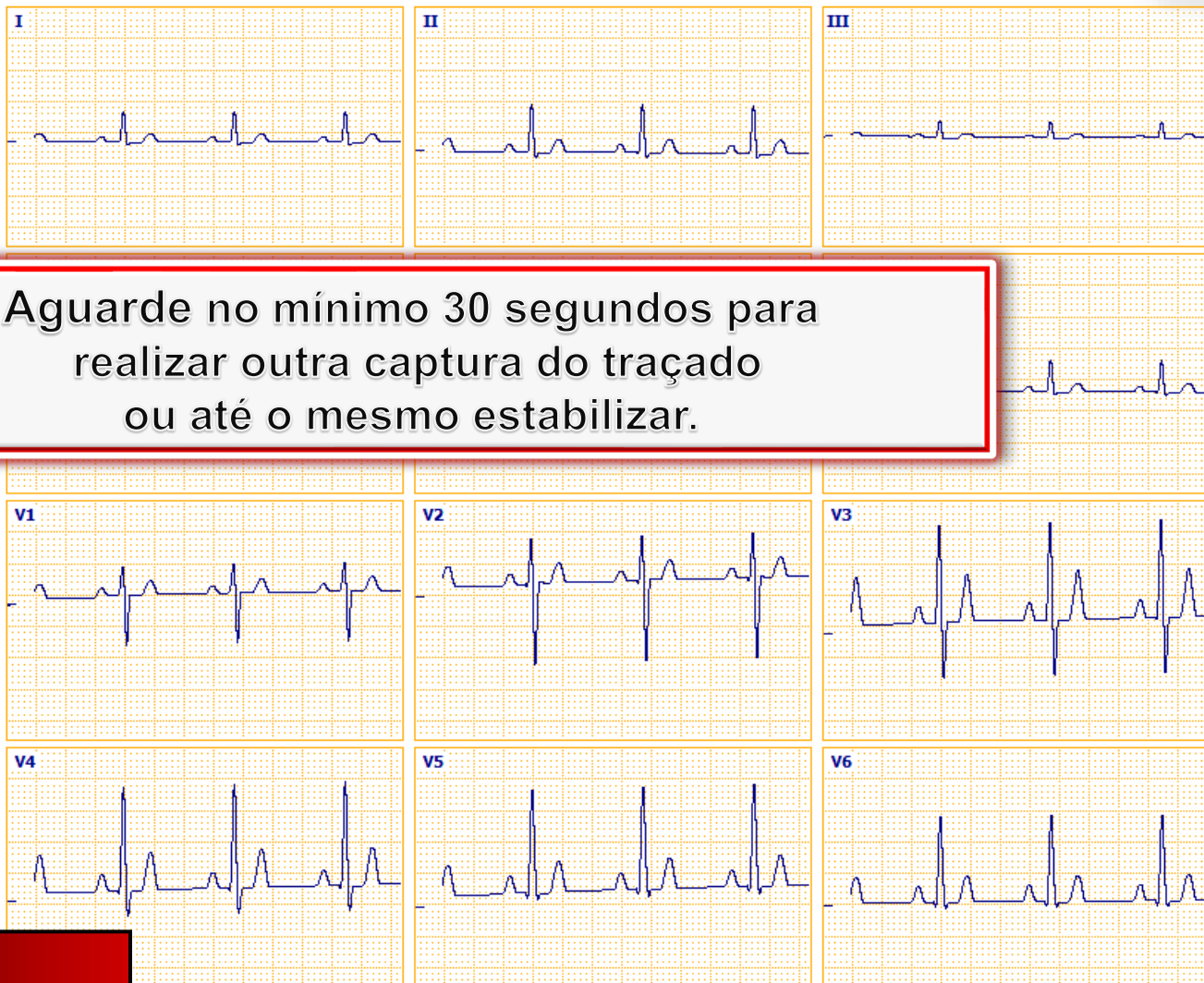

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

SEPARADAS

SIMULTÂNEAS

NOVO

DADOS MONITORAÇÃO REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

REGISTRO 2 de 2

ECG 2

RENOMEAR

TRAÇADO

VELOCIDADE 25

GANHO N

EXIBIÇÃO

Fundo Branco

Milimet. Laranja

Traços Azuis

☒ I ☒ II ☒ III

☒ aVR ☒ aVL ☒ aVF

☒ V1 ☒ V2 ☒ V3


☒ V4 ☒ V5 ☒ V6

IMPRIMIR

IMAGEM

CARTÃO

EXCLUIR

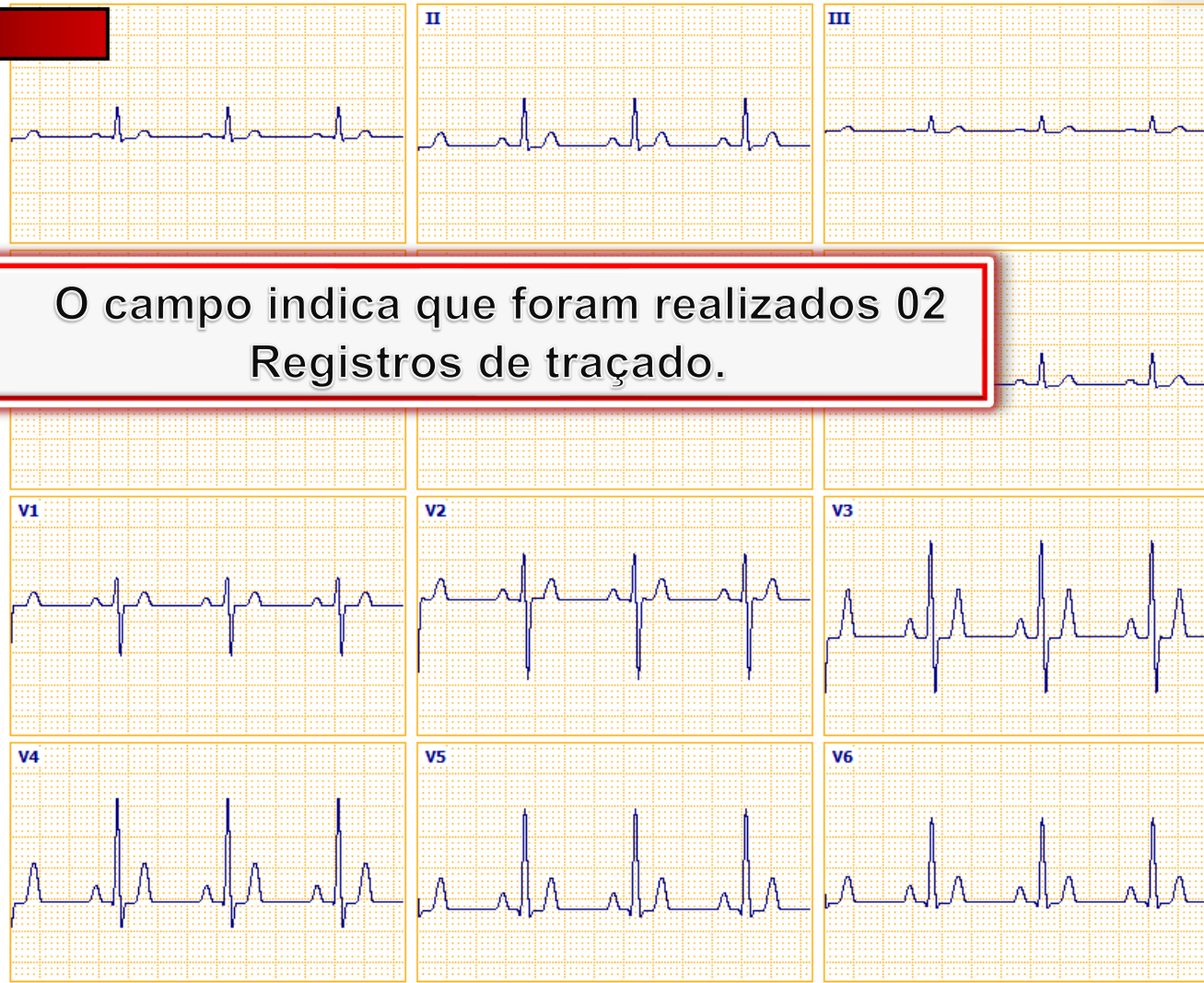

O campo indica que foram realizados 02 Registros de traçado.

PACIENTES

Nome do Paciente
TESTE DE TREINAMENTO

SEPARADAS

SIMULTÂNEAS

NOVO

DADOS MONITORAÇÃO REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO **ENCERRAR**

REGISTRO 2 de 2

ECG 2

RENOMEAR

TRAÇADO

VELOCIDADE 25

GANHO N

EXIBIÇÃO

Fundo Branco

Milimet. Laranja

Traços Azuis

☒ I ☒ II ☒ III

☒ aVR ☒ aVL ☒ aVF

☒ V1 ☒ V2 ☒ V3


☒ V4 ☒ V5 ☒ V6

IMPRIMIR


IMAGEM

CARTÃO

EXCLUIR

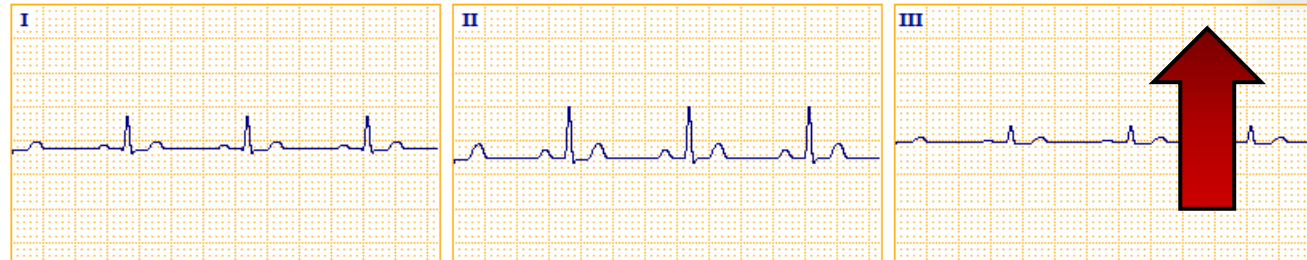

Clique na aba ENCERRAR
Para fechar a área de registro.

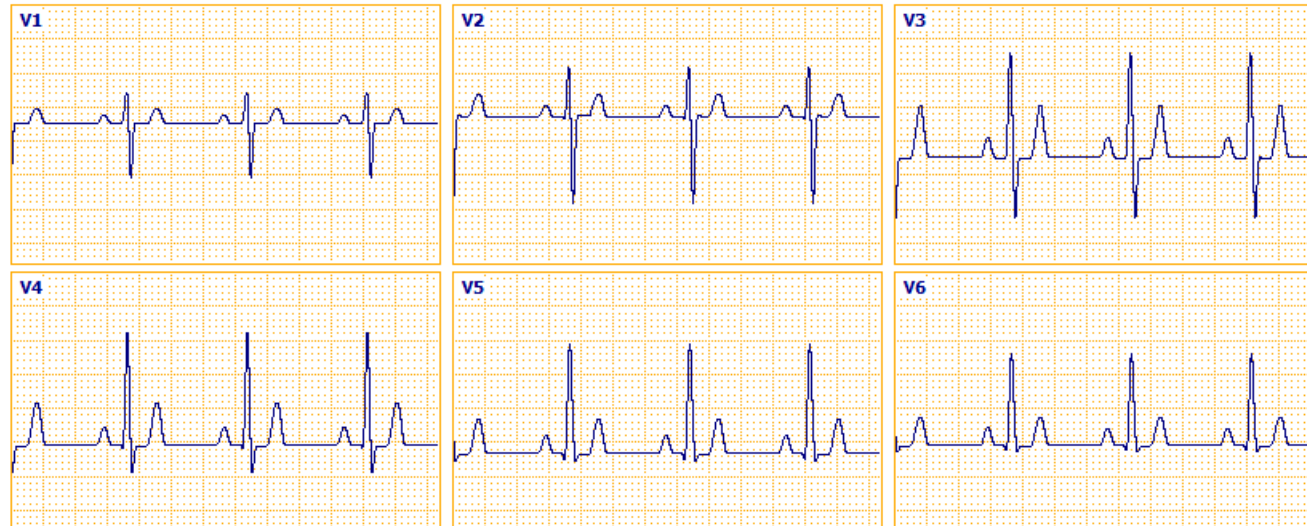

PACIENTES

Nome do Paciente

TESTE DE TREINAMENTO

DADOS MONITORAÇÃO REGISTROS GRAVAÇÃO MEDIDAS LAUDO ENCERRAR

IDENTIFICAÇÃO

Número do Exame

0000000001

Paciente

TESTE DE TREINAMENTO

Responsável

Dr(a).

200710154021LOCAL001 - ECGPC: 191922510 - V2.02

CONTEÚDO

Gravação:

Registros:

Medidas:

Laudo:

Tipo escolhido: Nenhum

Exame:

Sem Laudo

(para concluir este exame, assine o Laudo)



Imprimir o Exame

Opções adicionais de impressão
nas abas correspondentes



Clique no botão **ENCERRAR**
para finalizar o processo
de realização e **AGUARDE** até que o
programa se feche automaticamente.



ENCERRAR



DESCARTAR EXAME

+ NOVO



Clique no botão FECHAR
para finalizar o programa
ECGPC.



Medidas Automáticas de Intervalos e qualidade
digital certificadas pela norma ABNT-NBR-IEC
60601-2-51

✓ INICIAR




Computador



Rede



Enviar ECG

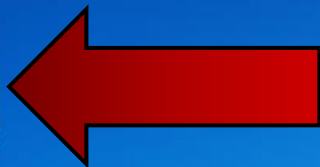

chrome - Atalho



ecgpc



SAIDA - Atalho



Lixeira



Clique 02 vezes no botão ENVIAR
para que o exame seja submetido ao
Sistema.



Enviar ECG

```
Envia ECG
C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apache\htdocs>aws s3 sync s3://calleg
-integradores/integrador_online/ C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apac
e\htdocs
C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apache\htdocs>C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFI
G\Servidor_Apache\php\php.exe C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apac
e\htdocs\integrador_xml_funcoes.php
11
```

ATENÇÃO

Ao executar o botão ENVIAR aguarde alguns segundos, pois abrirá e fechará automaticamente a janela de comando.





Bem-vindo à CALLECG

Email

Senha

Acessar

[Problemas no login?](#)

Powered by 
Finer Soluções Web
homologado para [Chrome](#)

 **GODADDY®**
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA

 **SAFE BROWSING**
Google

Acesse o Sistema Web e realize o termino do preenchimento do cadastro do paciente.





CENTRAL 24 Horas

Fone: (42) 4009-9999/ (42) 9 8816-2364



(42) 9 8838-0746

www.callecg.com.br

E-mail

**callecg@callecg.com.br
qualidade@callecg.com.br
suporte@callecg.com.br**

**R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,
Ponta Grossa - PR, 84040-130**