


TUTORIAL DO SISTEMA DA CALL ECG COM REVISAR

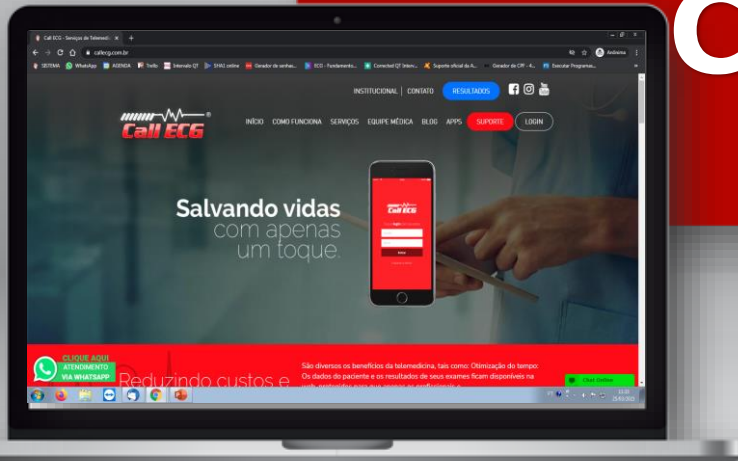

- Abra o navegador de internet Google Chrome.
- Acesse o site da Call ECG em: <https://www.callecg.com.br/>
- Clique em **Login**, conforme imagem abaixo.

The image is a screenshot of the Call ECG website. The header features the Call ECG logo on the left and navigation links (INSTITUCIONAL, CONTATO, RESULTADOS) and social media icons (Facebook, Instagram, YouTube) on the right. Below the header, there is a main navigation bar with links: INÍCIO, COMO FUNCIONA, SERVIÇOS, EQUIPE MÉDICA, BLOG, APPS, SUPORTE, and a red LOGIN button. A green arrow points to the LOGIN button. The main content area has a large headline "Salvando vidas com apenas um toque." and a smartphone displaying the Call ECG app login screen. The footer is red and contains a WhatsApp button on the left, a text block about telemedicine benefits in the center, and a Zendesk chat widget on the right.

Call ECG

INSTITUCIONAL | CONTATO RESULTADOS

INÍCIO COMO FUNCIONA SERVIÇOS EQUIPE MÉDICA BLOG APPS SUPORTE LOGIN

Salvando vidas
com apenas
um toque.

Faça o login com sua conta

Senha

Entrar

Esqueceu a senha?

CLIQUE AQUI
ATENDIMENTO
VIA WHATSAPP

Reduzindo custos
e salvando vidas

São diversos os benefícios da telemedicina, tais como: Otimização do tempo:
Os dados do paciente e os resultados de seus exames ficam disponíveis na
web, protegidos para que apenas os profissionais e...

Conheça mais

zendesk chat

Precisa de
Ajuda?
Atendimento
Online

Escreva sua mensagem

- Você será direcionado(a) para esta página.



Call ECG
SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Bem-vindo à CALL ECG

[Acessar](#)

Problemas no login?

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746
callecg@callecg.com.br
www.callecg.com.br

homologado para [Chrome](#)



GODADDY®
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA



SAFE BROWSING
Google




CLIQUE AQUI
ATENDIMENTO
VIA WHATSAPP



Printscreen - Tema



- Preencha os campos E-mail e Senha com as suas credenciais, e clique em **Acessar**.

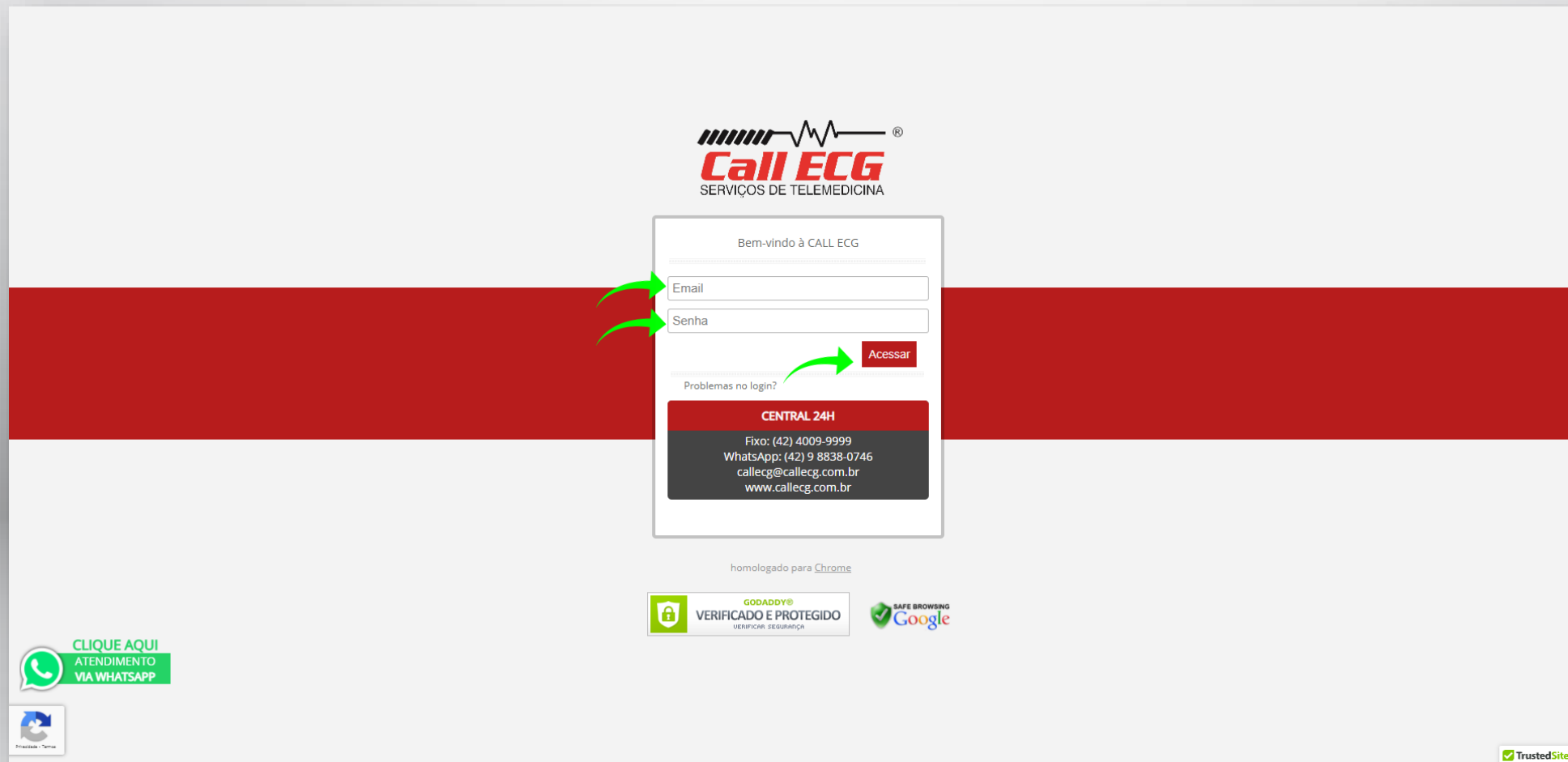

CALL ECG
SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Bem-vindo à CALL ECG

Email

Senha

[Acessar](#)

Problemas no login?

CENTRAL 24H
Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746
callecg@callecg.com.br
www.callecg.com.br

homologado para [Chrome](#)

 **GODADDY®**
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA

 **SAFE BROWSING**
Google

 **CLIQUE AQUI**
ATENDIMENTO
VIA WHATSAPP

 **Printar**

 **TrustedSite**

- Nesta tela, é exibida todas as operações do sistema.



Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Código da Unidade: 000-1



0



0



v.3.06.00

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

Laudando

Emergência

Revisar

Retificação

Unidade:

Todos

Filtrar

Exames

Período: 31/07/2021 a 30/08/2021

Total de laudos Contratados: 40

Laudos emitidos: 1

Aguardando 0

Recusados 0

Finalizado

50

 por página

Pesquisar

Buscar

Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
Nenhum registro encontrado							

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior

Próximo

O Menu exames é subdividido em três abas, sendo elas:

- 1. **Aguardando** – para exames que foram enviados para central e estão aguardando laudo;
- 2. **Recusados** – para exames que necessitam atenção da unidade e em alguns casos necessitam serem repetidos;
- 3. **Finalizados** – para exames já laudados pelo médico cardiologista ou cancelados pela unidade através da aba recusados;

Call ECG

Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Código da Unidade: 000-1

CENTRAL 24H
Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746
callecg@callecg.com.br
www.callecg.com.br
R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame ■ Laudando ■ Emergência ■ Revisar ■ Retificação Unidade: Todos Filtrar

Exames
Período: 31/07/2021 a 30/08/2021 Total de laudos Contratados: 40 Laudos emitidos: 1

1 Aguardando 0 2 Recusados 0 3 Finalizado

50 por página

Pesquisar Buscar Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
Nenhum registro encontrado							

Mostrando 0 até 0 de 0 registros Anterior Próximo

As legendas são divididas em 04 cores:

- 1. Verde (laudando)
- 2. Vermelho (emergência)
- 3. Amarelo (revisar)
- 4. Roxo (retificação)



Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Código da Unidade: 000-1



0



v.3.06.00

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR. 84040-130

Adicionar Exame

1

Laudando

2

Emergência

3

Revisar

4

Retificação

Unidade:

Todos Filtrar

Exames

Período: 31/07/2021 a 30/08/2021

Total de laudos: Contratados: 40

Laudos emitidos: 1

Aguardando 0

Recusados 0

Finalizado

50

 por página

Pesquisar

Buscar Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
Nenhum registro encontrado							

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior Próximo

As legendas são divididas em 04 cores:

- Ao posicionar o mouse sobre cada cor das legendas, o sistema apresentará uma mensagem com seu significado.

The screenshot shows the Call ECG web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Gerenciar, Manutenção (0), Operação, and Exames (highlighted in orange). The top header includes the Call ECG logo, a user profile icon, and text: "Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste", "Quinta-feira, 26 de agosto de 2021", and "Código da Unidade: 000-1". On the right of the header are icons for chat, notifications, and a power button, along with the version "v.3.06.00".

The main content area has a red banner for "CENTRAL 24H" with contact information: "Fixo: (42) 4009-9999", "WhatsApp: (42) 9 8838-0746", "callegc@callegc.com.br", "www.callegc.com.br", and "R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130".

Below the banner are filters: "Adicionar Exame", "Laudando 1" (green), "Emergência 2" (red), "Revisar 3" (yellow), and "Retificação 4" (purple). A search bar shows "Unidade: * 000-1 - Call ECG - Unidade de Teste" with "Todos" and "Filtrar" buttons. It also displays "Exames", "Período: 31/07/2021 a 30/08/2021", "Total de laudos Contratados: 40", and "Laudos emitidos: 1".

There are status filters: "Aguardando 0", "Recusados 0", and "Finalizado". A dropdown shows "50 por página". Below are columns for "Código" and "Nº do Atendimento". The table shows "Mostrando 0 até 0 de 0 registros" and "Nenhum registro encontrado". Navigation links "Anterior" and "Próximo" are at the bottom right.

A green arrow points from the "Laudando 1" legend to a magnifying glass. The magnifying glass focuses on a tooltip that reads: "O Exame que apresenta esta cor está com seu laudo em andamento."

- Ao enviar o exame pelo equipamento ou integrador, ele ficará no sistema em amarelo, com status **REVISAR**, pois seu cadastro precisa ser concluído para envio à central.





Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Código da Unidade: 000-1



0



v.3.07.00

Gerenciar

Manutenção (0)

Operação

Exames

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

Laudando

Emergência

Revisar

Retificação

Unidade:

Todos

Filtrar

Exames

Período: 31/12/2021 a 30/01/2022

Laudos emitidos: 3

Aguardando 1

Recusados 3

Finalizado

50

 por página

Pesquisar

Buscar

Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
1064850		TESTE TESTE	REVISAR	Call ECG - Unidade de Teste	Integrador	03/01/2022 16:22	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior

1

Próximo



- Clique no botão **Editar**.

The screenshot shows the Call ECG web application interface. The top header includes the logo, user information, and version number. The left sidebar contains navigation links. The main content area displays a table of exams with a magnifying glass highlighting the 'Editar' button in the action column of the first row.

Call ECG

Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022
Código da Unidade: 000-1

v.3.07.00

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

■ Laudando ■ Emergência ■ Revisar ■ Retificação

Unidade: * 000-1 - Call ECG - Unidade de Teste

Todos Filtrar

Exames
Período: 31/12/2021 a 30/01/2022

Aguardando 1 Recusados 3 Finalizado

50 por página

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Ações
1064850	TESTE TESTE	REVISAR	Call ECG - Unidade de Teste	Inte	03/01/2022 16:22		

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

esquisar

Buscar Opções

Opções

- Os dados como o nome completo do paciente, CPF, data de nascimento e sexo já estarão preenchidos, conforme cadastrado anteriormente.



Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Código da Unidade: 000-1



v.3.07.00

Gerenciar

Manutenção (0)

Operação

Exames

Paciente

Nome *

TESTE TESTE

CPF *

000.000.000-00

Data de Nascimento *

03/12/1992

Sexo *

Feminino

Tipo de Telefone *

Selecione...

Número do Telefone *

Opção

-

+

Usa Marcapasso *

Selecione...

Endereço

Arquivos

Unidade *

000-1 - Call ECG - Unidade de Teste

Prioridade *

Eletivo

Número de Atendimento

Assintomático

Pré Operatório

Dor

Dispneia

Náuseas / Vômitos

Palpitação

☐ Has

☐ Tabagismo

☐ Doença De Chagas

☐ Angioplastia Prévia

☐ Diabetes

☐ Obesidade

☐ Infarto Prévio

☐ Cirurgia Cardíaca Prévia

Informações adicionais (Outros sintomas, dados de exame físico, medicamentos, entre outras)

Limpar Campos

Arquivo Tipo	Arquivo Nome	Data Adicionado	Opções
--------------	--------------	-----------------	--------

- É de extrema importância o preenchimento dos dados faltantes de forma correta.

Call ECG Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022
Código da Unidade: 000-1

Gerenciar
Manutenção (0)
Operação
Exames

Paciente

Nome *
TESTE TESTE

CPF *
000.000.000-00

Data de Nascimento *
03/12/1992

Sexo *
Feminino

Tipo de Telefone *
Selecione...

Número do Telefone *
Opção
-
+

Usa Marcapasso *
Selecione...

Endereço

Arquivos

Unidade *
000-1 - Call ECG - Unidade de Teste

Prioridade *
Eletivo

Número de Atendimento

Assintomático Pré Operatório
Dor
Dispneia Náuseas / Vômitos Palpitação

Has
Tabagismo
Doença De Chagas
Angioplastia Prévia

Diabetes
Obesidade
Infarto Prévio
Cirurgia Cardíaca Prévia

Informações adicionais (Outros sintomas, dados de exame físico, medicamentos, entre outras)

Limpar Campos

Arquivo Tipo	Arquivo Nome	Data Adicionado	Opções
--------------	--------------	-----------------	--------

- Por fim, clique em **Salvar** para encaminhar à central.

Gerenciar

Manutenção (0)

Operação

Exames

Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022
Código da Unidade: 000-1

v.3.07.00

Tipo de Telefone...
Selecione...

Número do Telefone...

Opção...
-
+

Cód. Marcapasso...
Selecione...

Endereço

Arquivos

Unidade *
000-1 - Call ECG - Unidade de Teste

Prioridade *
Eletivo

Número de Atendimento

Assintomático

Pré Operatório

Dor

Dispneia

Náuseas / Vômitos

Palpitação

☒ Has

☐ Tabagismo

☐ Doença De Chagas

☐ Angioplastia Prévia

☐ Diabetes

☐ Obesidade

☐ Infarto Prévio

☐ Cirurgia Cardíaca Prévia

Informações adicionais (Outros sintomas, dados de exame físico, medicamentos, entre outras)

TESTE TESTE

Limpar Campos

Arquivo Tipo	Arquivo Nome	Data Adicionado	Opções
Imagem	44d685f7c5c05be0f03fbb5ea7708ee9@0__Teste_Test_F_19921203_029Y_20220103170618__6_N	03/01/2022 16:22	
PDF	af1c9329d119f2be805d1ae491d20695@0__Teste_Test_F_19921203_029Y_20220103170618__6_N	03/01/2022 16:22	

Cancelar

Salvar

- O exame será encaminhado à central para processamento e aparecerá na aba **Aguardando**.





Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

Código da Unidade: 000-1



v.3.07.00

Gerenciar

Manutenção (0)

Operação

Exames

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

Laudando

Emergência

Revisar

Retificação

Unidade:

Todos

Filtrar

Exames

Período: 31/12/2021 a 30/01/2022

Laudos emitidos: 4

Aguardando 1

Recusados 0

Finalizado

50

 por página

Pesquisar

Buscar

Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
1064850		TESTE TESTE	Eletivo	Call ECG - Unidade de Teste	Unidade de Teste - Unidade de Teste	03/01/2022 16:49	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior

1

- Assim que for aceito pela central, o exame ficará verde e aparecerá a ícone de aceito abaixo do código.



Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Segunda-feira, 03 de janeiro de 2022
Código da Unidade: 000-1



v.3.07.00

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

■ Laudando ■ Emergência ■ Revisar ■ Retificação

Unidade: Todos Filtrar

Exames

Período: 31/12/2021 a 30/01/2022

Laudos emitidos: 4

Aguardando **1**

Recusados **0**

Finalizado

50 por página

Pesquisar Buscar Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
1064850		TESTE TESTE	Eletivo	Call ECG - Unidade de Teste	Unidade de Teste - Unidade de Teste	03/01/2022 16:49	  

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo



CENTRAL 24 Horas

Fone: (42) 4009-9999/  (42) 9 8838-0746

www.callecg.com.br

E-mail

callecg@callecg.com.br
qualidade@callecg.com.br
suporte@callecg.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,
Ponta Grossa - PR, 84040-130