



Procedimento para realizar eletrocardiograma Sistema (Integrador)




**CARDIOCARE
2000**




Relembre o posicionamento

Colocação dos Eletrodos

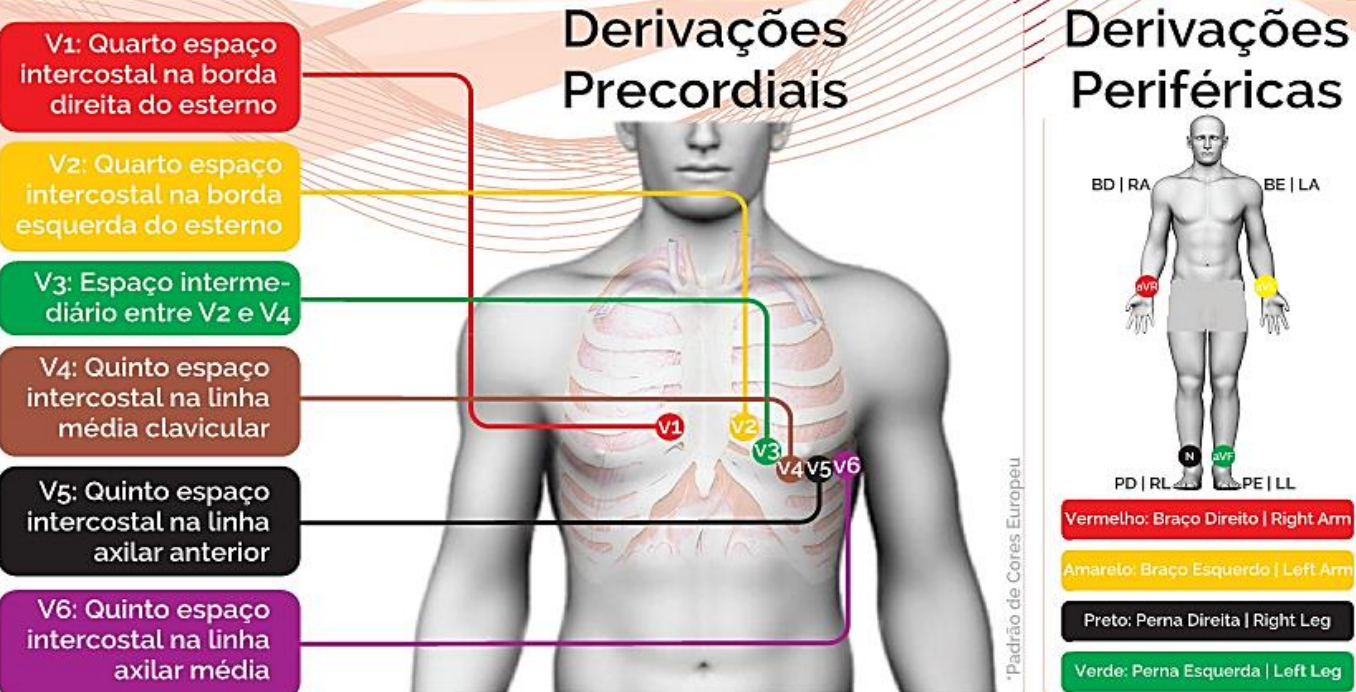

Passo a Passo

Execute o Programa
Ekg Viewer.

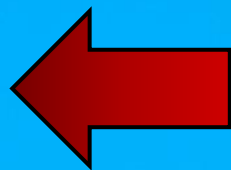

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1


V2

V3


V4

V5

V6

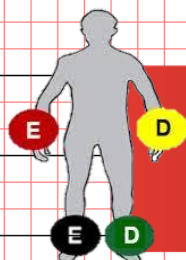

Coloque os eletrodos no paciente.

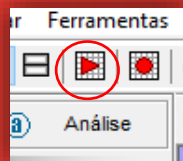


Após abrir o programa EKG Viewer clique no botão INICIAR monitoração.

1º Passo

ID
Nome
Sobrenome
Gênero
Idade
Peso Kg
Altura Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora

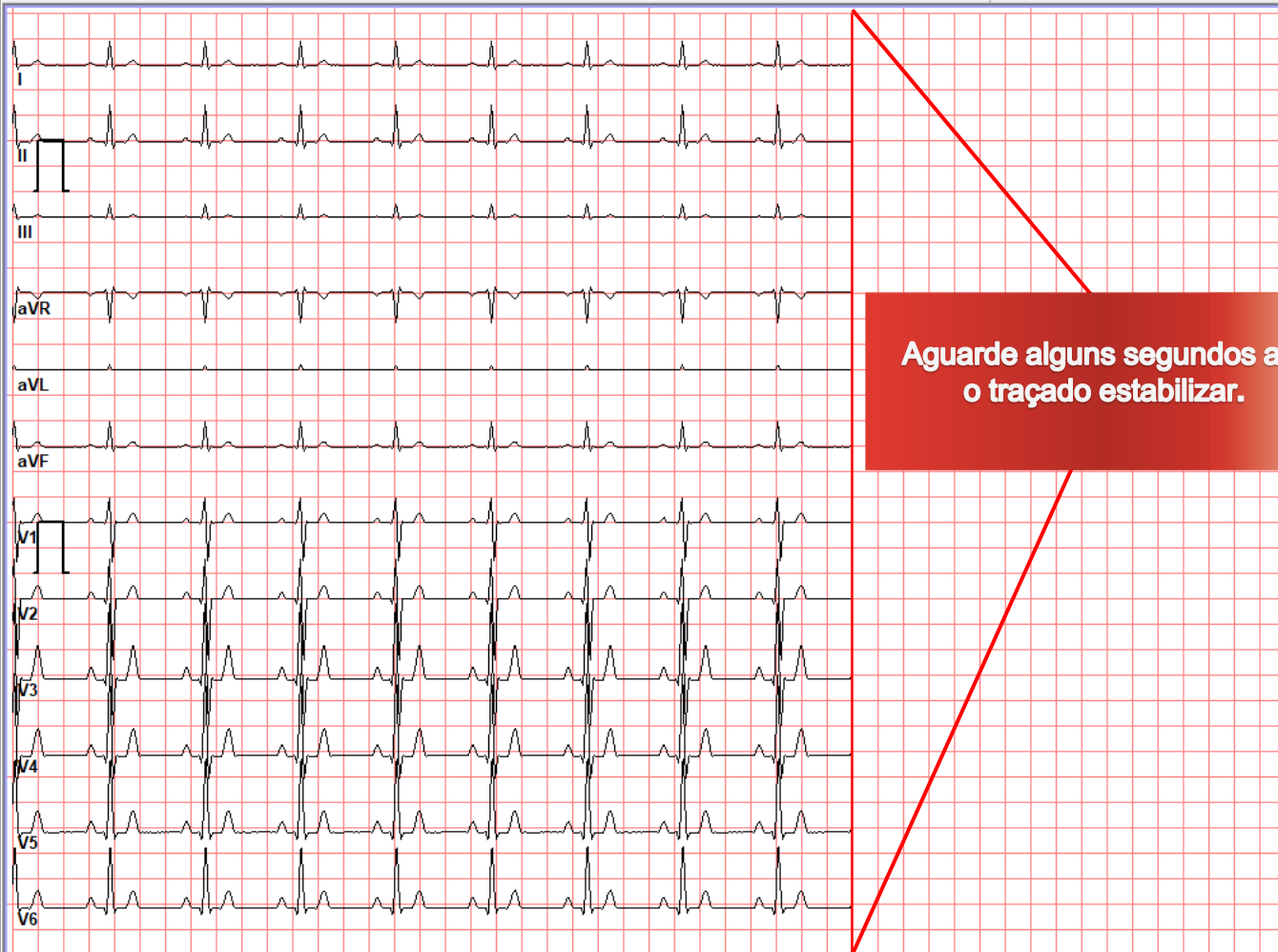

Aguarde alguns segundos até
o traço estabilizar.

2º Passo

Dados do Paciente


ID
Nome
Sobrenome
Gênero
Idade
Peso Kg
Altura Cm
Complemento

Diversos

Médico
Hospital
Data/Hora

Editar Info

Salvar Info

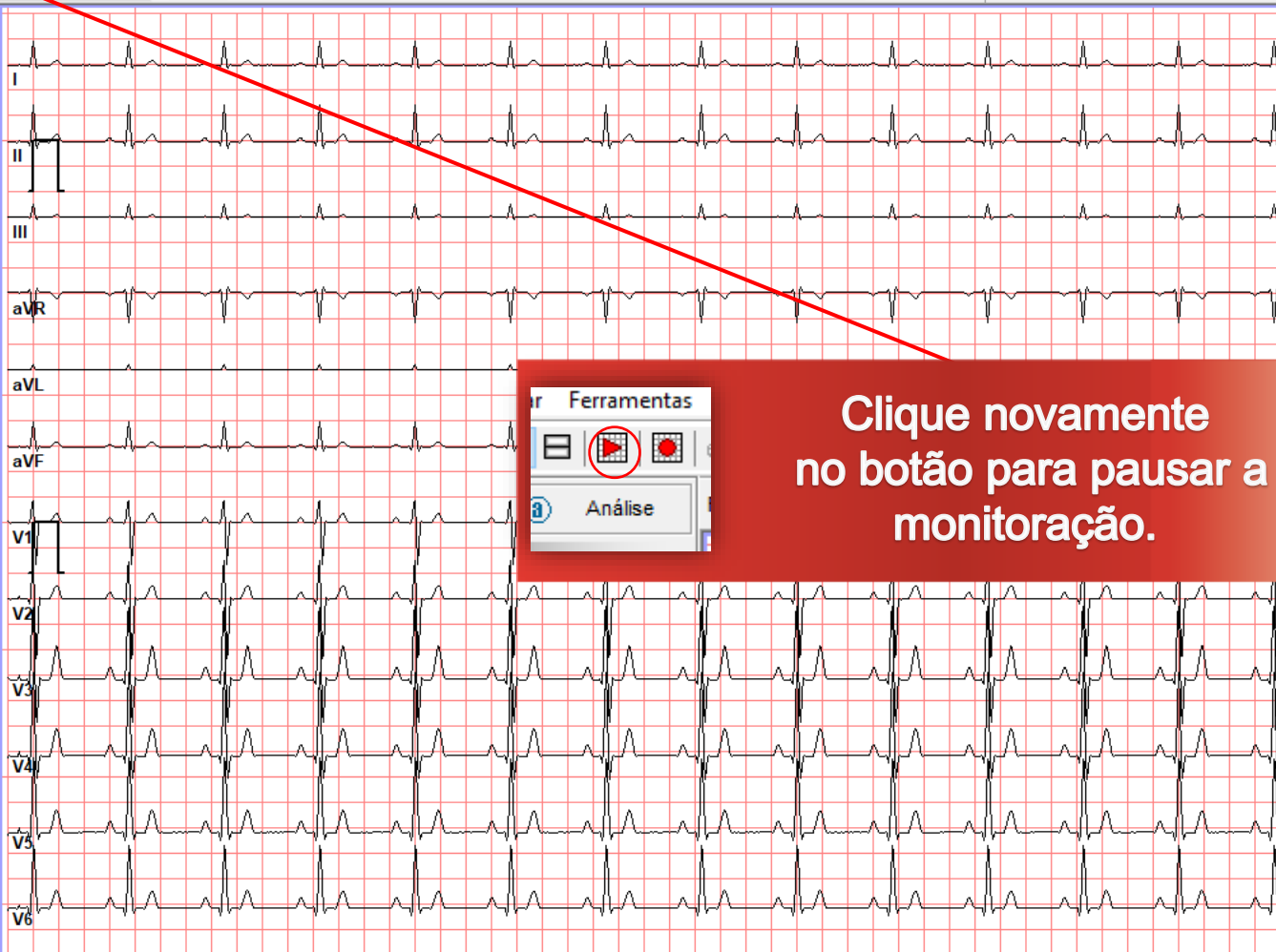

Clique novamente
no botão para pausar a
monitoração.

3º Passo

Dados do Paciente

ID

Nome

Sobrenome

Gênero

Idade

Peso Kg

Altura Cm

Complemento


Diversos

Médico


Hospital

Data/Hora

Editar Info Salvar Info

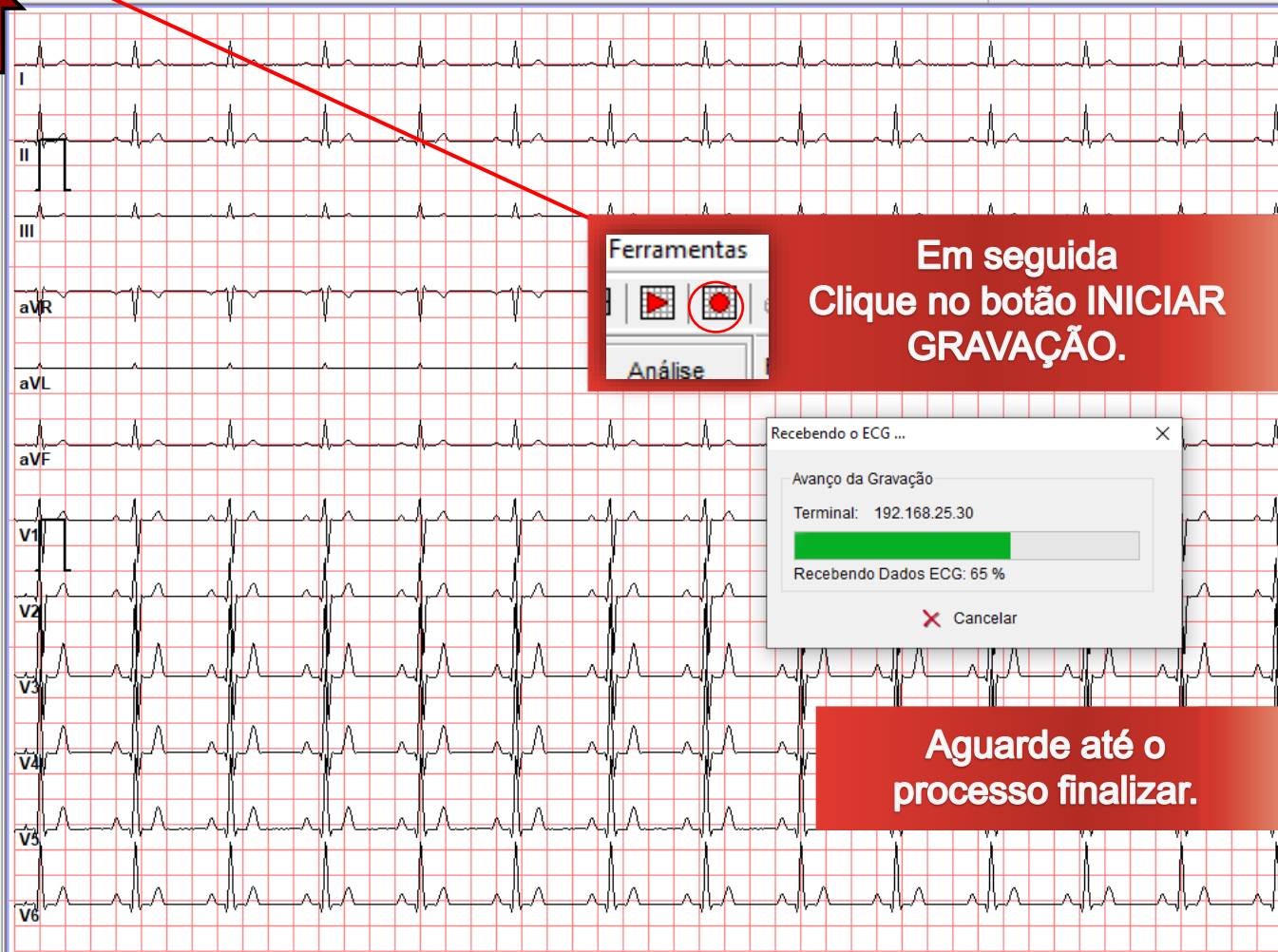

Em seguida
Clique no botão INICIAR
GRAVAÇÃO.

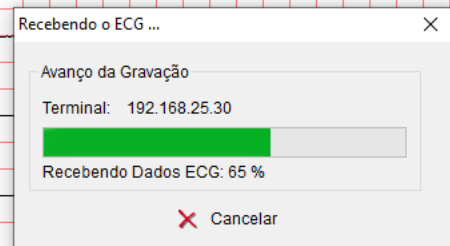


Aguarde até o
processo finalizar.

4º Passo


ID
Nome
Sobrenome
Gênero
Idade
Peso Kg
Altura Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora

Formato: 12Ch Ritmo: LEAD: II Ganho: 10mm/mV Velocidade: 25mm/sec Régua Lupa Marcapasso

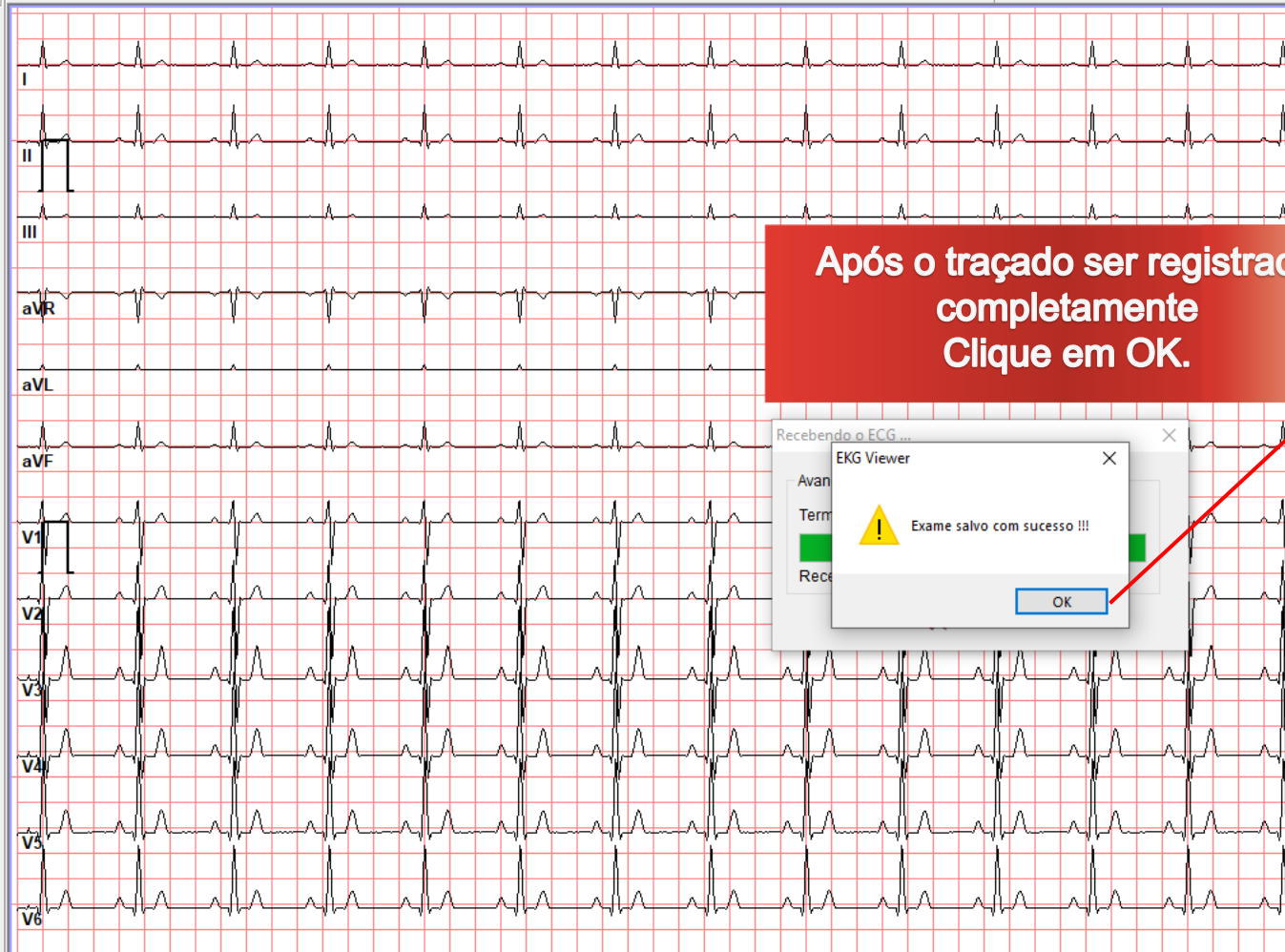

Após o traçado ser registrado completamente
Clique em OK.

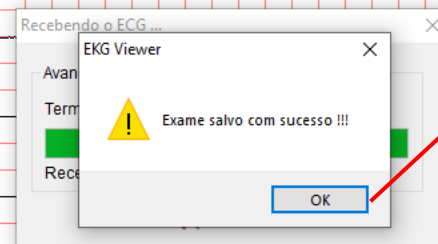

5º Passo

Dados do Paciente

ID
 Nome
 Sobrenome
 Gênero
 Idade 0 Year
 Peso 0 Kg
 Altura 0 Cm
 Complemento


Diversos

Médico
 Hospital
 Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info

Editar Info

Clique no Botão Editar Info.
Para preencher os dados do
paciente.

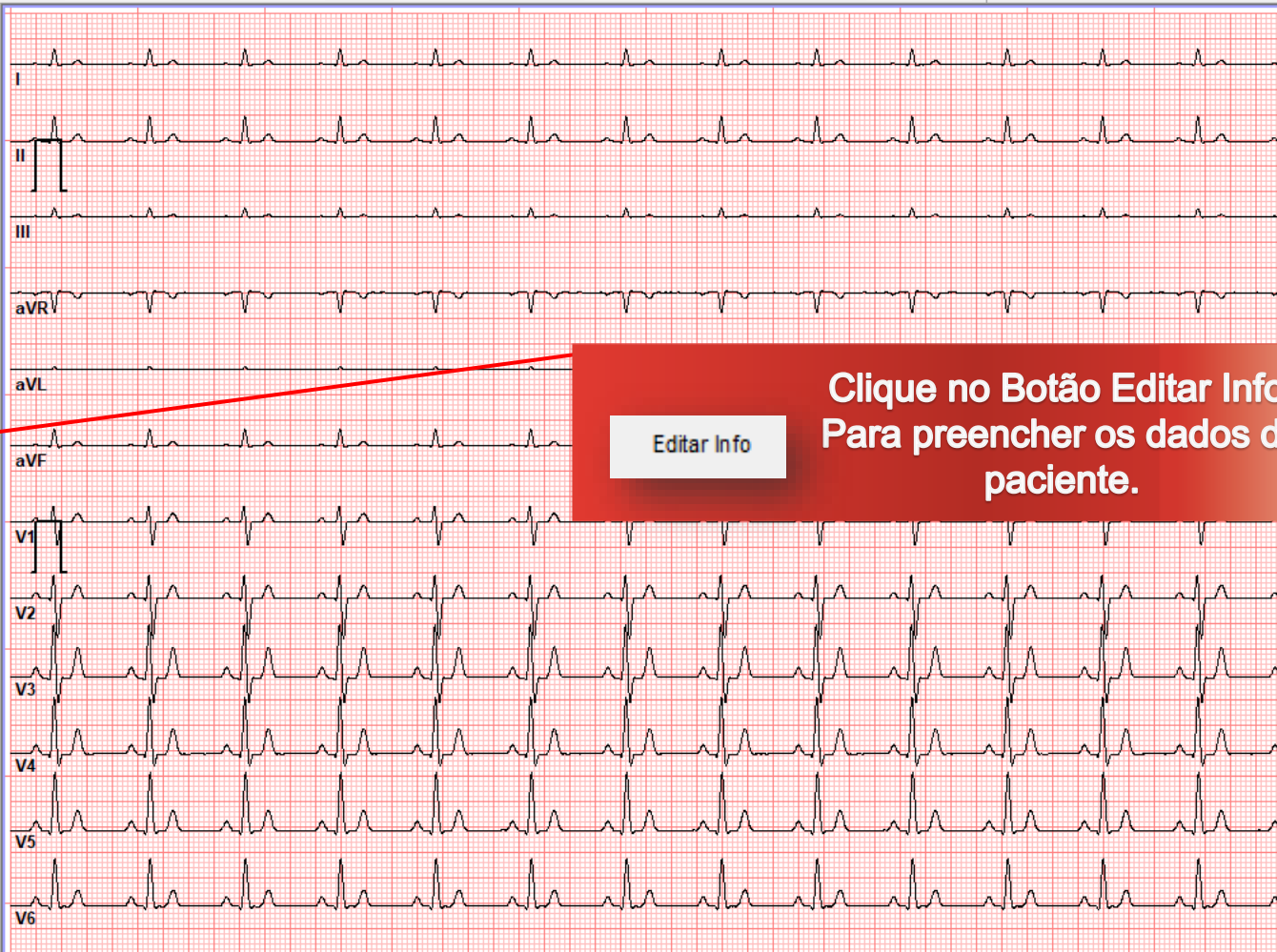

6º Passo

Dados do Paciente

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Diversos

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info

Salvar Info

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30

Será necessário o preenchimento de 4 campos Obrigatórios ID(CPF), Nome completo, Gênero e Idade do paciente.

Após o preenchimento clique no botão SALVAR INFO.


Salvar Info

7º Passo

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

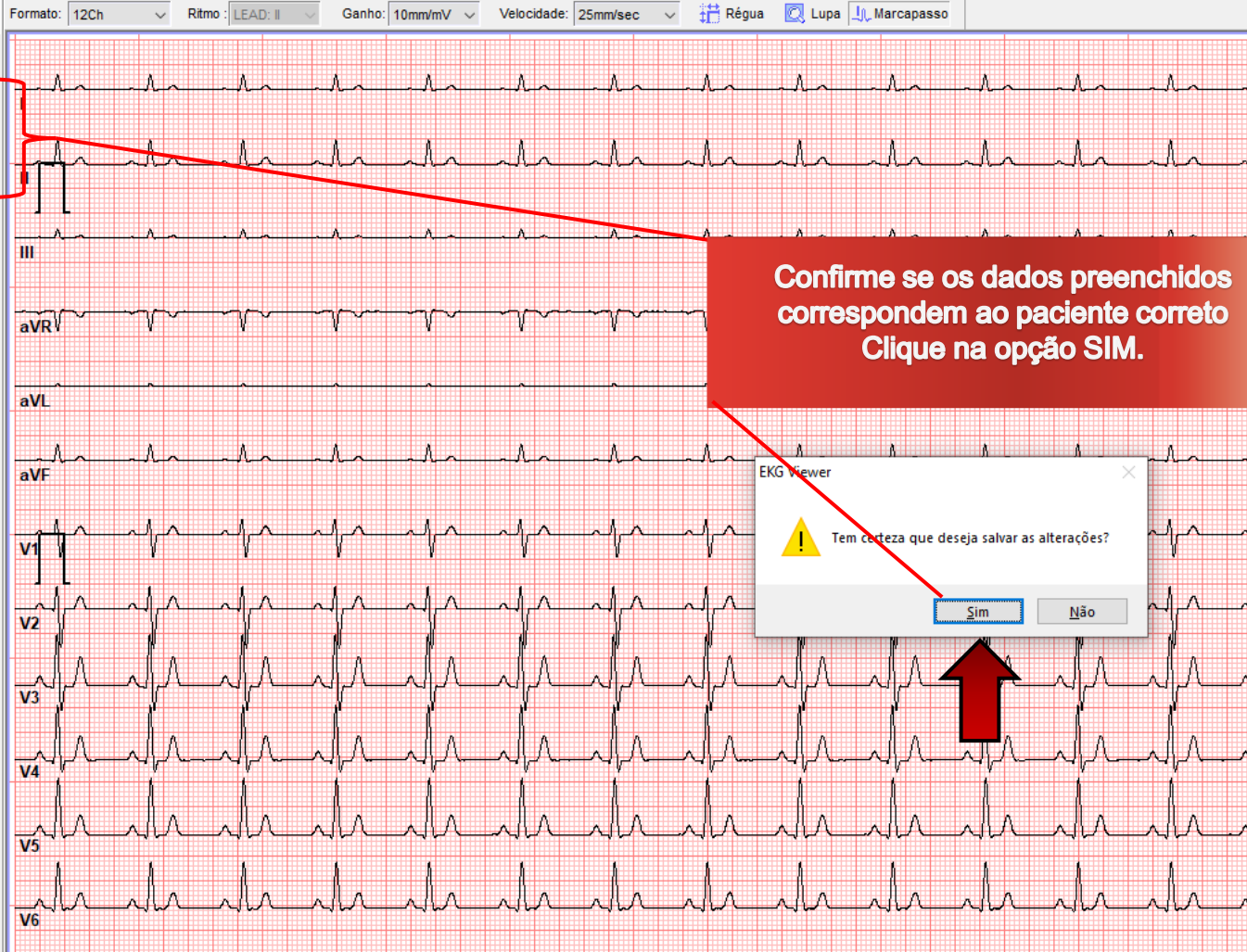


Dados do Paciente

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Diversos

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

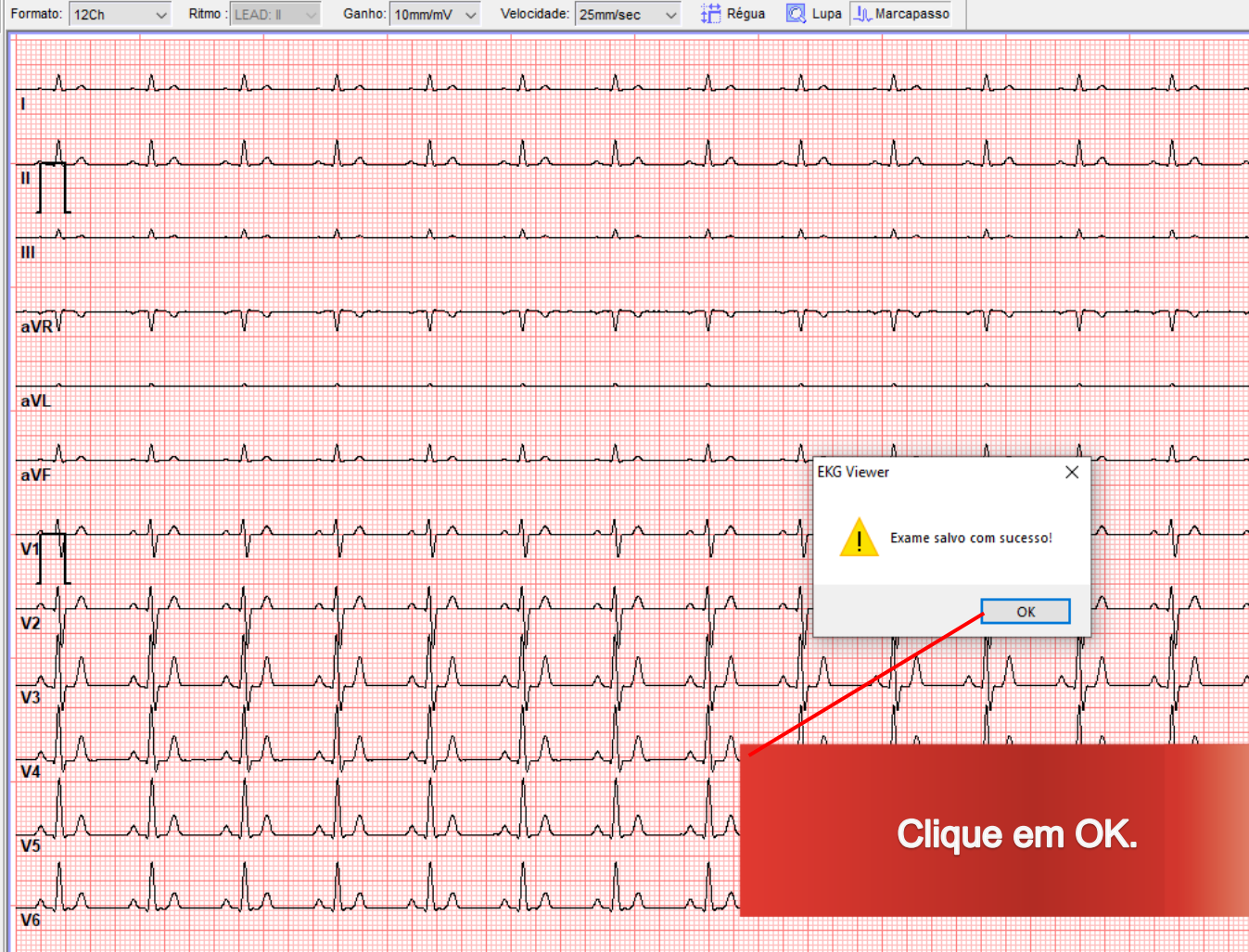


Clique em OK.


9º Passo

ID 98765432175
 Nome TESTE TESTE
 Sobrenome
 Gênero MASC
 Idade 30 Year
 Peso 0 Kg
 Altura 0 Cm
 Complemento

Médico
 Hospital
 Data/Hora 2021/04/19 10:58

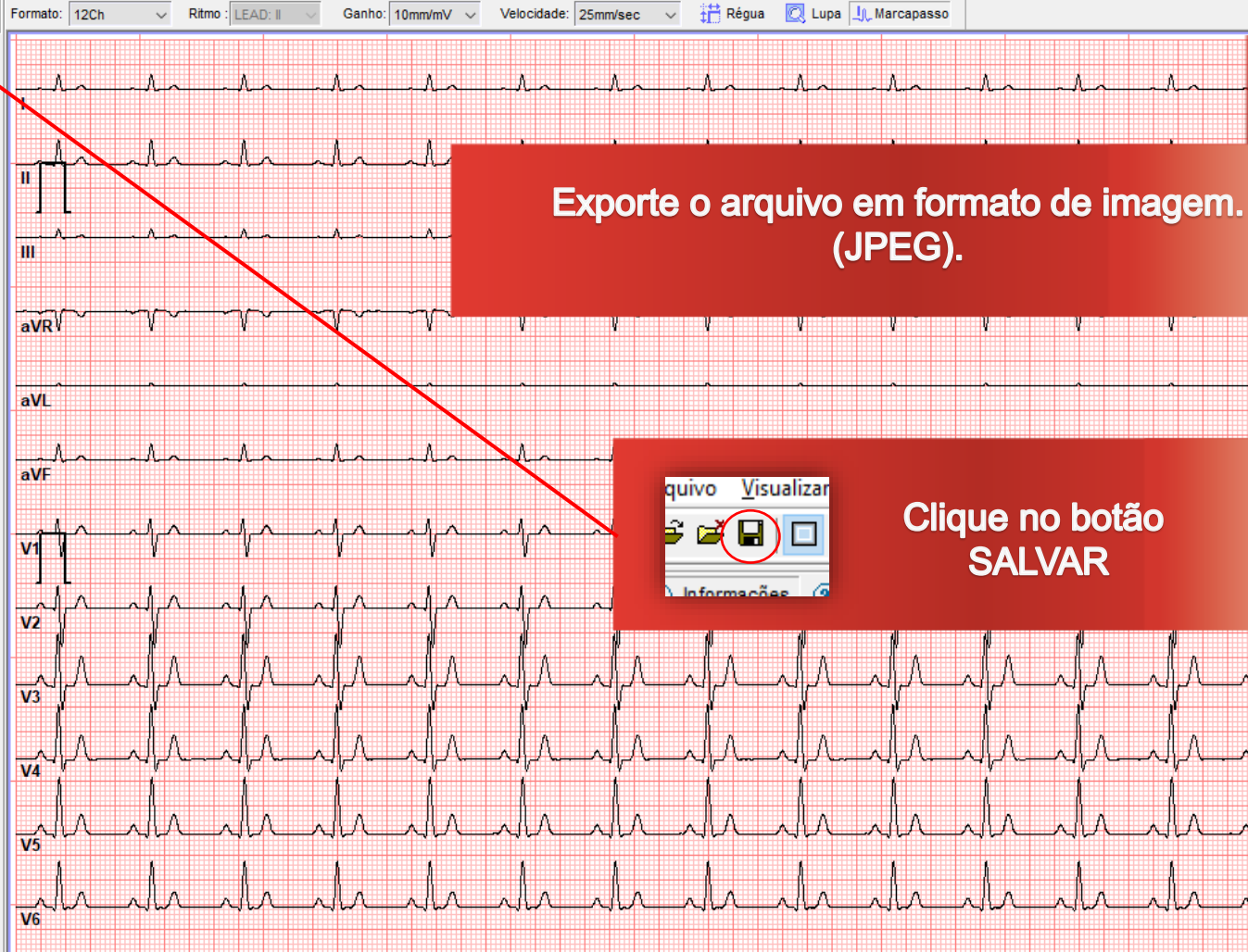

Exporte o arquivo em formato de imagem.
(JPEG).

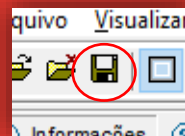

Clique no botão
SALVAR

10º Passo


Dados do Paciente

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Diversos

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

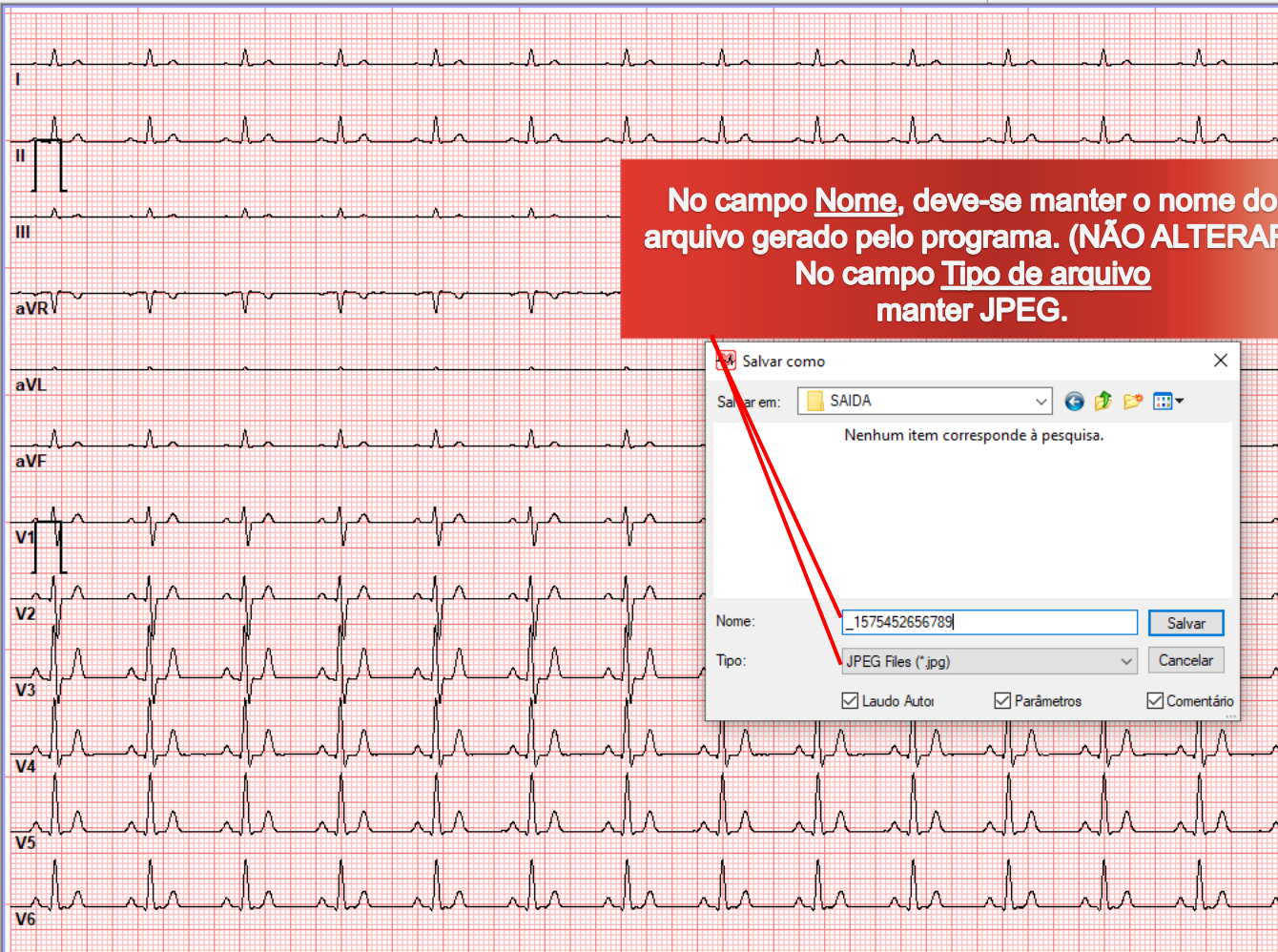

Salvar como

Salvar em: SAIDA

Nenhum item corresponde à pesquisa.

Nome: _1575452656789

Tipo: JPEG Files (*.jpg)

☒ Laudo Autoi ☒ Parâmetros ☒ Comentário

Salvar Cancelar

11º Passo

Dados do Paciente


ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Diversos

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

Formato: 12Ch Ritmo: LEAD: II Ganho: 10mm/mV Velocidade: 25mm/sec Régua Lupa Marcapasso

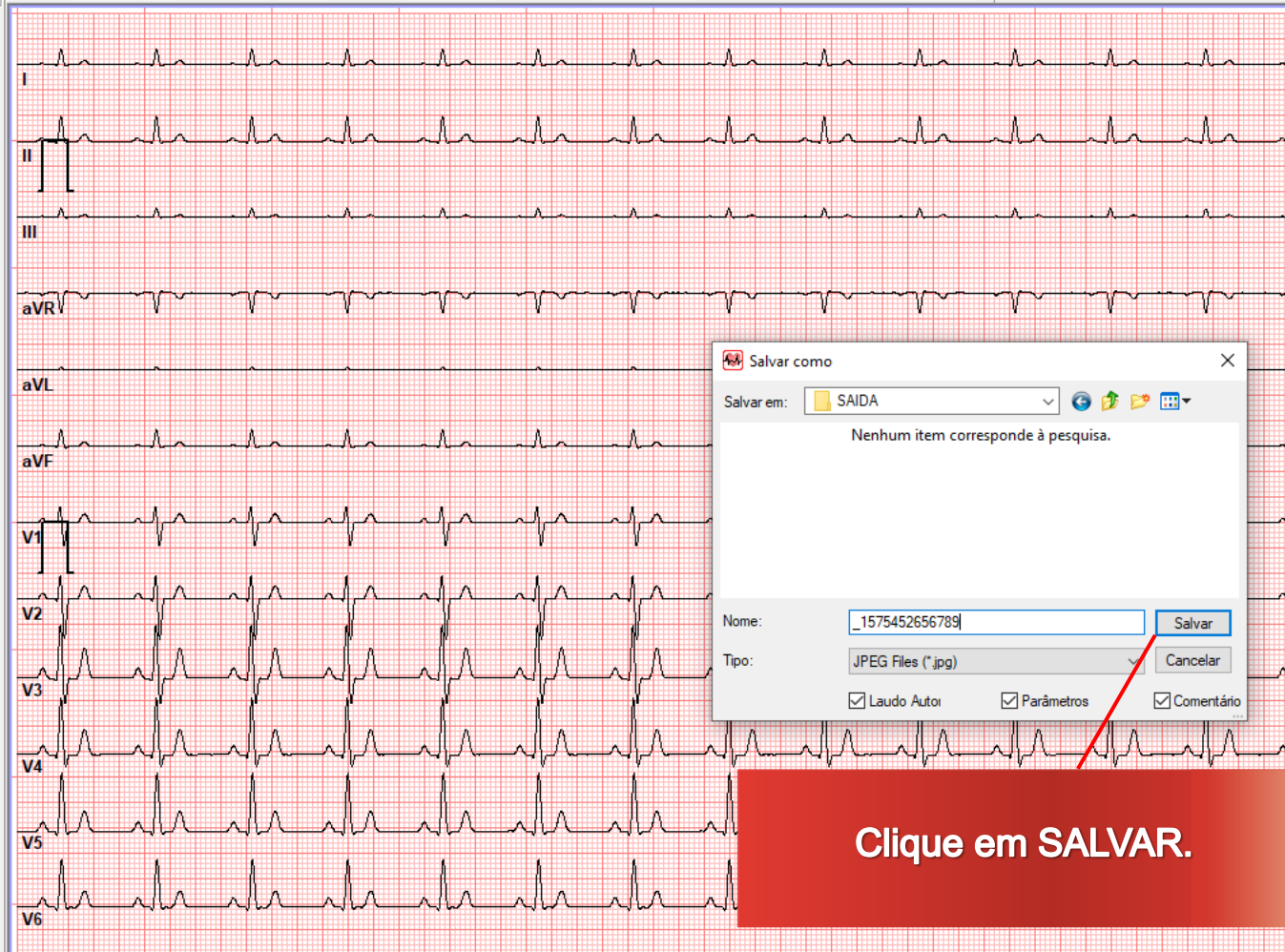


Clique em SALVAR.

12º Passo

ID 98765432175
 Nome TESTE TESTE
 Sobrenome
 Gênero MASC
 Idade 30 Year
 Peso 0 Kg
 Altura 0 Cm
 Complemento

Médico
 Hospital
 Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

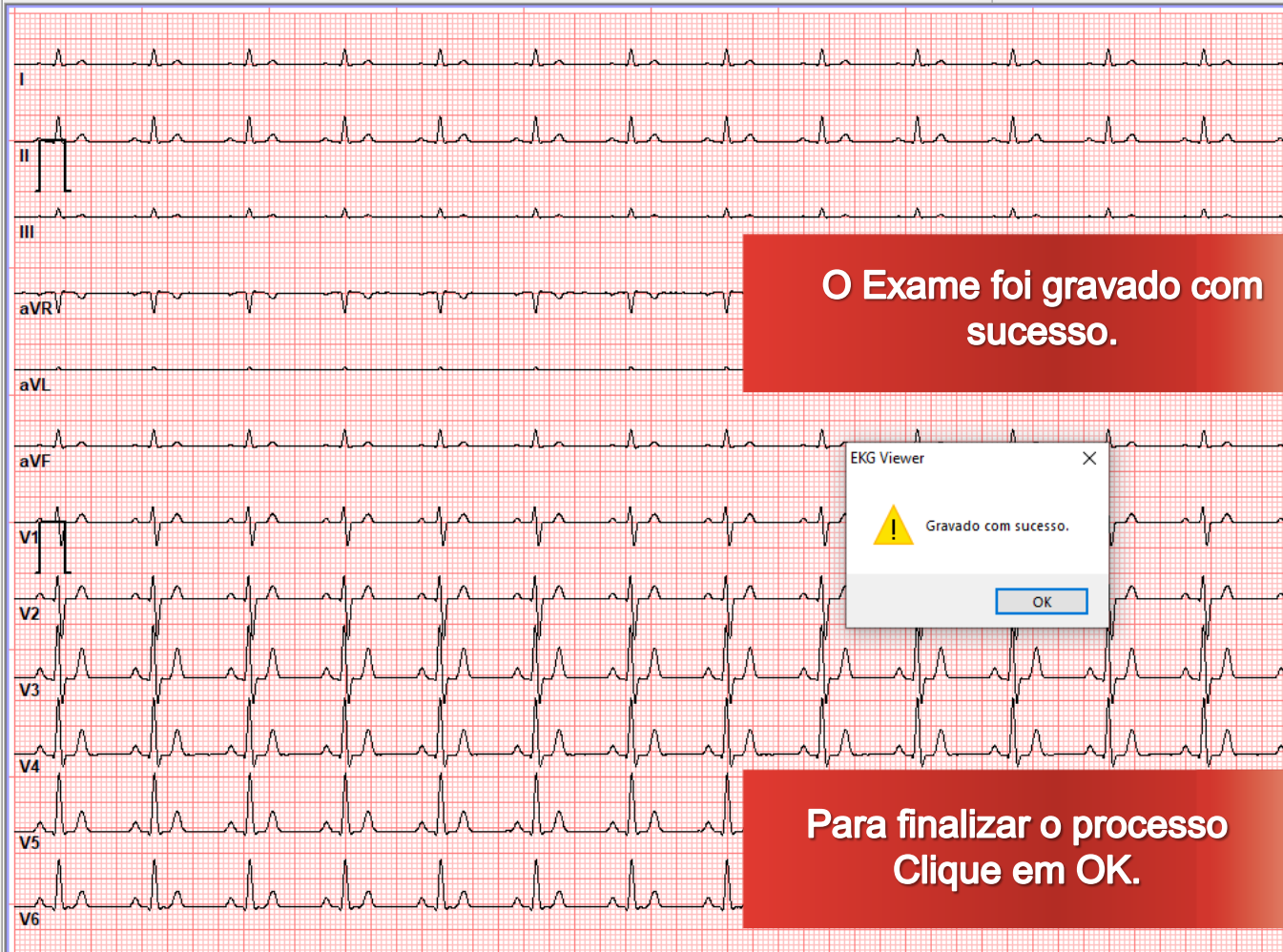

O Exame foi gravado com sucesso.


Para finalizar o processo
 Clique em OK.

13º Passo


ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

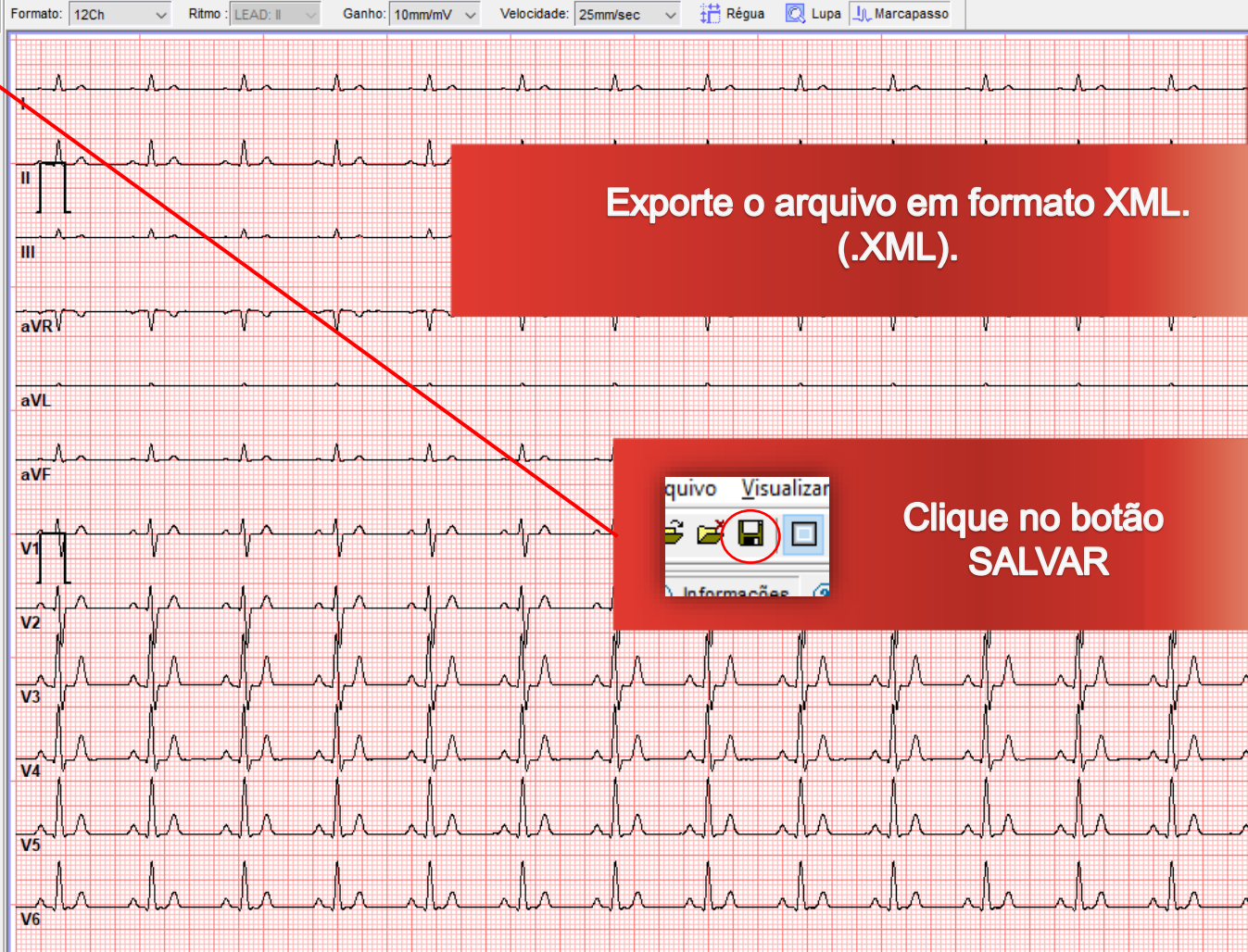

Exporte o arquivo em formato XML.
(.XML).

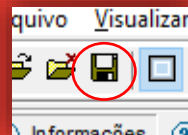


Clique no botão
SALVAR

14º Passo

ID	98767432175
Nome	TESTE TESTE
Sobrenome	
Gênero	MASC
Idade	30
Peso	0 Kg
Altura	0 Cm
Complemento	

Médico	
Hospital	
Data/Hora	2022/02/14 13:33

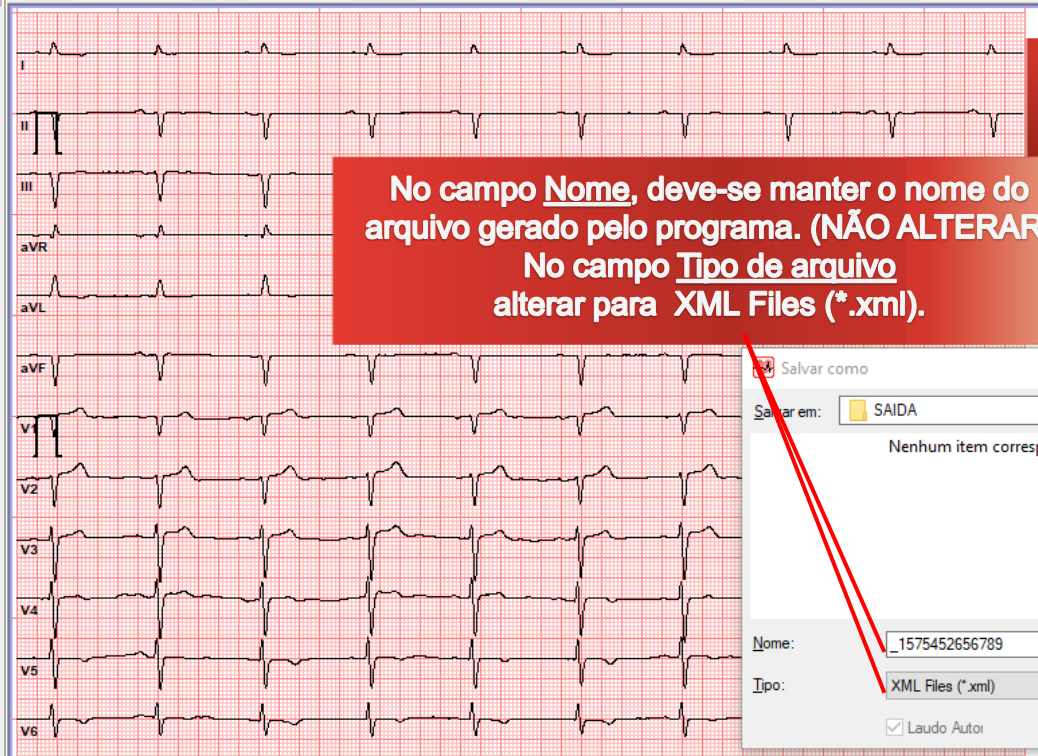

No campo **Nome**, deve-se manter o nome do arquivo gerado pelo programa. (NÃO ALTERAR)
No campo **Tipo de arquivo** alterar para **XML Files (*.xml)**.

Salvar como

Salvar em: SAIDA

Nenhum item corresponde à pesquisa.

Nome: _1575452656789

Tipo: XML Files (*.xml)


☒ Laudo Autor ☒ Parâmetros ☒ Comentário



15º Passo

ID 98767432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2022/02/14 13:33

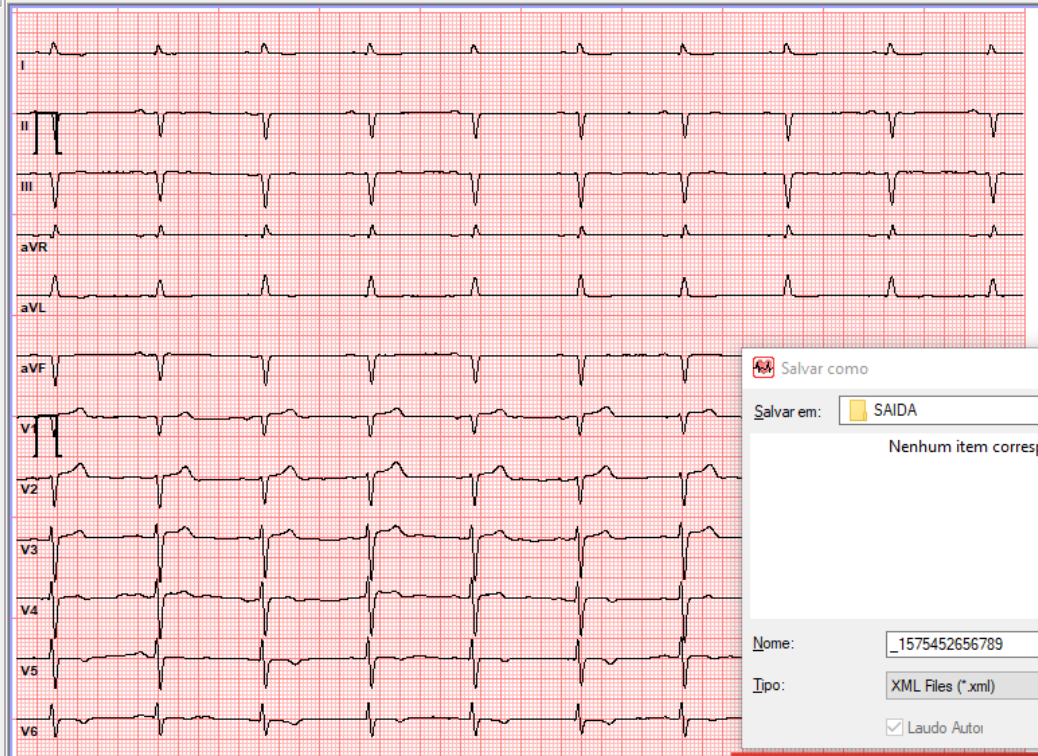

Salvar como

Salvar em: SAIDA

Nenhum item corresponde à pesquisa.

Nome: _1575452656789 Salvar

Tipo: XML Files (*.xml) Cancelar

☒ Laudo Autor ☒ Parâmetros ☒ Comentário


Clique em SALVAR.

16º Passo

ID 98765432175
Nome TESTE TESTE
Sobrenome
Gênero MASC
Idade 30 Year
Peso 0 Kg
Altura 0 Cm
Complemento

Médico
Hospital
Data/Hora 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

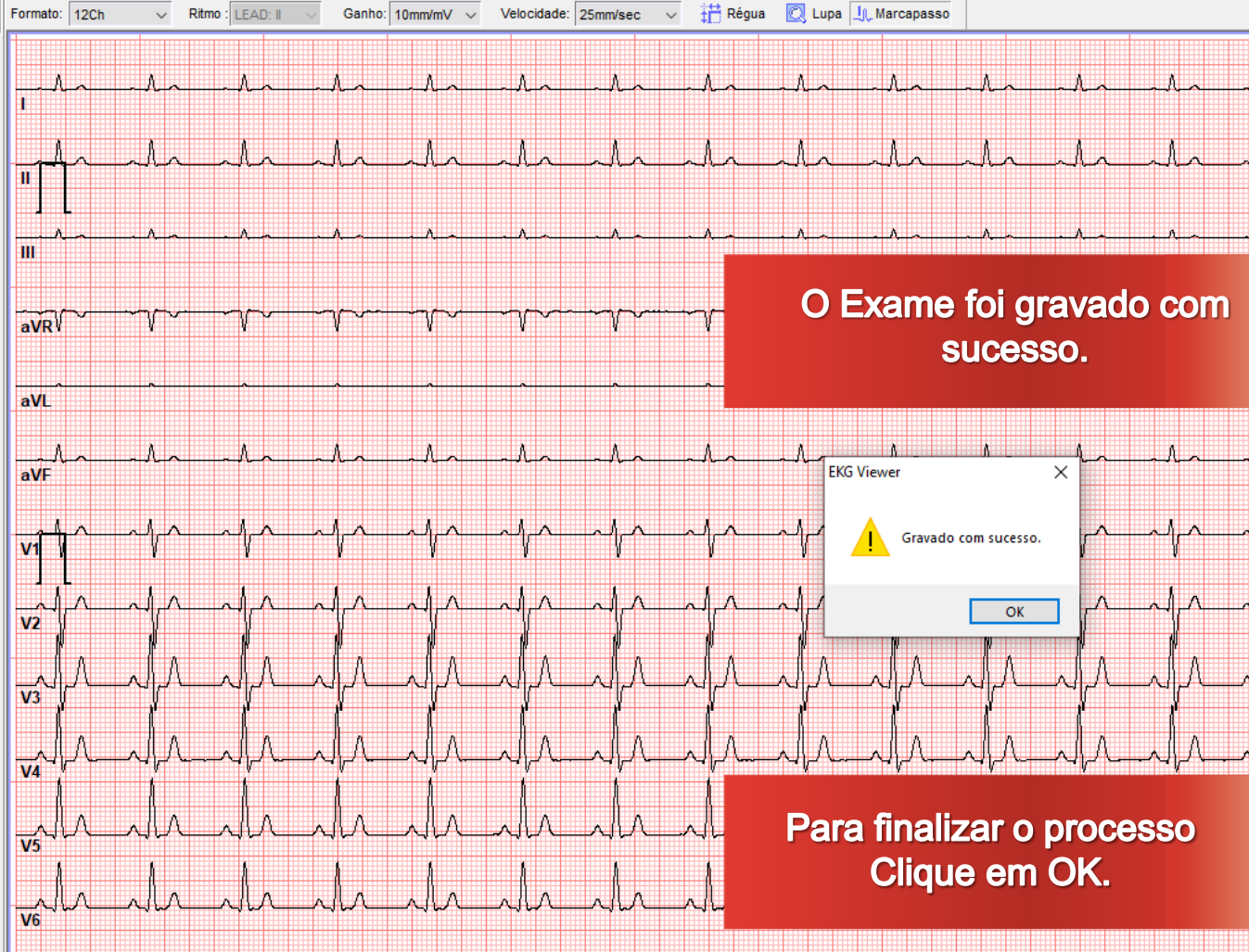


ID: 98765432175
 Nome: TESTE TESTE
 Sobrenome:
 Gênero: MASC
 Idade: 30 Year
 Peso: 0 Kg
 Altura: 0 Cm
 Complemento:

Médico:
 Hospital:
 Data/Hora: 2021/04/19 10:58

Editar Info Salvar Info

Formato: 12Ch Ritmo: LEAD: II Ganho: 10mm/mV Velocidade: 25mm/sec Régua Lupa Marcapasso

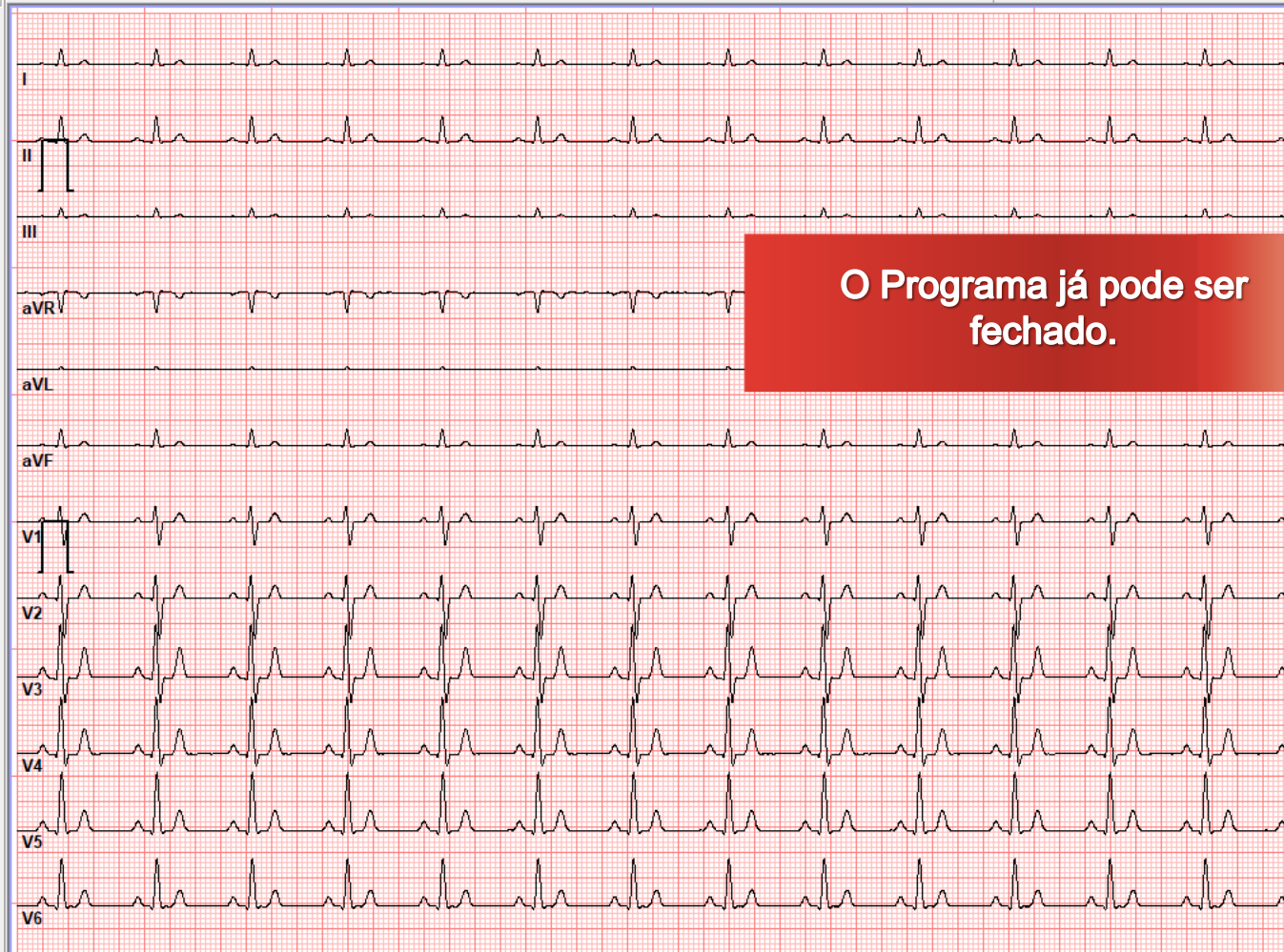

O Programa já pode ser fechado.

18º Passo

Passo a Passo

Seus exames estarão armazenados na pasta SAÍDA localizada na Área de trabalho.



19º Passo



Passo a Passo

Clique duas vezes no ícone
Enviar ECG.



20º Passo



Lixeira



Enviar ECG



AnyDesk



Foxit Reader



Google
Chrome



Ekg Viewer




BMS Server



SAIDA

Passo a Passo

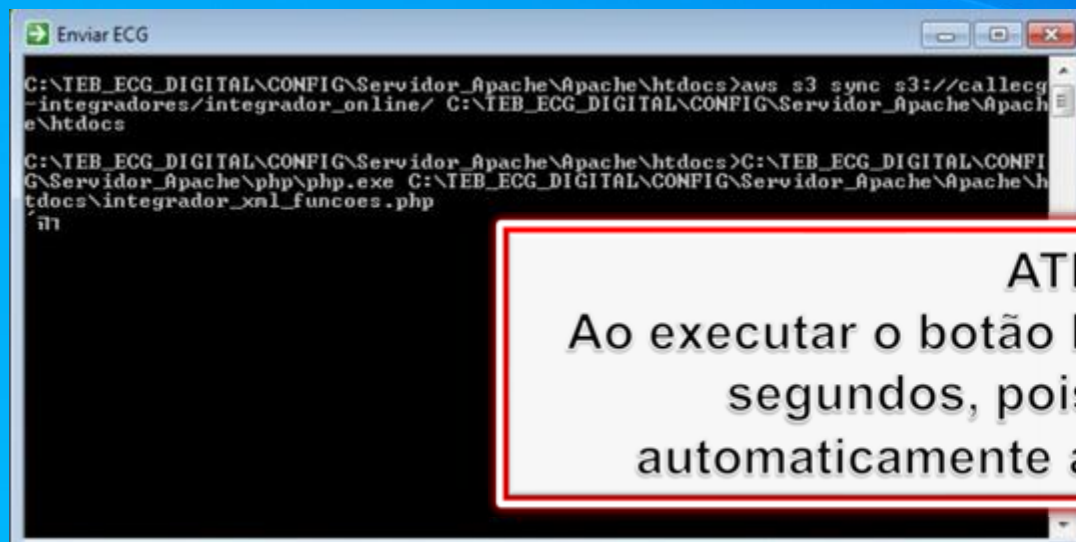

```
C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apache\htdocs>aws s3 sync s3://callegc-integradores/integrador_online/ C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apache\htdocs

C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apache\htdocs>C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\php\php.exe C:\TEB_ECG_DIGITAL\CONFIG\Servidor_Apache\Apache\htdocs\integrador_xml_funcoes.php

il
```

ATENÇÃO

Ao executar o botão ENVIAR aguarde alguns segundos, pois abrirá e fechará automaticamente a janela de comando.

21º Passo



Bem-vindo à CALLECG

Acessar

Problemas no login?

Powered by
Finer Soluções Web
homologado para [Chrome](#)



GODADDY®
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA



**Acesse o Sistema
Web
e realize o envio do
Eletrocardiograma.**

22º Passo



CENTRAL 24 Horas

Fone: (42) 4009-9999/ Suporte  (42) 9 9821-0021

** (42) 9 8838-0746
www.callecg.com.br**

E-mail

**callecg@callecg.com.br
qualidade@callecg.com.br
suporte@callecg.com.br**

**R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,
Ponta Grossa - PR, 84040-130**