




PROCEDIMENTO PARA REALIZAR EXAMES NO WINCARDIO 5.0

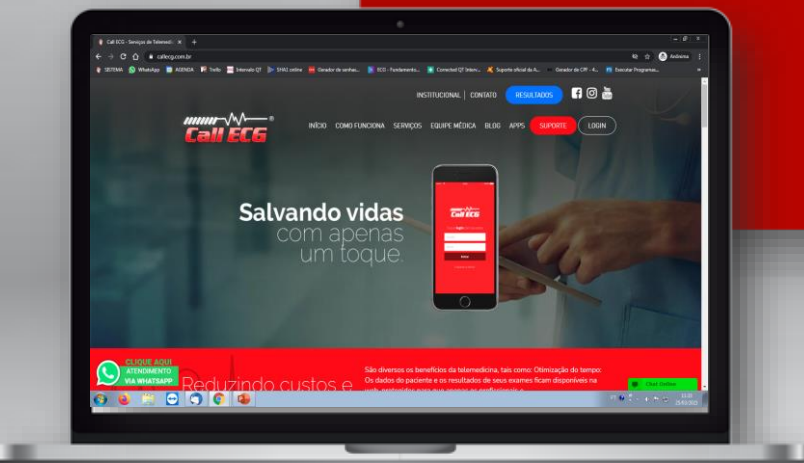


- Abra o software do Wincardio 5.0.

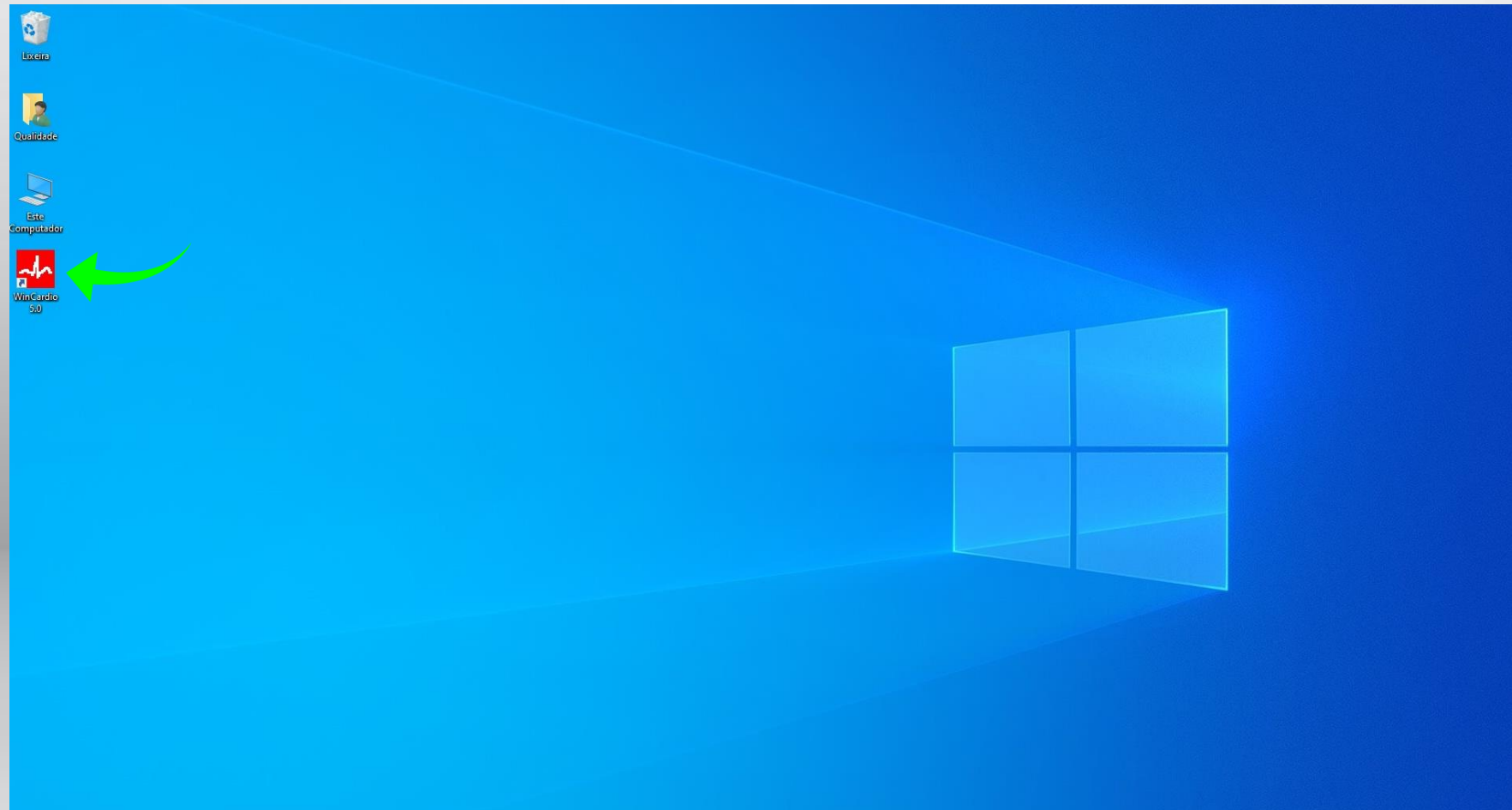

- Para cadastrar um novo paciente, clique em EXAME.
- Após, clique em NOVO PACIENTE.
- Caso o paciente já possua cadastro, basta localizá-lo na CONSULTA PACIENTE e clicar em NOVO EXAME.

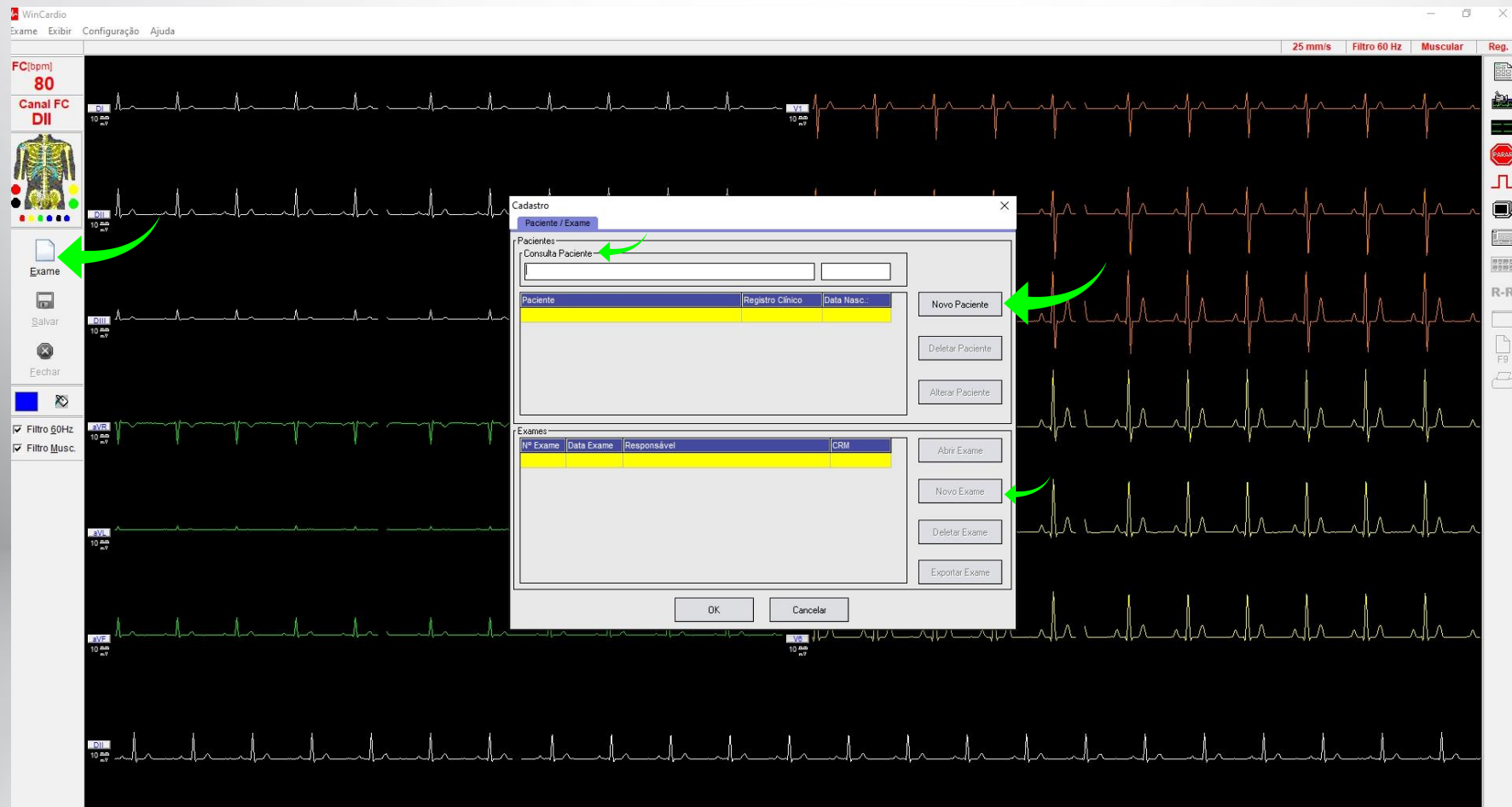


- Nesta tela, preencha os dados do paciente.
- Após, clique no botão SALVAR E NOVO EXAME.

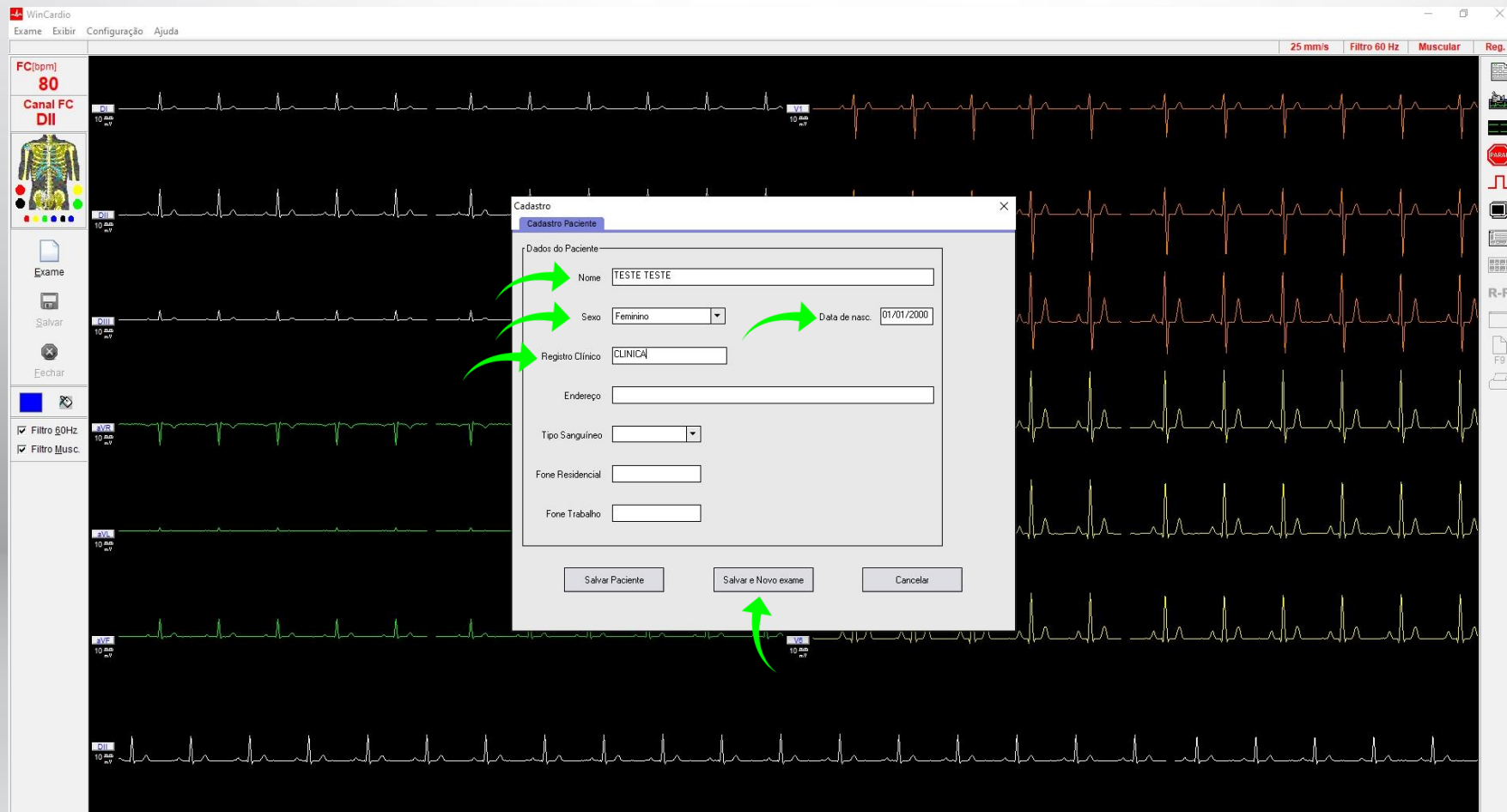


- Verifique se todos os dados fornecidos estão corretos e clique no botão OK.




- Novamente, verifique se o exame que será monitorado é do paciente.
- Aguarde a estabilização do traçado para registrar os exames de eletrocardiograma.

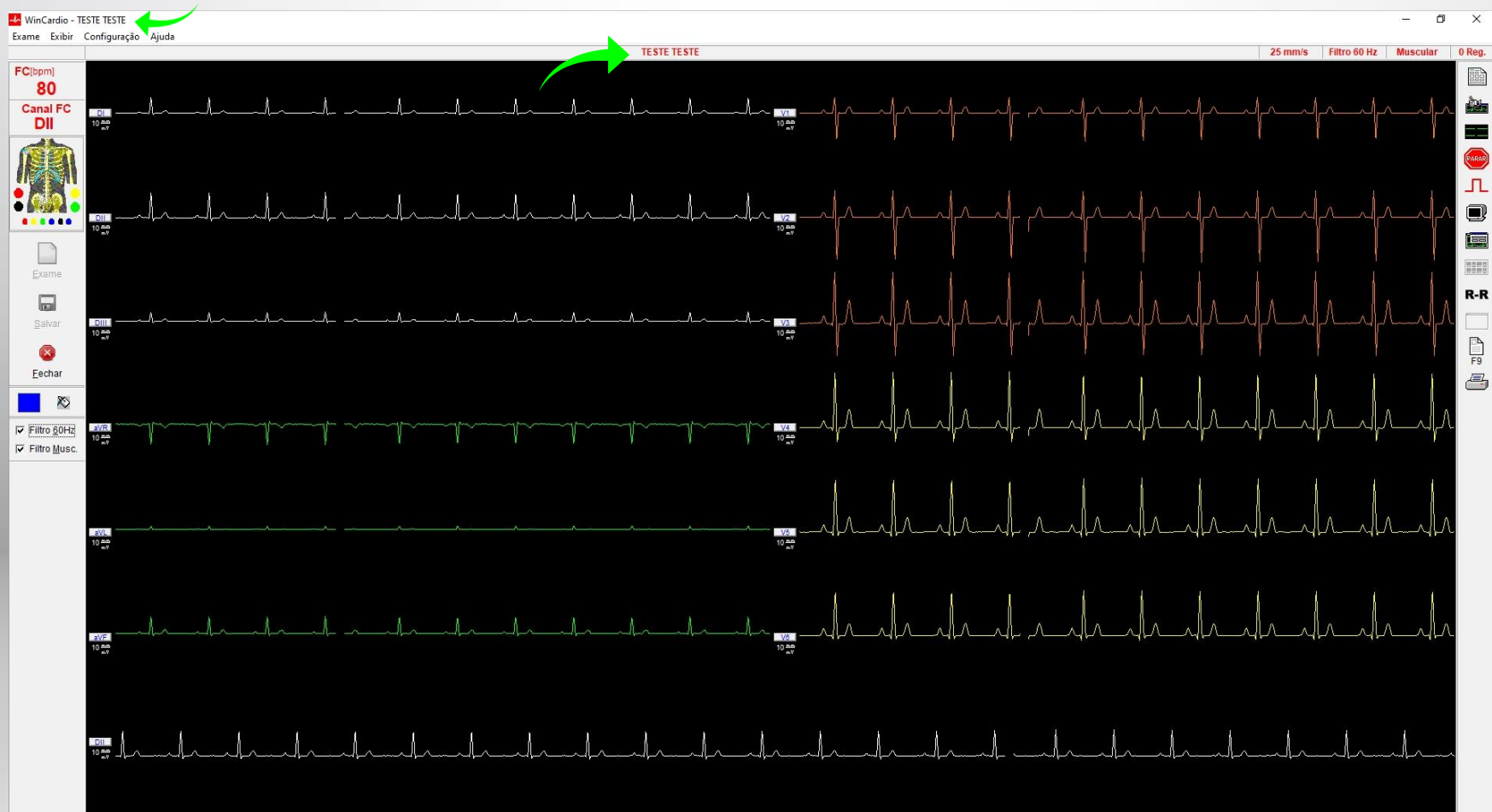


- Após a estabilização do traçado, realize os REGISTROS dos exames.

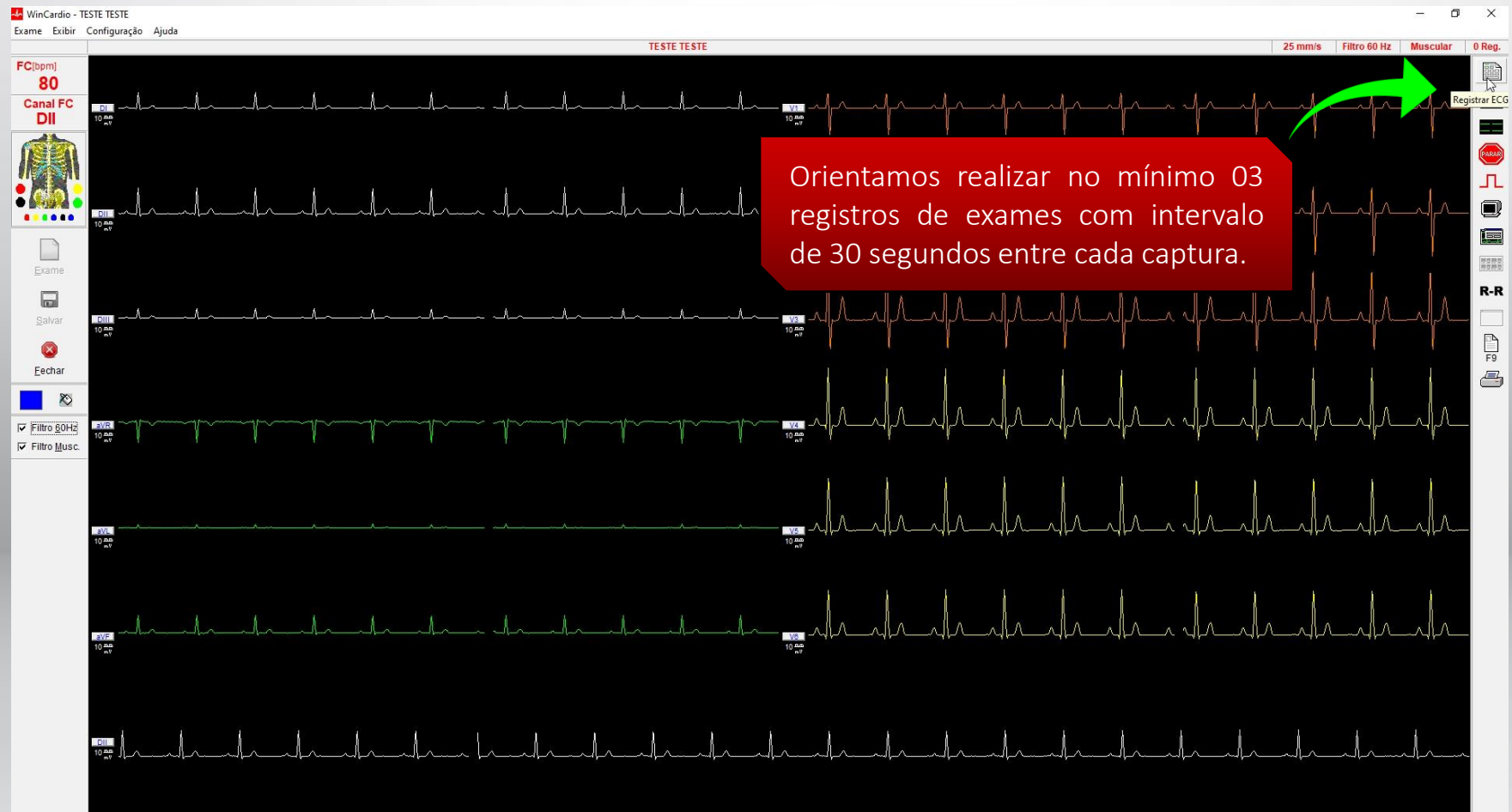


- Após realizar os registros dos exames, clique em SALVAR.

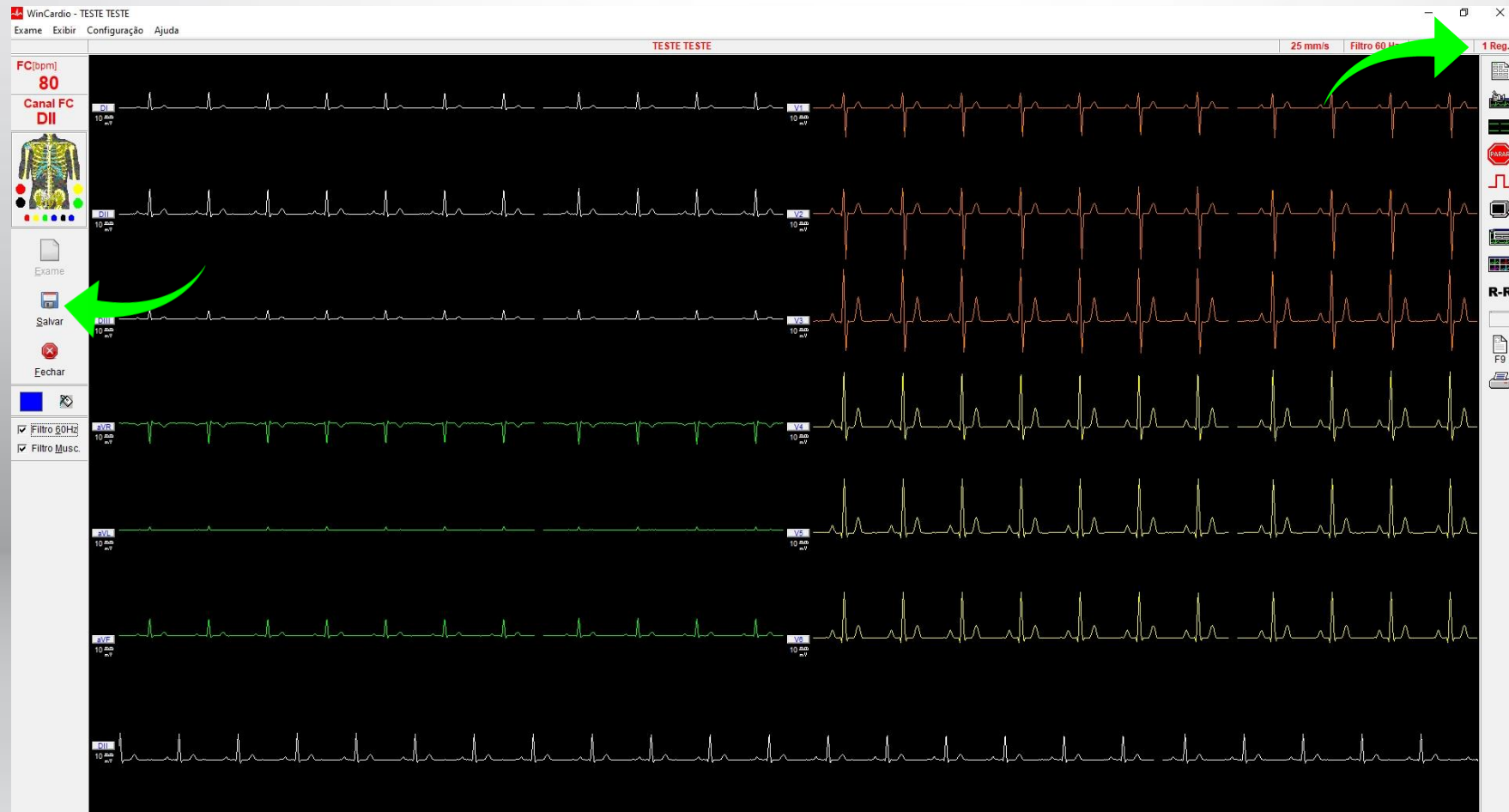


- Após salvar o exame, clique em EDITAR REGISTROS.

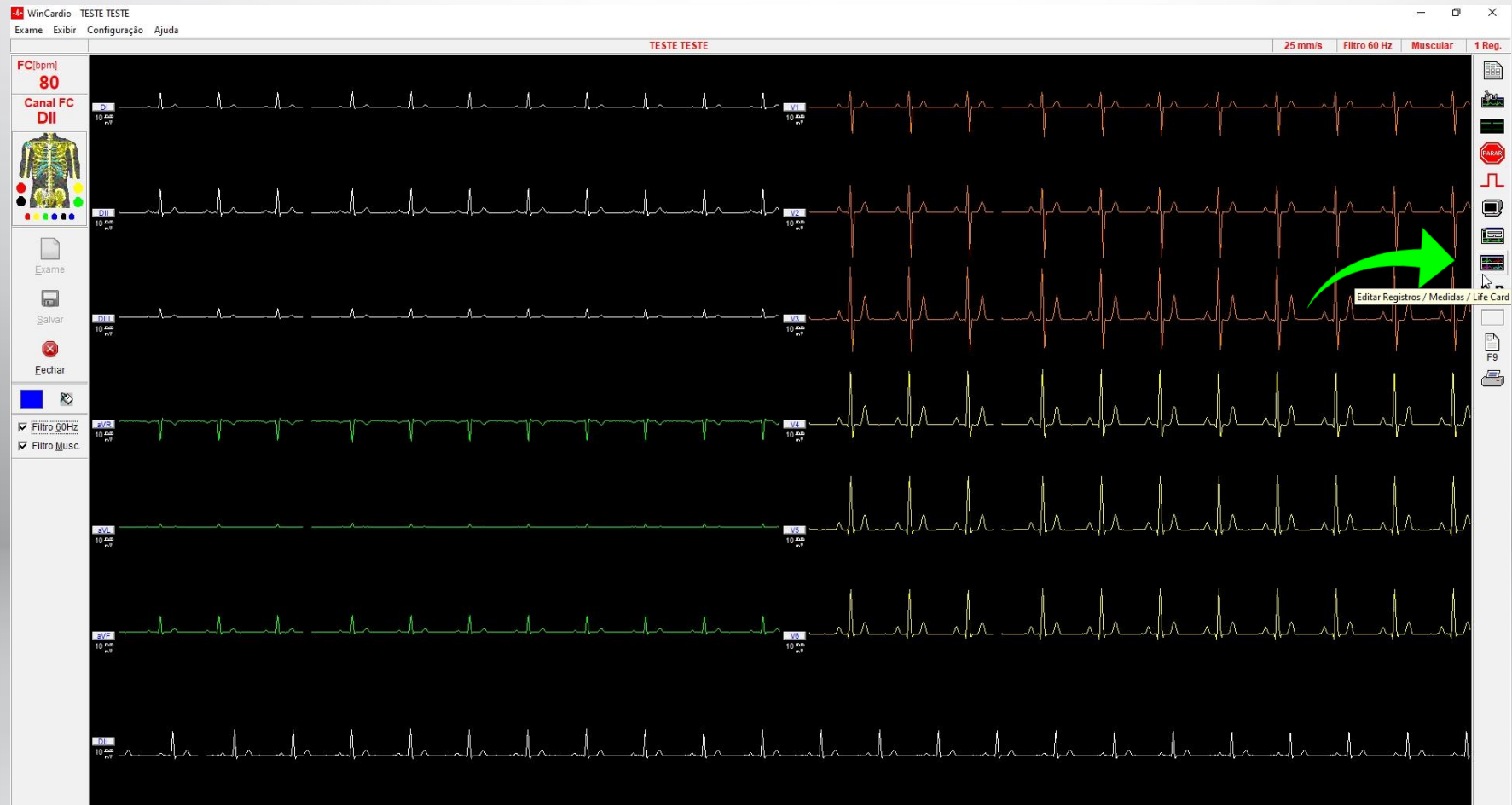


- Caso tenha realizado mais de um registro de traçado, selecione o que deseja encaminhar para laudo.
- Após, clique na opção FIGURA para EXPORTAR o registro em forma de IMAGEM.

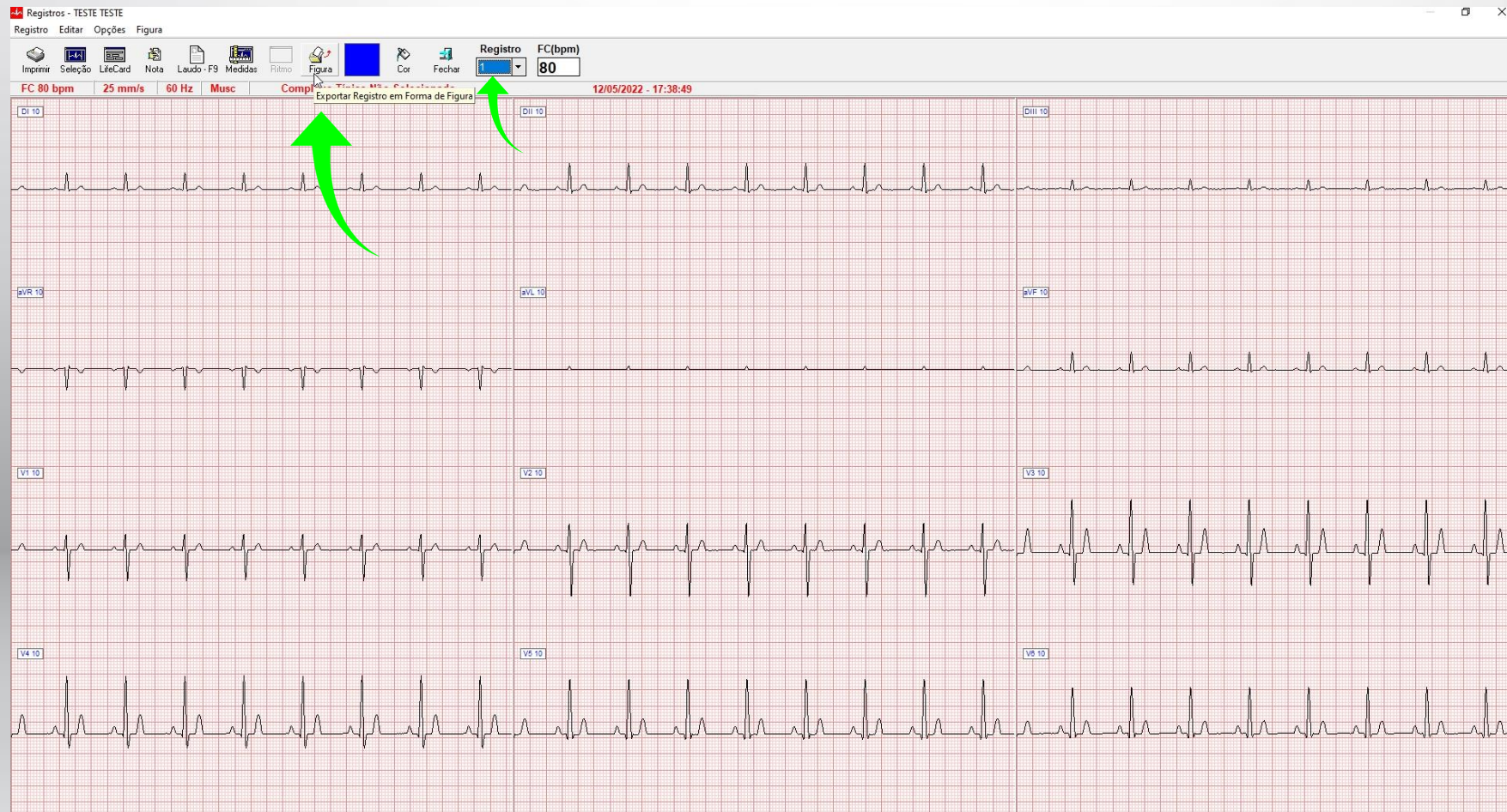


- Clique para SALVAR o registro selecionado.

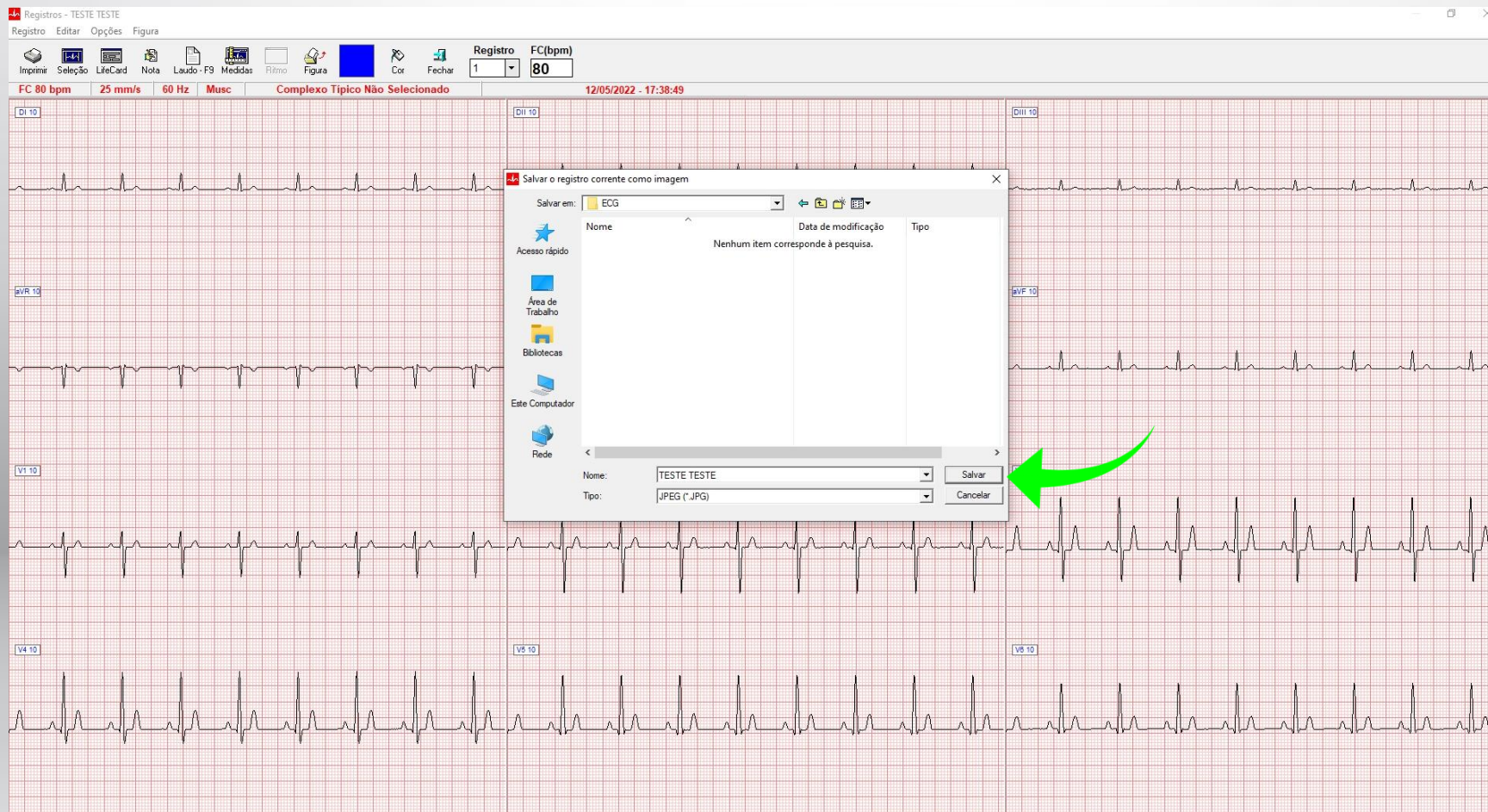

- Agora basta FECHAR a tela.

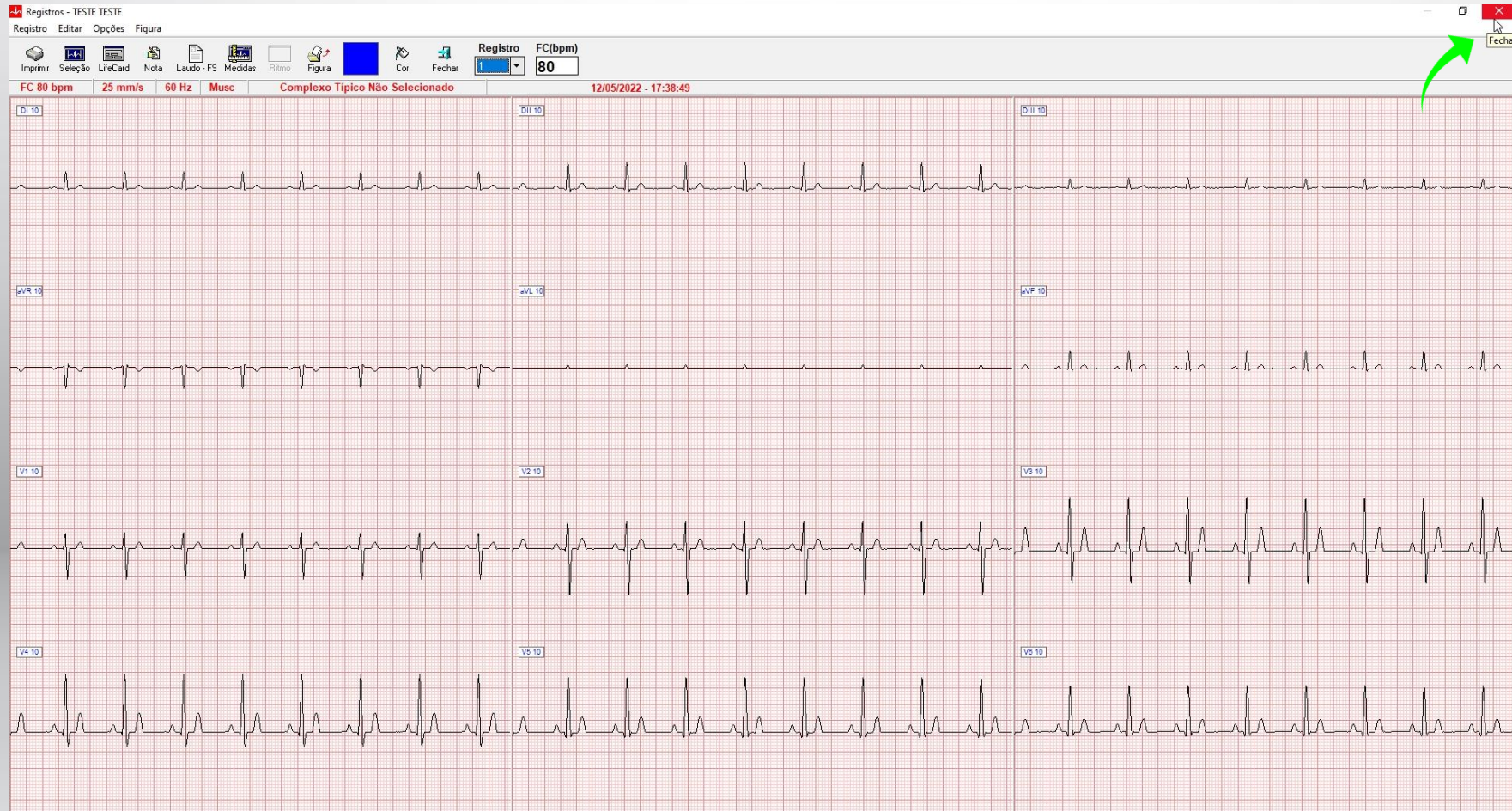

- Clique no botão FECHAR.

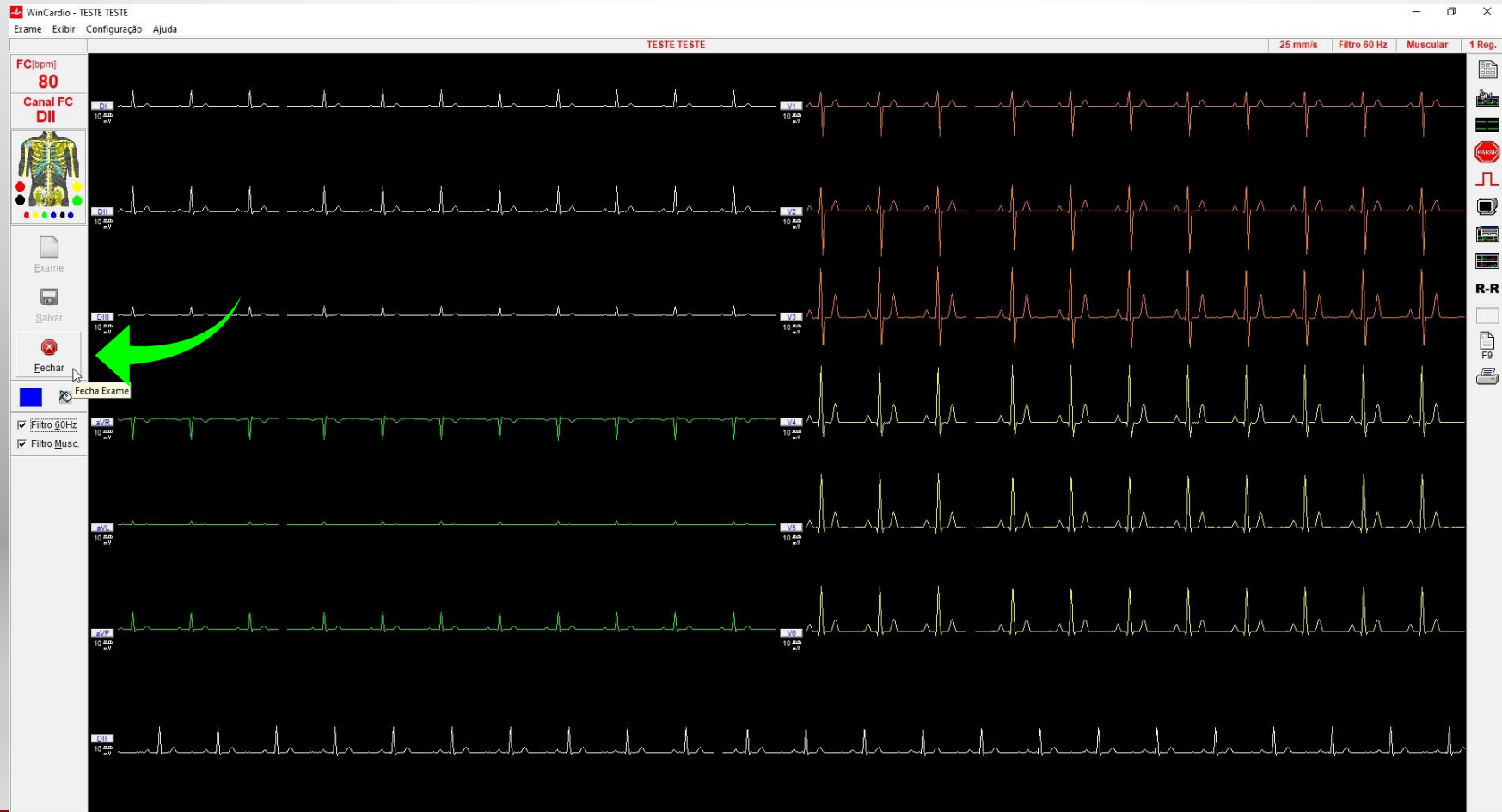

- Abra o navegador de internet Google Chrome.
- Acesse o site da Call ECG em: <https://www.callecg.com.br/>
- Clique em LOGIN, conforme imagem abaixo:



- Você será direcionado (a) para essa página.



SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Bem-vindo à CALL ECG

Acessar

Problemas no login?

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746
callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

homologado para [Chrome](#)



GODADDY®
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA






CLIQUE AQUI
ATENDIMENTO
VIA WHATSAPP



Printar - "Imprimir"



- Nesta tela, preencha os campos E-MAIL e SENHA com as suas credenciais, e clique em ACESSAR.

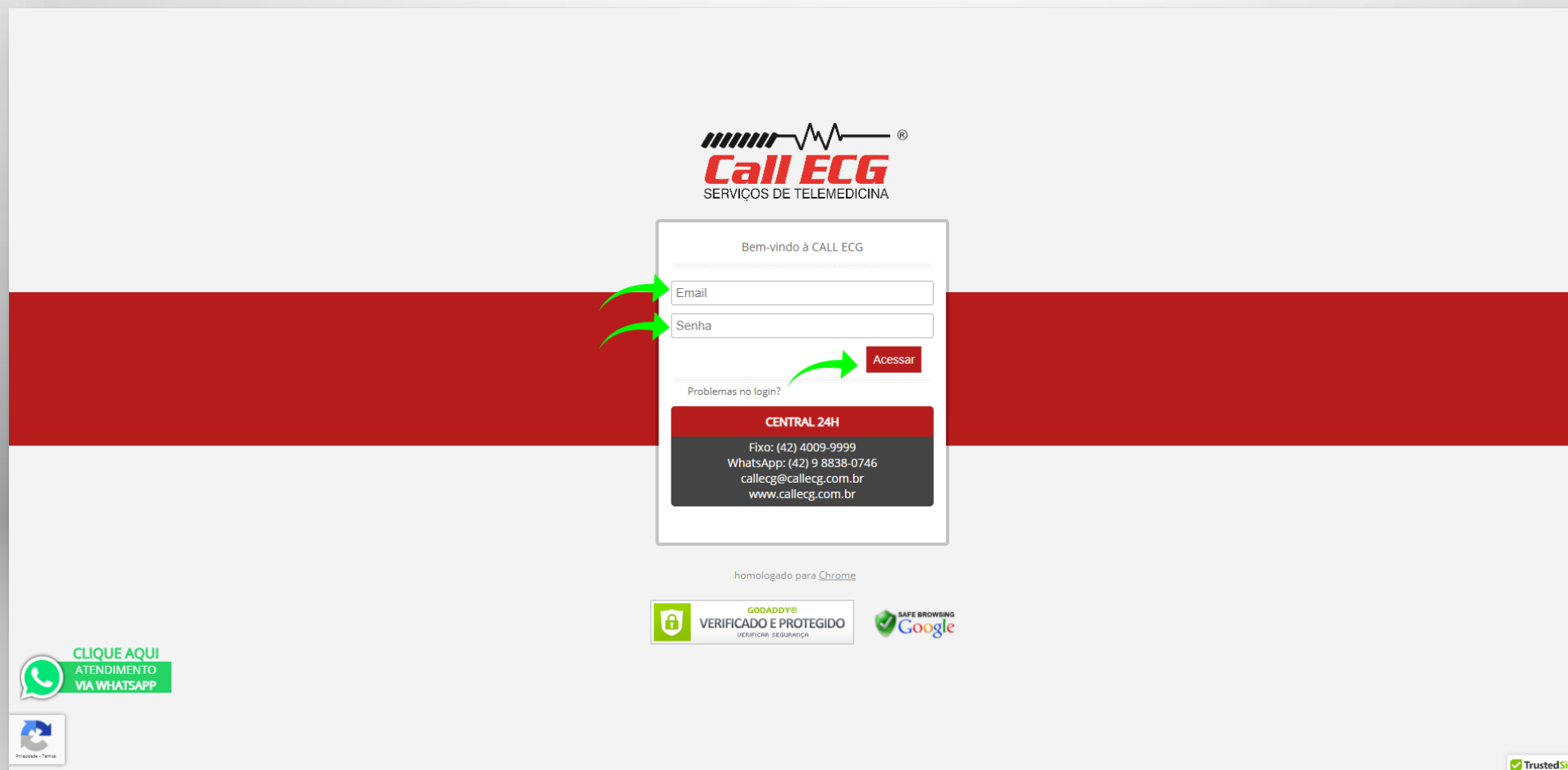

CALL ECG
SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Bem-vindo à CALL ECG

Email

Senha

[Acessar](#)

Problemas no login?

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746
callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

homologado para [Chrome](#)

 **GODADDY®**
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA

 **SAFE BROWSING**
Google

 **CLIQUE AQUI**
ATENDIMENTO
VIA WHATSAPP

 **Printar**

 **TrustedSite**

- Nesta tela, é exibida todas as operações do sistema.



Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Código da Unidade: 000-1



0



v.3.06.00

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

Laudando

Emergência

Revisar

Retificação

Unidade:

Todos

Filtrar

Exames

Período: 31/07/2021 a 30/08/2021

Total de laudos Contratados: 40

Laudos emitidos: 1

Aguardando 0

Recusados 0

Finalizado

50

 por página

Pesquisar

Buscar

Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
Nenhum registro encontrado							

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior

Próximo

- Clique no botão verde ADICIONAR EXAME.



Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Código da Unidade: 000-1



0



0



v.3.06.00

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callegc@callegc.com.br
www.callegc.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

Laudando

Emergência

Revisar

Retificação

Unidade:

Todos

Filtrar

Exame

Período: 31/07/2021 a 30/08/2021

Total de laudos Contratados: 40

Laudos emitidos: 1

Aguardando 0

Recusados 0

Finalizado

50

 por página

Pesquisar

Buscar

Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
Nenhum registro encontrado							

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior

Próximo

- Preencha corretamente o nome completo do paciente, em seguida, será exibido uma listagem de nomes e seu respectivo CPF. Se o cadastro do paciente for localizado na listagem, você deverá clicar neste e preencher os demais dados solicitados, caso o cadastro não seja encontrado você deverá clicar em NOVO REGISTRO.

The screenshot displays the 'Call ECG' patient registration form. The interface includes a sidebar with navigation options: Gerenciar, Manutenção (0), Operação, and Exames (highlighted). The main form area is titled 'Paciente' and contains fields for Name, CPF, Date of Birth, Sex, and Marcapasso. A dropdown menu for 'Nome' is open, showing a list of names with 'TESTE TUTORIAL' selected and 'TESTE TUTORIAL [NOVO REGISTRO]' highlighted. A magnifying glass is positioned over this dropdown, and a green arrow points from the dropdown to the magnifying glass. Below the name field, there are sections for 'Endereço', 'Exame', 'Unidade', and 'Informações adicionais'. The 'Unidade' section shows '000-1 - Call ECG - Unidade de Teste'. The 'Exame' section has buttons for 'Assintomático', 'Pré Operatório', 'Dor', 'Dispneia', 'Náuseas / Vômitos', and 'Palpitação'. The 'Informações adicionais' section has a text area and a 'Limpar Campos' button. At the bottom, there is a table for 'Arquivo Tipo', 'Arquivo Nome', 'Data Adicionado', and 'Opções', with a 'Nenhum Arquivo Adicionado' message. A 'Cancelar' button and an 'Enviar Exame' button are at the bottom right.

Call ECG

Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021
Código da Unidade: 000-1

v.3.02.00

Paciente

Nome *

Informe o nome do paciente

TESTE TUTORIAL

TESTE TUTORIAL [NOVO REGISTRO]

CPF *

Data de Nascimento *

Sexo *

Selecione...

Selecione...

Endereço

Exame

Unidade *

000-1 - Call ECG - Unidade de Teste

Assintomático Pré Operatório

Dor

Dispneia Náuseas / Vômitos Palpitação

Informações adicionais (Outros sintomas, dados de exame físico, medicamentos, entre outras)

Limpar Campos

Arquivo Tipo Arquivo Nome Data Adicionado Opções

Nenhum Arquivo Adicionado

Adicionar Arquivo

Cancelar Enviar Exame

- O preenchimento de todos os dados corretamente é de extrema importância.

Call ECG

Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021
Código da Unidade: 000-1

v.3.02.00

Paciente

Nome *
TESTE TUTORIAL

CPF *
000.000.000-00

Data de Nascimento *
01/01/2000

Sexo *
Feminino

Tipo de Tel. *
PESSOAL

Número do Tel. *
(00) 00000-0000

Opção
-
+

Usa Marcapasso? *
Não

Endereço

Exame

Unidade *
000-1 - Call ECG - Unidade de Teste

Prioridade *
Eletivo

Número de Atendimento

Assintomático Pré Operatório

Dor

Dispneia Náuseas / Vômitos Palpitação

☐ Has
☐ Tabagismo
☐ Doença De Chagas
☐ Angioplastia Prévia

☐ Diabetes
☐ Obesidade
☐ Infarto Prévio
☐ Cirurgia Cardíaca Prévia

Informações adicionais (Outros sintomas, dados de exame físico, medicamentos, entre outras)
TESTE TUTORIAL SISTEMA

Limpar Campos

Adicionar Arquivo

Arquivo Tipo	Arquivo Nome	Data Adicionado	Opções
Nenhum Arquivo Adicionado			

Cancelar Enviar Exame

- Após todo o preenchimento dos dados, você deverá ANEXAR a IMAGEM do registro através do botão ADICIONAR ARQUIVO.

Call ECG

Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste
Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021
Código da Unidade: 000-1

v.3.02.00

Paciente

Nome *
TESTE TUTORIAL

CPF *
000.000.000-00

Data de Nascimento *
01/2000

Sexo *
Feminino

Tipo de Tel. *
PESSOAL

Número do Tel. *
(00) 00000-0000

Opção
-
+

Usa Marcapasso? *
Não

Endereço

Exame

Unidade *
000-1 - Call ECG - Unidade de Teste

Prioridade *
Eletivo

Assintomático Pré Operatório

Dor

Dispneia Náuseas / Vômitos Palpitação

Diabetes

Obesidade

Infarto Prévio

Cirurgia Cardíaca Prévia

Informações adicionais (Outros sintomas, dados de exame físico, medicamentos, entre outras)

TESTE TUTORIAL SISTEMA

Adicionar Arquivo

Arquivo Tipo Arquivo Nome Data Adicionado Opções

Nenhum Arquivo Adicionado

Adicionar Arquivo

Cancelar Enviar Exame

- O exame será encaminhado a central para processamento e aparecerá na aba AGUARDANDO.





Olá, Unidade de Teste - Unidade de Teste

Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

Código da Unidade: 000-1



v.3.02.00

Gerenciar

Manutenção (0)

Operação

Exames

CENTRAL 24H

Fixo: (42) 4009-9999
WhatsApp: (42) 9 8838-0746

callecg@callecg.com.br
www.callecg.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 - Estrela, Ponta Grossa - PR, 84040-130

Adicionar Exame

Laudando

Emergência

Revisar

Retificação

Unidade:

Todos

Filtrar

Exames

Período: 01/12/2021 a 30/12/2021

Laudos emitidos: 4

Aguardando **1**

Recusados **0**

Finalizado

50

por página

Pesquisar

Buscar

Opções

Código	Nº do Atendimento	Paciente	Prioridade	Unidade	Usuário	Data Adicionado	Opções
1054787		TESTE TUTORIAL	Eletivo	Call ECG - Unidade de Teste	Unidade de Teste - Unidade de Teste	16/12/2021 14:06	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior

1

Próximo



CENTRAL 24 Horas

Fone: (42) 4009-9999/ Suporte  (42) 9 9821-0021

 (42) 9 8838-0746

www.callecg.com.br

E-mail

callecg@callecg.com.br
qualidade@callecg.com.br
suporte@callecg.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,
Ponta Grossa - PR, 84040-130