


Procedimento para realizar eletrocardiograma Sistema

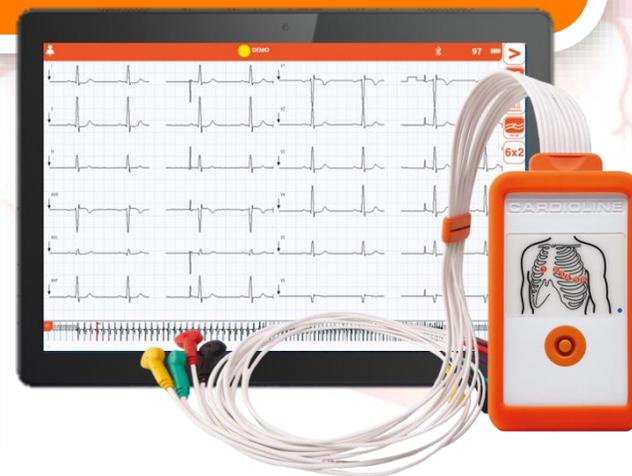

ECG DIGITAL
HD+

CARDIOLINE



- Relembre o posicionamento dos eletrodos:

Colocação dos Eletrodos

V1: Quarto espaço intercostal na borda direita do esterno

V2: Quarto espaço intercostal na borda esquerda do esterno


V3: Espaço intermediário entre V2 e V4

V4: Quinto espaço intercostal na linha média clavicular


V5: Quinto espaço intercostal na linha axilar anterior

V6: Quinto espaço intercostal na linha axilar média

Derivações Precordiais

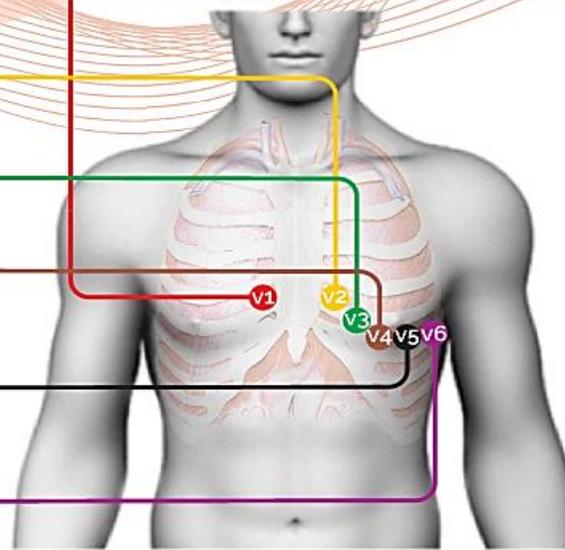

Derivações Periféricas

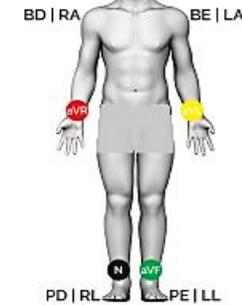

Vermelho: Braço Direito | Right Arm


Amarelo: Braço Esquerdo | Left Arm

Preto: Perna Direita | Right Leg

Verde: Perna Esquerda | Left Leg

*Padrão de Cores Europeu


- Ligue o aparelho Touch HD+, apertando o botão redondo laranja no equipamento.
- Aguarde o aviso sonoro, indicando que o equipamento ligou.

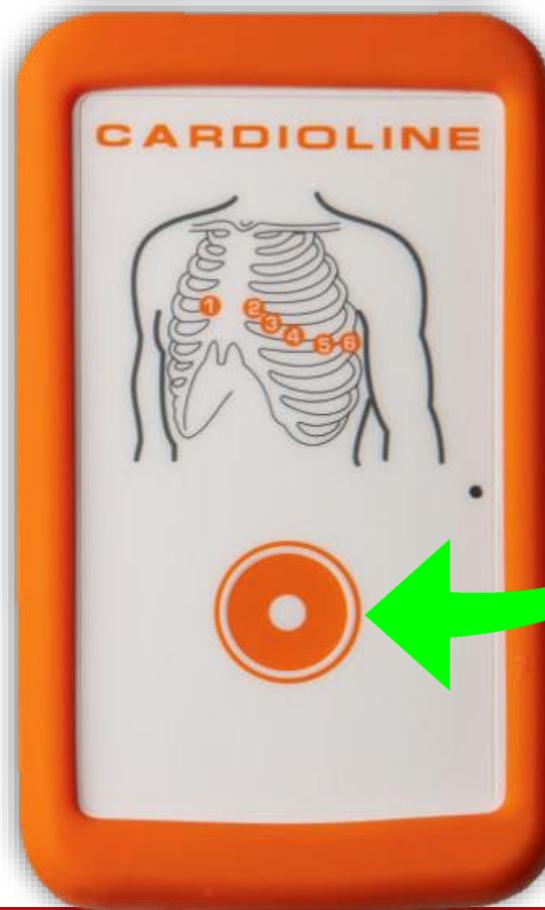

- Execute o programa **TouchECG**, localizado na área de trabalho do computador.
- Após abertura do programa, aguarde um novo aviso sonoro do equipamento indicando a conexão.



- Após o programa TouchECG carregar, clique no botão ID (ícone de pessoa).

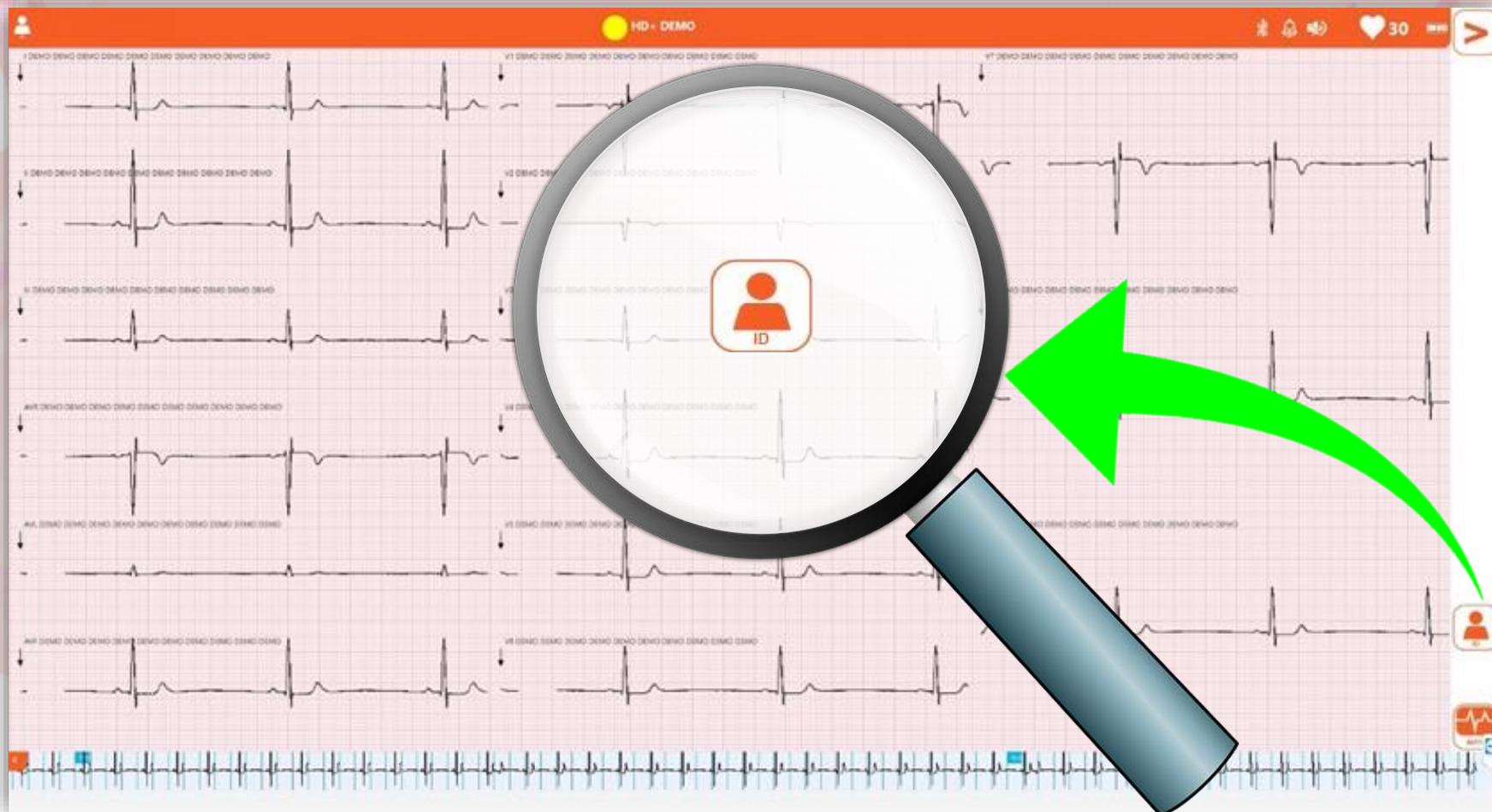

- Preencha os campos de informações do paciente na aba **Informação Principal**.
- É de extrema importância o preenchimento de **TODOS** os dados do paciente.
- O campo ID deverá ser preenchido com o **Número do CPF** do paciente.

PACIENTE		
INFORMAÇÃO PRINCIPAL	INTERPRETAÇÃO CLÍNICA	OUTRAS INFORMAÇÕES
ID	12345678910	Número do CPF do paciente
NOME	Teste	
SOBRENOME	Tutorial	
GÊNERO	DESCONHECIDO MASCULINO FEMININO NÃO ESPECIFICADO	
DATA DE NASCIMENTO	10/10/1989	X
IDADE	33	ANOS

touchECG (build 4.4.0.17499) CARDIOLINE Copyright © Cardioline SpA 2015

- Na aba **Interpretação Clínica**, preencha os campos: **Sistólica e Diastólica**, **Terapia Farmacológica** (Medicamentos), e **Técnico** (Nome do responsável que está realizando o exame).

PACIENTE		
INFORMAÇÃO PRINCIPAL	INTERPRETAÇÃO CLÍNICA	OUTRAS INFORMAÇÕES
PESO		kg
ALTURA		cm
SISTÓLICA	120	mmHg
DIASTÓLICA	80	mmHg
SPO2		%
TERAPIA FARMACOLÓGICA	Medicamentos	
TÉCNICO	Raul	
CONSULTA DE DIAGNÓSTICO		


touchECG (build 4.4.0.17499) **CARDIOLINE** Copyright © Cardioline SpA 2015

- Na aba **Outras Informações**, preencha os **Sintomas/Dados Clínicos** do paciente no campo **Notas**.

PACIENTE	
INFORMAÇÃO PRINCIPAL	OUTRAS INFORMAÇÕES
EMAIL	
ENDEREÇO	
NOTAS	Sintomas do Paciente
NÚMERO DO CELULAR	

touchECG (build 4.4.0.17499) CARDIOLINE Copyright © Cardioline SpA 2015

- Após o preenchimento dos dados, verifique que o **NOME DO PACIENTE** irá aparecer no canto superior esquerdo da tela.
- Aguarde no **MÍNIMO** 30 segundos **E** a estabilização do traçado antes de clicar para registrar o exame.
- Para registrar o exame, clique no botão **AUTO**, após 10 segundos o equipamento realizará o registro do exame.

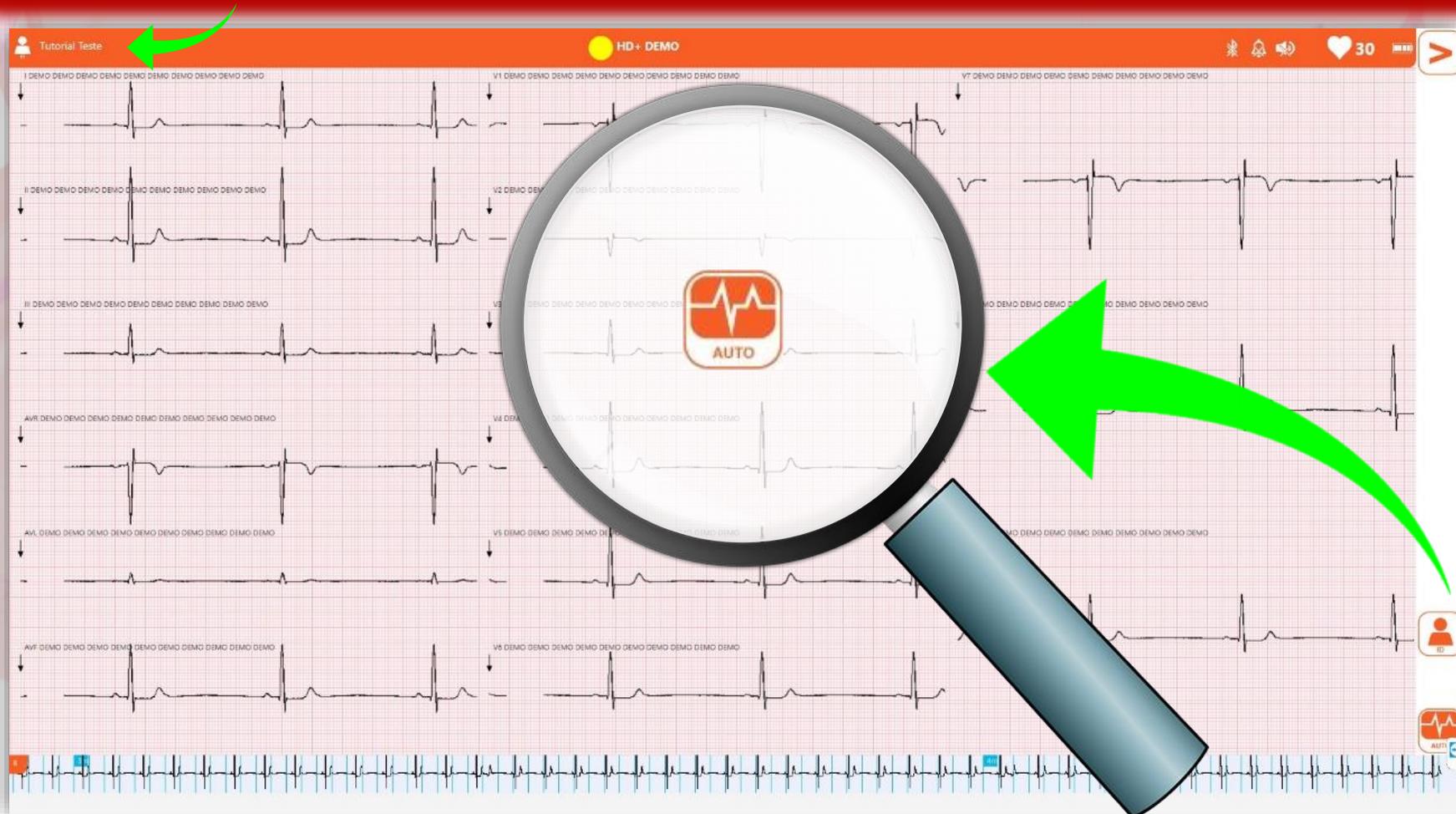

- Após o registro, o exame irá aparecer na tela com as informações do paciente na parte superior.
- Clique no botão **ENVIAR EXAME (Nuvem com seta para cima)** para enviar o arquivo para o sistema da CALL ECG.

The screenshot displays a medical software interface. At the top, there is a header with patient information: ID 12345678910, name Tutorial Teste, date 28/11/2022 16:24:05, and a section for INTERPRETAÇÃO. Below this is a table of patient data:

1989/10/10	MASCULINO	33 ANOS	---
ALTURA	cm	PESO	kg
PRES.	120/80 mmHg		
TÉCNICO	Raul		

Below the table is a table of ECG parameters:

FC	30 bpm	AvgRR	2000 ms
PR	196 ms	QRSd	102 ms
QT/QTch	566/514 ms	QTcB	---
QTcF	---	Sokolow-L	4.16mV
RV5-6/Sv1	1.85/2.31mV	EIXO	56/53/54°

The main area of the screen shows multiple ECG traces. A magnifying glass is positioned over a button that features a cloud icon and an upward-pointing arrow, which is the 'ENVIAR EXAME' button mentioned in the text. A green arrow points from the right side of the screen towards this button. On the right edge of the interface, there is a vertical toolbar with several icons, including a magnifying glass, a printer, and a cloud with an arrow.



Call ECG

Bem-vindo à CALLECG

Email

Senha

Acessar

Problemas no login?

Powered by  Finer Soluções Web
homologado para 


 **GODADDY®**
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFICAR SEGURANÇA

 **SAFE BROWSING**
Google

Acesse o Sistema Web

Para verificar o status do exame e realizar o download do laudo.

www.callecg.com.br/sistema

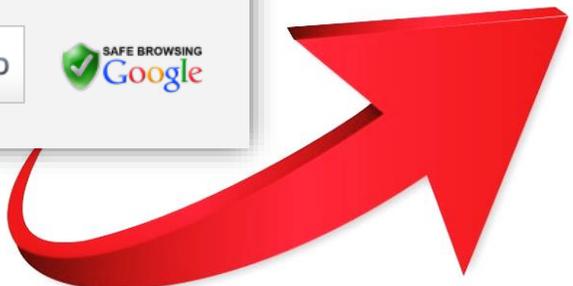



CENTRAL 24 Horas

Fone: (42) 4009-9999/  (42) 9 8838-0746

www.callecg.com.br

E-mail

callecg@callecg.com.br
qualidade@callecg.com.br
suporte@callecg.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,
Ponta Grossa - PR, 84040-130